

Rövid üzemeltetési útmutató

Működésjelző
Működés, figyelmeztetések hibák kijelzése

Peremöblítés
(külön kiöntőnél) opció
Mosogatókamra öblítése

Kijelző
a figyelmeztetések vagy hibák számára
Értesítse a műszaki szolgálatot
A jóváhagyó gomb
nyugtázza a hibát / lekapcsolja a jelet

Infravörös interfész

Rövid program ①

Normál program ②

Intenzív program ③

Kurzormező
a ▲ ▼ gomb a programfutások darabszámához való,
a ◀ ▶ gombot lásd a részletes üzemeltetési útmutatóban



1. Nyissa ki a mosogatókamra ajtaját.
Infravörös vagy opcióként lábkapcsoló.



2. A mosogatott árut az előírt helyzetben helyezze az edénytartóba.



3. A szennyezettségnek megfelelően válassza ki a tisztítási programot, és indítsa el, az adott gombot gyengén megnyomva. Az ajtó automatikusan bezáródik.



4. A program befejeződésekor nyissa fel a mosogatókamra ajtaját.
Infravörös vagy opcióként lábkapcsoló.



Figyelem

Becsípődés veszélye

Az ajtó mozgása becsípheti az ujját, kezét, karját.

- Az ajtó mozgásakor ne nyúljon a készülékbe.
- Az ajtó akadásának elhárítására hívja a háztECHNIKUS-t vagy a szervizt.