

Rövid használati útmutató

Működésjelző
Működés, figyelmeztetések hibák kijelzése

Peremöblítés
(külön kiöntőnél) opció mosogatókamra öblítése

Kijelző
a figyelmeztetések vagy hibák számára
Ertesítse a műszaki szolgálatot
Jóváhagyó gomb
nyugtázza a hibát/lekapcsolja a jelet

Infravörös interfész

Rövid program ①

Normál program ②

Intenzív program ③

Kurzormező
▲ ▼ gombok a programfutások számához,
◀ ▶ gombok: lásd a használati útmutatóban

1. A fotocellával vagy a lábgombbal nyissa fel a mosogatókamra ajtaját.

2. A tisztítandó tárgyat az előírt helyzetben helyezze az edénytartóba.

3. Válassza ki a szennyeződésnek megfelelő tisztítóprogramot. Nyomja meg a programgombot. Az ajtó bezáródik és a program automatikusan elindul az előre beállított A0 értékkel.

4. Alternatív megoldás
Tartsa megnyomva a programgombot addig, amíg a szükséges A0 érték meg nem jelenik középen a [] zárójelben. Ezután azonnal engedje el a programgombot.
Az ajtó záródik és a program automatikusan elindul.

⚠ Vigyázat!

Becsípődés veszélye
Az ajtó mozgása becsípheti az ujját, a kezét vagy a karját.

- Az ajtó mozgásakor ne nyúljon a készülékbe.
- Az ajtó akadásának elhárítására hívja a háztECHNIKUS-t vagy a MEIKO szervizt.