

MEIKO TopCut B

Rozřezávací zařízení na sáčky s močí a výměšky k použití
do všech myček podložních mís MEIKO



MEIKO TopCut B

Proměňte svou myčku podložních mís MEIKO na řezačku odpadu

BEZPEČNÁ A HOSPODÁRNÁ

S rozřezávacím zařízením *TopCut B* bude Vaše myčka podložních mís MEIKO ještě flexibilnější: během chvilky přejdete od čištění a dezinfikování sanitárního nádobí k bezproblémovému a hospodárnému rozřezávání, vyprazdňování a dezinfikování sáčků na moč a výměšky, naplněných řídkým obsahem. Lze použít do všech myček podložních mís od firmy MEIKO, ať už s manuálními nebo automatickými dvířky (volitelné příslušenství).



VÝHODY

- Snížení objemu odpadu
- Snížení poplatků za odpad
- Bezpečnost pro personál a pacienty – díky rozřezávání v uzavřeném systému
- Dezinfekce uvnitř zařízení
- Efektivní ochrana před pořezáním
- Nůž nenáročný na údržbu a málo podléhající opotřebení

V PRAXI PROSTĚ ABSOLUTNÍ JEDNIČKA

TopCut B přesvědčí v praktickém používání jednoduchým a spolehlivým zacházením. Integrovaný nůž se vysune až tehdy, když jsou dvířka myčky téměř zavřená. Při otevření dvířek mycí komory se automaticky vrátí do bezpečné výchozí polohy.

- Hygienické a bezpečné rozřezávání
- Jednoduché a rychlé vkládání sáčků
- Na požádání lze používat mnoho dalších typů sáčků

TAKHLE TO FUNGUJE



1. Vyjměte nástavec na běžné sanitární nádobí



2. Pomocí inteligentního systému pro rychlou výměnu vložte pohodlně dovnitř řezačku *TopCut B*




3. Vložte dovnitř sáček s močí nebo výměšky



4. Zavřete dvířka, proces řezání se spustí automaticky

Nižší poplatky za odpad díky snížení objemu odpadu

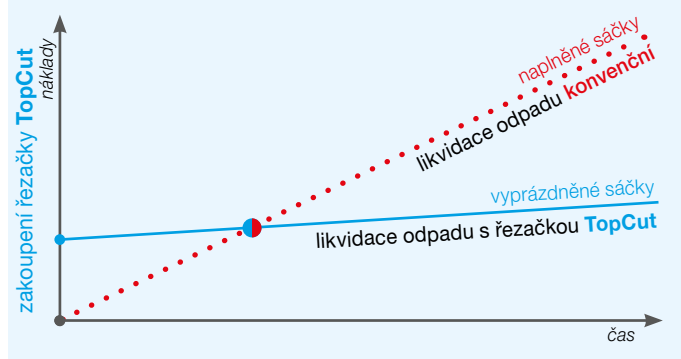

MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o.
Voctarova 2449/5, Liben · 180 00 Praha 8, Česká republika
Telefon +420 774 441 660 · office@meiko.cz · www.meiko.cz

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Rakousko
Telefon +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

