

# MEIKO TopCut B

Aufschneidevorrichtung für Urin- und Sekretbeutel zum Einsetzen  
in alle MEIKO Steckbeckenspüler



# MEIKO TopCut B

Verwandeln Sie Ihren MEIKO Steckbeckenspüler in einen Aufschneider

## SICHER UND WIRTSCHAFTLICH

Mit der Aufschneidevorrichtung *TopCut B* wird Ihr MEIKO Steckbeckenspüler noch flexibler: Im Handumdrehen wechseln Sie vom Reinigen und Desinfizieren von Pflegegeschirren zum problemlosen und wirtschaftlichen Aufschneiden, Entleeren und Desinfizieren von Urin- und Sekretbeuteln mit dünnflüssigem Inhalt. Einsetzbar in alle Steckbeckenspüler von MEIKO, ob mit manueller oder automatischer Gerätetür (Option).



## VORTEILE

- Verringerung des Müllvolumens
- Reduzierung der Abfallgebühren
- Sicherheit für Personal und Patienten – durch Aufschneiden im geschlossenen System
- Desinfektion im Gerät
- Effektiver Schnittschutz
- Wartungs- und verschleißarmes Messer

## EINFACH TOP IN DER PRAXIS

*TopCut B* überzeugt im Praxisbetrieb durch einfache und zuverlässige Handhabung. Das integrierte Messer fährt erst aus, wenn die Gerätetür fast geschlossen ist. Beim Öffnen der Waschkammertür geht es automatisch in die geschützte Ausgangsposition zurück.

- Hygienisches und sicheres Aufschneiden
- Einfaches und schnelles Einsetzen der Beutel
- Auf Anfrage viele weitere Beuteltypen einsetzbar

## SO GEHT'S



1. Einsatz für gängiges Pflegegeschirr herausnehmen



2. TopCut B bequem mithilfe eines intelligenten Schnellwechselsystems einsetzen




3. Urin- oder Sekretbeutel einsetzen



4. Tür schließen, Schneidvorgang startet automatisch

## Weniger Abfallgebühren durch Reduzierung des Müllvolumens

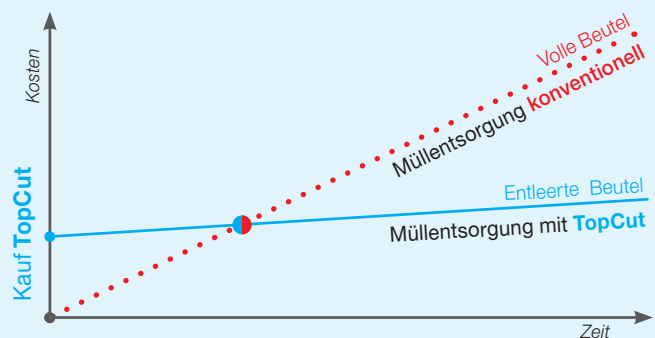

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland  
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH  
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich  
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz  
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

