

TopCut B de MEIKO

Dispositivo de corte para bolsas de orina y de secreciones para su uso en todas las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO



MEIKO TopCut B

Transforme su máquina de limpieza y desinfección de MEIKO en un dispositivo de corte

SEGURO Y RENTABLE

Con su dispositivo de corte *TopCut B*, su máquina de limpieza y desinfección de MEIKO será todavía más flexible: en un abrir y cerrar de ojos cambiará de la limpieza y desinfección de utensilios sanitarios a un corte, vaciado y desinfección de bolsas de orina y de secreciones con contenido de gran fluidez, de forma sencilla y rentable. Utilizable en todas las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO, ya sea con una puerta de la máquina manual o automática (opcional).



VENTAJAS

- Reducción del volumen de basura
- Reducción de las tasas de recogida de basura
- Seguridad para el personal y los pacientes gracias a un corte en un sistema cerrado
- Desinfección en el dispositivo
- Protección contra cortes efectiva
- Cuchilla de bajo desgaste y mantenimiento

SIMPLEMENTE EL MEJOR EN LA PRÁCTICA

TopCut B convence en la práctica gracias a su sencilla y fiable manipulación. La cuchilla integrada solo sale si la puerta del dispositivo está casi cerrada. Al abrir la puerta de la cámara de lavado, retrocede hacia la posición de salida protegida de forma automática.

- Corte seguro e higiénico
- Colocación sencilla y rápida de las bolsas
- Se pueden utilizar muchos otros tipos de bolsas bajo demanda

ASÍ FUNCIONA



1. Sacar el soporte para los utensilios sanitarios habituales



2. Utilizar el *TopCut B* con ayuda de un sistema inteligente de cambio rápido




3. Colocar las bolsas de orina o de secreciones



4. Cerrar la puerta y la operación de corte empieza automáticamente

Menos tasas para la recogida de basura gracias a la reducción del volumen de basura

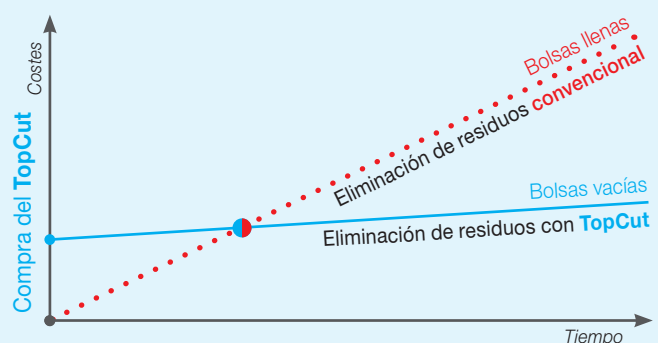

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 781 7731 · info@meiko.es · www.meiko.es

