

MEIKO TopCut B

Dispositif de vidange et désinfection des poches,
compatible avec les laveurs-désinfecteurs MEIKO



MEIKO TopCut B

Transformez votre laveur-désinfecteur MEIKO en un dispositif de vidange et désinfection des poches

SÛR ET ÉCONOMIQUE

Avec le dispositif *TopCut B*, votre laveur-désinfecteur MEIKO peut être encore plus polyvalent : en un tour de main, vous le transformez en système de vidange et désinfection des poches d'urine et autres liquides biologiques. Utilisable dans tous les laveurs-désinfecteurs MEIKO, qu'ils soient à ouverture de porte manuelle ou automatique.



AVANTAGES

- Réduction du volume de déchets
- Réduction des coûts de déchets
- Sécurité – la poche est percée en système fermé
- Désinfection dans le laveur-désinfecteur
- Protection efficace contre les risques de coupure
- Couteau à faible usure

UN SYSTÈME ULTRA-EFFICACE

Le *TopCut B* bénéficie d'une utilisation simple et fiable. Le couteau intégré ne sort que lorsque la porte du laveur-désinfecteur se ferme. À ouverture de la chambre de lavage, il revient automatiquement à sa position initiale.

- Perçage hygiénique et fiable
- Insertion simple et rapide des poches
- Utilisable avec plusieurs types de poches (sur demande)

PROCÉDURE



1. Retirer le support pour les ustensiles de soins courants



2. Mettre en place le *TopCut B* grâce au système rapide intelligent




3. Insérer la poche d'urine ou de liquide



4. Fermer la porte, le processus démarre automatiquement

Réduction du volume et des coûts de déchets

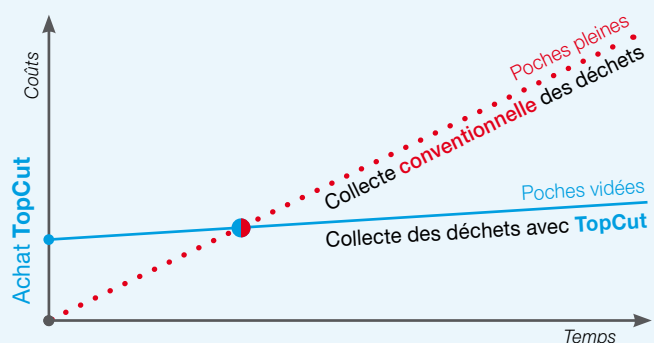

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

