

MEIKO TopCut B

Dispositivo tagliasacche contenenti urina e secrezioni da utilizzare in tutte le macchine di lavaggio e disinfezione MEIKO



MEIKO TopCut B

Trasformate la vostra lavapadelle in un dispositivo tagliasacche

SICURO E CONVENIENTE

Il tagliasacche mod. *TopCut B* rende ancora più versatile la lavapadelle MEIKO: con pochi gesti è possibile passare dalla pulizia e disinfezione degli utensili per settore sanitario al taglio, svuotamento e disinfezione delle sacche contenenti urina e secrezioni con un sistema semplice ed economico. Può essere utilizzato in tutte le macchine di lavaggio e disinfezione MEIKO con apertura manuale oppure automatica.



COME FUNZIONA



1. Estrarre il supporto universale per utensili e contenitori sanitari



2. Inserire facilmente il *TopCut B* con l'ausilio del sistema di cambio rapido



3. Inserire la sacca contenente urina o secrezioni



4. Il taglio si avvia in automatico chiudendo lo sportello della macchina

VANTAGGI


- Riduzione del volume dei rifiuti
- Abbattimento dei costi di smaltimento rifiuti
- Sicurezza per il personale e i pazienti grazie al taglio in un sistema chiuso
- Disinfezione all'interno della lavapadelle
- Protezione efficace contro i rischi di taglio
- Lame di taglio praticamente esenti da manutenzione e usura

SEMPLICEMENTE PERFETTO A LIVELLO PRATICO

TopCut B è un sistema sicuro ed affidabile che rende il lavoro degli utilizzatori più sicuro. La lama di taglio integrata fuoriesce solo quando lo sportello della lavapadelle è quasi chiuso e rientra automaticamente in posizione iniziale protetta all'apertura dello sportello della camera di lavaggio.

- Taglio sicuro e igienico
- Inserimento rapido e semplice delle sacche
- Può essere utilizzato con vari tipi di sacca – Contattateci per saperne di più

Costi di smaltimento ridotti grazie alla riduzione del volume dei rifiuti

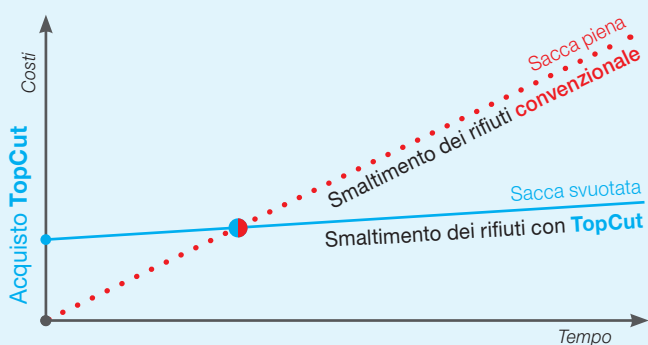

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at



Produttore:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

780.030.04.07.24/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche nell'ambito del nostro processo di miglioramento del prodotto.