

MEIKO TopCut B

Voor het opensnijden en legen van urine- en secretiezakken
in MEIKO bedpanspoelers



MEIKO TopCut B

Maak van uw MEIKO bedpanspoeler een snijapparaat

VEILIG IN GEBRUIK, BESPAART KOSTEN

Dankzij het snijapparaat *TopCut B* wordt uw MEIKO bedpanspoeler nog breder inzetbaar: in een mum van tijd schakelt u over van het reinigen en desinfecteren van zorg hulpmiddelen naar het probleemloos en efficiënt snijden, leegmaken en desinfecteren van urine- en secretiezakken met een vloeibare inhoud. Te gebruiken in alle MEIKO bedpanspoelers, met handmatige of automatische deuropening (optie).



VOORDELEN

- Minder afval
- Minder afvalkosten
- Veiligheid voor personeel en patiënten – dankzij opensnijden in een gesloten systeem
- Desinfectie in de machine
- Effectieve snijbescherming
- Onderhouds- en slijtarm mes

KLAART DE KLUS

TopCut B is een veilig en betrouwbaar systeem dat het werk van zorgmedewerkers gemakkelijker maakt. Het geïntegreerde mes wordt pas uitgeschoven als de deur van de waskamer bijna volledig gesloten is. Zodra de waskamerdeur geopend wordt, schuift het mes automatisch en veilig terug naar de oorspronkelijke positie.

- Hygiënisch en veilig opensnijden
- Eenvoudig en snel plaatsen van zakken
- Op aanvraag te gebruiken voor veel andere soorten zakken

ZO WERKT HET



1. Standaard houder voor zorg hulpmiddelen uitnemen



2. Plaats de *TopCut B* heel gemakkelijk met behulp van het slimme snelwisselsysteem




3. Urine- of secretiezak plaatsen



4. Deur sluiten, het snijden start automatisch

Afval afvoeren is duur: minder afval betekent lagere kosten

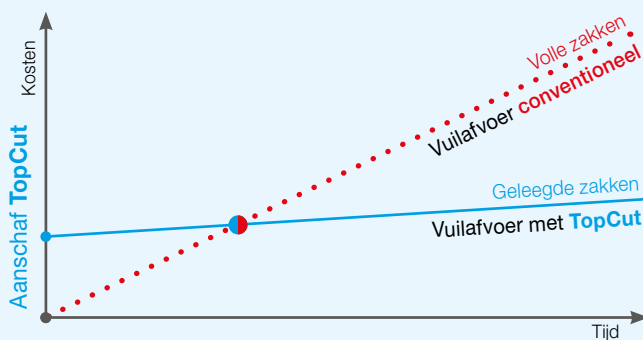

MEIKO NEDERLAND B.V.
Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

