

MEIKO TopCut B

Tüm MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılmak üzere idrar ve aspirasyon torbaları için kesme aparatı



MEIKO TopCut B

MEIKO sürgü yıkama makinenizi
bir kesiciye dönüştürün



The clean solution

GÜVENLİ VE EKONOMİK

TopCut B kesme aparatı sayesinde MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinenizle daha da esnek çalışabilirsiniz: Hızlı bir şekilde hasta bakım malzemelerinin temizlik ve dezenfeksiyonundan, idrar ve aspirasyon torbalarının sorunsuz ve ekonomik şekilde kesilmesi, boşaltılması ve dezenfeksiyonuna geçiş yapabilirsiniz. Hem manuel hem de otomatik kapağa (opsiyonel) sahip tüm MEIKO yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılabilir.



AVANTAJLAR

- Daha az çöp miktarı
- Daha az atık masrafı
- Kapalı sistemde kesildiği için personel ve hastalar için güvenlik
- Makine içinde dezenfeksiyon
- Kesilmeye karşı korunma
- Fazla bakım gerektirmeyen ve aşınmayan bıçak

İKNA EDİCİ PERFORMANS

TopCut B, basit ve güvenilir kullanımı sayesinde pratikte de ikna edici bir performans sergiler. Entegre bıçak, sadece makinenin kapağı neredeyse tamamen kapandığında ortaya çıkar. Kapak açıldığında, güvenli başlangıç konumuna otomatik olarak geri döner.

- Hijyenik ve güvenli kesme
- Torbayı kolay ve hızlı yerleştirme
- Farklı torba tipleri için bize ulaşın

SİSTEM ŞU ŞEKİLDE ÇALIŞIR:



1. Standart aparatı çıkarın



2. TopCut B'yi akıllı hızlı değişim sistemiyle kolayca yerleştirin




3. İdrar veya aspirasyon torbasını yerleştirin



4. Makine kapağını kapattığınız anda kesme işlemi otomatik olarak başlar

Çöp miktarının azalmasıyla daha düşük atık maliyetleri

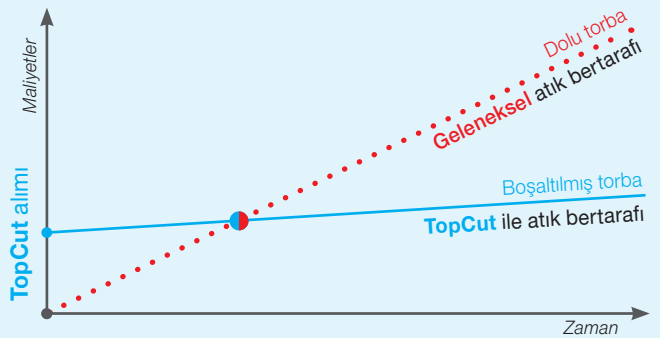

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com.tr

