

MEIKO TOPIC

Čisticí a dezinfekční přístroj

Originální návod k použití



**Před použitím přístroje si přečtěte
návod k použití!**



Obsah

1	POKYNY K NÁVODU K POUŽITÍ.....	5
1.1	Identifikace produktů	5
1.2	Obsah dodávky	5
1.3	Související dokumenty	5
1.4	Konvence zobrazení	6
1.4.1	<i>Výstražná upozornění</i>	6
1.4.2	<i>Pokyny k používání</i>	6
1.4.3	<i>Vyznačovací prvky</i>	6
1.4.4	<i>Symbody</i>	7
1.4.5	<i>Ilustrace</i>	7
2	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	8
3	BEZPEČNOST	9
3.1	Použití v souladu s účelem	9
3.1.1	<i>Určený účel</i>	9
3.1.2	<i>Okruh uživatelů</i>	9
3.1.3	<i>Prostředí použití</i>	9
3.1.4	<i>Pokyny k použití v souladu s určeným účelem</i>	9
3.1.5	<i>Stanovení činností podle okruhu osob</i>	10
3.2	Chybné použití	10
3.3	Bezpečnostní pokyny	11
3.4	Elektromagnetická slučitelnost	13
3.5	Chování v případě nebezpečí	13
4	POPIS PRODUKTU.....	14
4.1	Varianty	14
4.2	Popis funkce	14
4.3	Přehledové zobrazení	16
4.4	Volitelné možnosti	17
4.4.1	<i>Dávkování mycího prostředku</i>	17
4.4.2	<i>Automatické dveře (AT)</i>	17
4.4.3	<i>Oplach výlevky pro separátní výlevku</i>	18
4.5	Držák nádob	18
5	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	21

6	MONTÁŽ	24
7	UVEDENÍ DO PROVOZU	24
8	PROVOZ/OBSLUHA	24
8.1	Ovládací fólie	24
8.2	Čištění a dezinfikování s sanitárních nádob (programový cyklus)	25
8.2.1	Čištění sanitárních nádob (základní provedení zařízení)	27
8.2.2	Přerušení programu	29
8.2.3	Volba čisticího programu	30
8.2.4	Automatické dveře (AT), provoz se senzorem (volitelná výbava)	31
8.2.5	Automatické dveře (AT), provoz s nožním tlačítkem (volitelná výbava)	31
8.2.6	Blokování dveří s kódovým zámkem / zadání kódu (volitelná možnost)	32
8.3	Tovární nastavení hodnoty A_0	33
8.4	Výběr hodnoty A_0	33
8.5	Vyměnit kanistr	34
8.6	PRovedení oplachu výlevky (oplach výlevky)	35
8.7	Oplachování mycí komory (volitelné vybavení)	36
8.8	Poruchy	37
8.8.1	Hlášení	38
9	ZMĚNA SERVISNÍ ÚROVNĚ/NASTAVENÍ	45
9.1	Vyvolání servisní úrovně	45
9.2	Zobrazení nebo změna servisních parametrů	46
9.3	Odvzdušnění vedení	47
9.4	Nastavení data a času	47
9.5	Nastavení spínacích hodin pro automatické spuštění programu	48
9.6	Otevření dveří, příp. zrušení zajištění dveří	48
9.7	Definování prvního textového řádku zobrazení chyby	48
10	ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	49
10.1	Údržba	49
10.1.1	Nálepka „Následující Provozní údržba“	50
10.2	Validace procesu	50
10.3	Rutinní kontrola	51

10.4	Denní čištění	51
10.5	Odvápnění	52
11	POSTUP PŘI NEPOUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.....	52
12	UVEDENÍ MIMO PROVOZ	52
13	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE	52
13.1	Likvidace obalového materiálu	53
13.2	Likvidace vysloužilého zařízení	53
14	INDEX	54
15	POZNÁMKY	55

1 Pokyny k návodu k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a související dokumenty a uchovejte je v dosahu chráněné pro pozdější použití.

Všechny závažné nehody v souvislosti s výrobkem musí být nahlášeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu.

1.1 Identifikace produktů

Tento návod k použití platí pro následující typy zařízení:

Čisticí a dezinfekční zařízení MEIKO TOPIC

1.2 Obsah dodávky

Součástí dodávky je:

- Čisticí a dezinfekční zařízení MEIKO TOPIC
- Dokumentace, podrobnosti viz **Související dokumenty**

1.3 Související dokumenty

Dodatečně vedle tohoto návodu k použití existují další dokumenty, které jsou k dispozici v závislosti na autorizaci:

Pro obsluhu (součástí dodávky)	Pro autorizovaného servisního technika
ES/EU prohlášení o shodě	Servisní příručka
Stručný návod k obsluze	Kvalifikace pro instalaci a provoz
Soupis specifického sanitárního nádobí	
Schéma zapojení	
Návod k montáži	

1.4 Konvence zobrazení

1.4.1 Výstražná upozornění

 **NEBEZPEČÍ** – označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které při nedodržení vede k velmi těžkým zraněním nebo smrti.

 **VAROVÁNÍ** – označuje možné nebezpečí, které může při nedodržení vést k velmi vážným zraněním nebo k usmrcení.

 **POZOR** – označuje možné nebezpečí, které může při nedodržení vést k lehkým až středně těžkým zraněním nebo k věcné škodě.

1.4.2 Pokyny k používání



Upozornění - označuje užitečné a důležité informace o produktu nebo jeho používání.

1.4.3 Vyznačovací prvky

Popis rozlišovacích typografických značek použitých v tomto dokumentu:

- Tečka označuje výčet.
- 1. Na sebe navazující kroky postupu.
- (1) Čísla pozic uvedená v textu v závorkách odkazují na čísla pozic na obrázcích. Text související s obrázkem je uveden pod příslušným obrázkem nebo vedle něj.

1.4.4 Symboly

V seznamu jsou uvedeny maximální možné symboly, které lze ve spojení se zařízením na mytí podlahových mís používat. Skutečně použité symboly se liší v závislosti na provedení.

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Dbejte návodu k použití		Před údržbou nebo opravou odpojte
	Pozor		Výrobce
	Datum výroby		Pověřená osoba ve Švýcarsku
	Lékařské zařízení		Jedinečný identifikátor produktu
	Označení elektro- nických a elektric- kých zařízení, která se nesmějí likvido- vat spolu s domov- ním odpadem		Certifikační značka Nemko elektrické bez- pečnosti pro Severní Ameriku
	Evropská shoda, identifikační číslo notifikované osoby		Certifikační značka Watermark pro Austrálii
	Srbská značka shody		Používejte ochranu očí
	Používejte ochranné rukavice		

1.4.5 Ilustrace

Obrázky obsažené v tomto dokumentu nemusí být věrné originálu nebo měřítku. Vyobrazení se může lišit od originálu, např. v důsledku úprav výrobku, aniž by to snižovalo faktickou stránku nebo srozumitelnost.

2 Prohlášení o shodě

V tomto oddíle je uveden obsah ES/EU prohlášení o shodě daného výrobku. Obsah, který je již uveden v návodu k použití (např. stanovení účelu použití), se již znovu neuvádí. Podepsané ES/EU prohlášení o shodě včetně údaje sériového čísla je přiloženo k výrobku.

Na svou výhradní odpovědnost za toto prohlášení o shodě prohlašujeme, že tento výrobek vyhovuje nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

Označení výrobku

Čisticí a dezinfekční zařízení (MDA 0317)

Základna UDI-DI

4 050187 00222

Klasifikace podle MDR (EU) 2017/745:

Třída IIa podle přílohy VIII, pravidla 16

Použitý postup posuzování shody

Příloha IX nařízení (EU) 2017/745

Notifikovaná osoba podle MDR (EU) 2017/745

mdc medical device certification GmbH

Kriegerstraße 6, 70191 Stuttgart, Německo

mdc identification number 0483

Číslo osvědčení

D1182200009

Dále prohlašujeme, že výrobek vyhovuje požadavkům následujících směrnic EU:

- 2011/65/EU Směrnice omezující použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, OJEU L174/88, 01.07.2011

Platí pro výrobky vyrobené do:

12. 4. 2028

Podepisující osoba

- ppa. Christoph Homburger, vedoucí výroby a techniky
- v zast. Ingo Wiegand, osoba odpovědná za regulační předpisy

3 Bezpečnost

3.1 Použití v souladu s účelem

3.1.1 Určený účel

Zařízení na mytí podložních mís používejte výlučně k vyprazdňování, čištění a termickému desinfikování nádob na lidské výměšky, jako jsou:

- podložní mísy, nádoby na stoličce a jejich víka
- močové lahve
- nemocniční nádoby, jako jsou např. mísy, sběrné nádoby na moč
- odsávací lahve
- podobné produkty jako je uvedeno výše, které se používají pro podobné účely

3.1.2 Okruh uživatelů

Ošetrovatelský personál (starší 14 let) na klinikách, v ošetrovatelských a/nebo rehabilitačních zařízeních, který byl prokazatelně poučen o používání výrobku.

3.1.3 Prostředí použití

- Přednostně nečisté pracovní prostory ošetroven

3.1.4 Pokyny k použití v souladu s určeným účelem

Čisticí a dezinfekční zařízení je určeno výhradně ke komerčnímu použití. Jakékoli jiné použití, úpravy nebo změny nejsou povoleny a mohou vést ke zranění osob a poškození majetku.

Používat se směřují výlučně dávkovací prostředky k oplachování/změkčování a mytí, které byly společností MEIKO písemně schváleny pro použití v zařízeních na mytí podložních mís.

Schválené prostředky:

- Oplachovací/změkčovací prostředek: Doyen SK 10 / SK 22 E / SK 33 E
- Mycí prostředek: Doyen R 100 / RS 120

Dbejte bezpečnostních upozornění týkajících se dávkovacích prostředků (viz příslušné bezpečnostní listy).

3.1.5 Stanovení činností podle okruhu osob

Osoby Činnost	Zaškolený ošetřova- telský per- sonál	Zaškolený domovní technik	Autorizovaný domovní technik/montér (po- radce pro zdravotnické výrobky)
Instalace/montáž			✓
Uvedení do provozu			✓
Provoz, obsluha	✓	✓	✓
Čištění	✓	✓	✓
Kontrola bezpeč- nostních zařízení		✓	✓
Lokalizace poruch		✓	✓
Odstraňování me- chanických poruch		✓	✓
Odstraňování elek- trických poruch			✓
Údržba			✓
Opravy			✓

3.2 Chybné použití

Jakýkoliv způsob používání, který není uveden v kapitole „Určený účel“, je v rozporu s určeným účelem!

Seznam předvídatelného chybného použití:

- Vyprázdnění sanitárních nádob, ačkoliv jsou v držáku nádob v stále ještě umístěny čerstvě dezinfikované nádoby
- Chybné vložení sanitárních nádob
- Vložení nevhodných nádob, případně předmětů (jídelní nádobí)
- Dezinfikování předmětů, pro které je předepsán jiný proces přípravy, například nástroje
- Ohřívání nebo udržování teploty předmětů (ohřívací láhve, zabalené potraviny atd.)
- Použití pro likvidaci odpadu (například odpadky, pleny, jednorázové rukavice, stříkačky atd.) Platí také pro nadměrná množství buničiny a jednorázové sanitární nádoby.
- Manipulace s ovládacími prvky špičatými, případně ostrými předměty

- Obsluha nezaškolenými osobami
- Používání chybné, případně neschválené procesní chemie
- Šikmé umístění kanýstrů s procesními chemikáliemi - oplachovací/změkčovací prostředek (důsledek: přístroj pracuje bez chemikálií a může se zavápnit)
- Naplnění jiných kapalin do kanýstrů na procesní chemikálie
- Nedodržování předepsaných cyklů údržby
- Používání dveří procesní komory jako žebříku, případně sedadla

3.3 Bezpečnostní pokyny

- Zařízení na mytí podložních mís používejte výlučně v souladu s určeným účelem (viz strana 9).
- Používejte zařízení na mytí podložních mís výlučně v originálním stavu bez svévolných změn a v technicky bezvadném stavu.
- Elektrické připojení proveďte v souladu s místně platnými předpisy (např. HD 60364-1 / IEC 60364-1 / VDE 0100-100), aby bylo možné zařízení připojit k elektrické síti v souladu s instalačními předpisy. Národní předpisy zřizovatele se však mohou lišit. Přístroj je určen k pevnému připojení k elektrické napájecí síti a ochrannému vyrovnávání potenciálu připravenému v místě stavby a podle toho je také zkoušen a uváděn na trh.
- Jištění
Stroj navrhnete jako samostatně jištěný obvod (koncový obvod) podle místních podmínek a podle jmenovitého proudu (viz typový štítek). Dbejte případně dostupných variant připojení!
- Elektrické síťové odpojovací zařízení/síťový připojovací kabel
U přístrojů bez zařízení pro odpojení od elektrické sítě: Nainstalujte do trvalé místní instalace zařízení pro odpojení od elektrické sítě s odpojením všech pólů od sítě v souladu s instalačními předpisy. Síťové odpojovací zařízení musí být snadno přístupné pro obsluhující personál. Zařízení k odpojení od el. sítě musí odpovídat IEC 60947-1 a IEC 60947-3.

- Elektrická bezpečnost

Elektrická bezpečnost stroje je zaručena pouze tehdy, když je připojen k systému ochranných vodičů nainstalovanému podle předpisů. Je velmi důležité, aby byl tento základní bezpečnostní předpoklad řádně ověřen a aby v případě pochybností byla odborníkem překontrolována domovní instalace. Ochranná opatření včetně přípojky vyrovnávání potenciálu stroje a propojených komponent je nutné provést dle místních předpisů a podmínek místního dodavatele energií. Připojovací bod najdete v rozměrovém výkresu. Provozovatel může pro ochranu osob alternativně a na vlastní odpovědnost použít na straně sítě proudový chránič (RCM nebo RCD). Postačí typ „A“ (30 mA) podle normy IEC 60755.

- Před otevřením inspekčních dveří odpojte přístroj od síťového napětí a zajistěte ho proti opětovnému zapnutí; to platí i pro jiné práce na přístroji.
- Zařízení na mytí podložních mís nevytváří cíleně neionizující záření. Z technických důvodů vyzařují neionizující záření pouze elektrické provozní komponenty. V bezprostředním okolí kolem zařízení na mytí podložních mís může být s vysokou pravděpodobností vyloučeno působení na aktivní implantáty (např. kardiostimulátory, defibrilátory).
- Zařízení na mytí podložních mís neinstalujte v oblastech ohrožených výbuchem a mrazem.
- Poškozené nebo netěsné zařízení na mytí podložních mís může ohrozit bezpečnost osob. Zařízení na mytí podložních mís okamžitě uveďte mimo provoz a informujte servis MEIKO.
- Voda v mycí komoře a v nádrži na vodu není pitná voda.
- Pozor při zacházení s dávkovanými prostředky (změkčovací/oplachovací a mycí prostředky). Jedná se o dráždivé látky. Respektujte platné bezpečnostní předpisy! Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice. U všech dávkovaných prostředků je třeba respektovat bezpečnostní pokyny a bezpečnostní listy výrobců.
- Nesedějte ani nestoupejte na otevřená dvířka mycí komory. Takovéto jednání totiž vede k poškození zařízení a k úrazům.
- Návod k použití udržíte u zařízení na mytí podložních mís v čitelném a úplném stavu.
- Zajistěte, aby byl návod k použití k dispozici všem osobám, které obsluhují zařízení na mytí podložních mís.
- Dbejte návodů k použití příslušenství a integrovaných cizích produktů.

- Neodstavujte na zařízení na mytí podložních mís žádné předměty.
- Dbejte na dodržení podmínek pro instalaci (viz strana 21).

3.4 Elektromagnetická slučitelnost

- MEIKO Zařízení na mytí podložních mís vyrobená podle normy CISPR 11:2009 oddíl 5 jsou zařízení třídy A.

Pro tato zařízení platí:

Varování:

Toto zařízení může způsobovat rádiové rušení nebo rušit provoz zařízení ve své blízkosti. Může být nutné přijmout vhodná nápravná opatření, jako např. jiné místo instalace, jiné uspořádání nebo odstínění.

- MEIKO Zařízení na mytí podložních mís s dodatečným síťovým filtrem vyrobená podle normy CISPR 11:2009 oddíl 5 jsou zařízení třídy B. Pro tato zařízení nejsou nutná žádná další opatření.

3.5 Chování v případě nebezpečí



- V nebezpečných situacích odpojte od napětí síťovým izolačním zařízením budovy.

4 Popis produktu

4.1 Varianty

Čistící a dezinfekční zařízení se dodává v podobě následujících modelů:

- MEIKO TOPIC 10 (závěsný)
- MEIKO TOPIC 20 (stojící)
- MEIKO TOPIC 40 (podpultový)

Varianty vybavy:

- DT-NDV: tepelná dezinfekce s vestavěným nízkotlakým výparníkem

Všechny modely se dodávají v provedeních pro různá provozní napětí.

Další možné dodatečné vybavení:

- Dávkovací zařízení na tekuté čisticí prostředky (DR), např. Doyen R100
- AT - Automatické dveře
- Oplach výlevky

4.2 Popis funkce

Naplnění zařízení

Sanitární nádoby se vkládají do držáku nádob, který se nachází na vnitřní straně dveří mycí komory. Přitom je zajištěno, že se budou sanitární nádoby nacházet ve správné poloze pro čištění. Uspořádání mycích trysek v mycí komoře zajišťuje dokonalé mytí, pokud jsou sanitární nádoby ve správné poloze.

Při zavření dveří mycí komory dojde k vyprázdnění vložených nádob a sanitární nádoby jsou uvedeny do čisticí polohy. Dveře mycí komory jsou zajištěny. Obsluha zvolí na membránové klávesnici mycí program a stiskne tlačítko pro spuštění programu. Lze nastavit automatické spuštění programu po zavření dveří mycí komory.

Přístroje s automatickými dveřmi mycí komory (volitelně) umožňují rovněž bezkontaktní provoz.

Běh programu

Mycí program zahrnuje 4 fáze:

- Předčištění studenou vodou
- Vyčištění teplou vodou
- Tepelná dezinfekce sanitárních nádob
- Opětovné ochlazení a vysušení sanitárních nádob

Tepelná dezinfekce a zpětné ochlazení


Tepelná dezinfekce funguje podle procesu A_0 . Pojem A_0 je měřítkem (doba trvání/teplota) pro usmrcení mikroorganismů v dezinfekčním procesu vlhkým teplem. Tepelná dezinfekce je splněna, pokud je přednastavené hodnoty A_0 dosaženo na všech dezinfikovaných površích.

Pro snížení teploty sanitárních nádob se provádí krok opětovného ochlazení. Přitom je vysoká teplota snížena chladným, filtrovaným vzduchem a sanitární nádoby jsou usušeny.

Po ukončení programu se odjistí dveře mycí komory. Sanitární nádoby je možno vyjmout a obsluha je musí podrobit vizuální kontrole.

Dezinfekční výkon odpovídá hodnotě A_0 minimálně 60, která je požadována podle DIN EN ISO 15883 část 3 „Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky“.

Průběh teplot v mycí komoře/na sanitárním nádobí (intenzivní program č. 8)

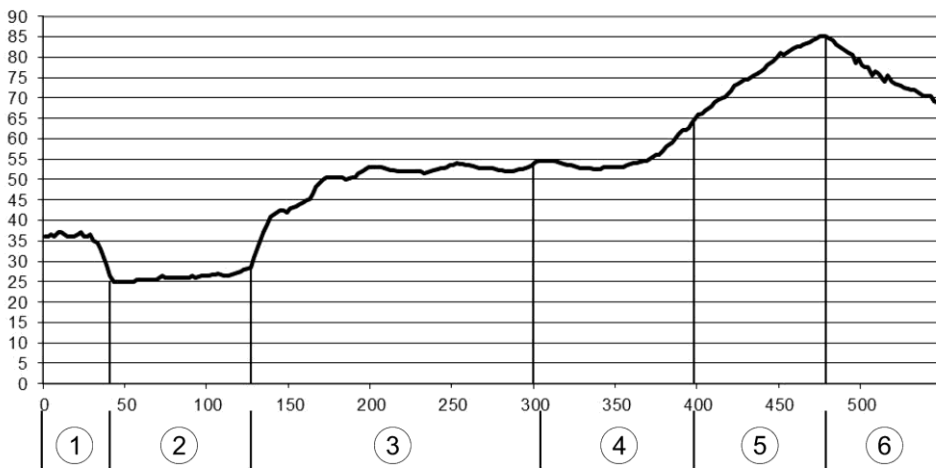

t(s) = čas v sekundách (osa x)


T(°C) = teplota ve °C (osa y)

- 1 Předčištění studenou vodou
- 2 Čekací doba plnění NTV
- 3 Čištění teplou vodou

- 4 Zahřátí NTV
- 5 Tepelná dezinfekce A_0 60
- 6 Zpětné chlazení/sušení

4.3 Přehledové zobrazení

MEIKO TOPIC 20 / TOPIC 10 (závěsný)

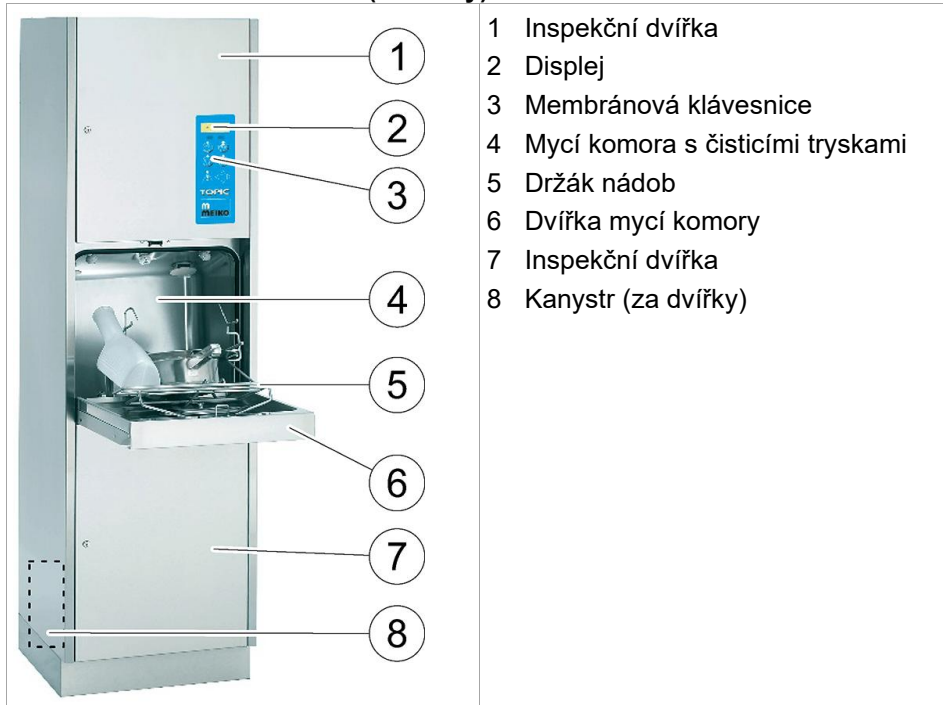

MEIKO TOPIC 40




4.4 Volitelné možnosti


4.4.1 Dávkování mycího prostředku

V případě silně znečištěných sanitárních nádob doporučujeme dodatečné dávkování mycího prostředku. Dávkování mycího prostředku zahrnuje kompletní dávkovací systém (sací trysku, hadice, monitorování dávkování a dávkovací přístroj), který je integrovaný v zařízení.

4.4.2 Automatické dveře (AT)

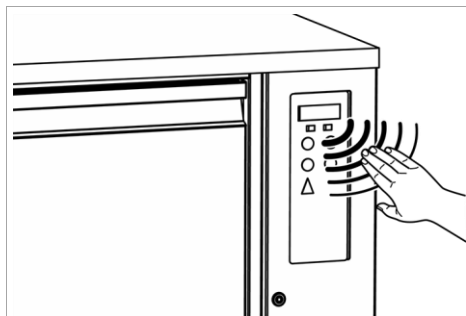

Bezdotykové otevírání dvířek senzo-rem, viz strana 31.

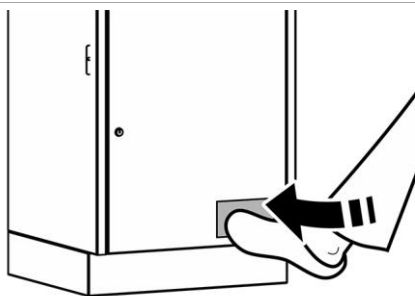


Bezdotykové otevírání dvířek nožním tlačítkem, viz strana 31.

4.4.3 Oplach výlevky pro separátní výlevku


S integrovaným čerpadlem zařízení na mytí podložních mís je možné vyplachovat výlevku. Program pro vyplachování výlevky se spouští přímo na zařízení, viz strana 35.

4.5 Držák nádob

Držák na nádoby pojme sanitární nádoby a uvede je do optimální polohy pro čištění a desinfekci.

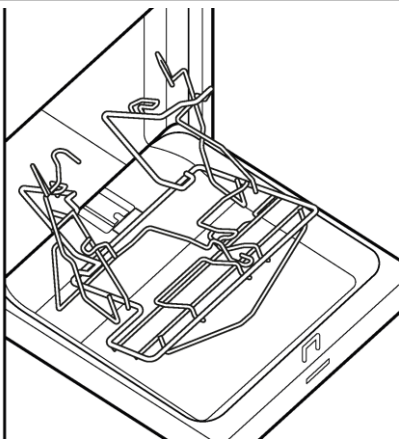


Držák nádob SUH 1

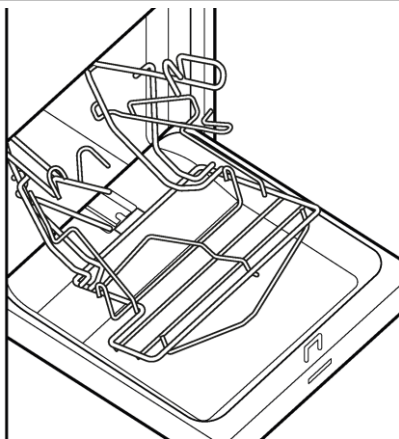


Držák nádob SUH 2

Polohy držáku sanitárních nádob SUH 1

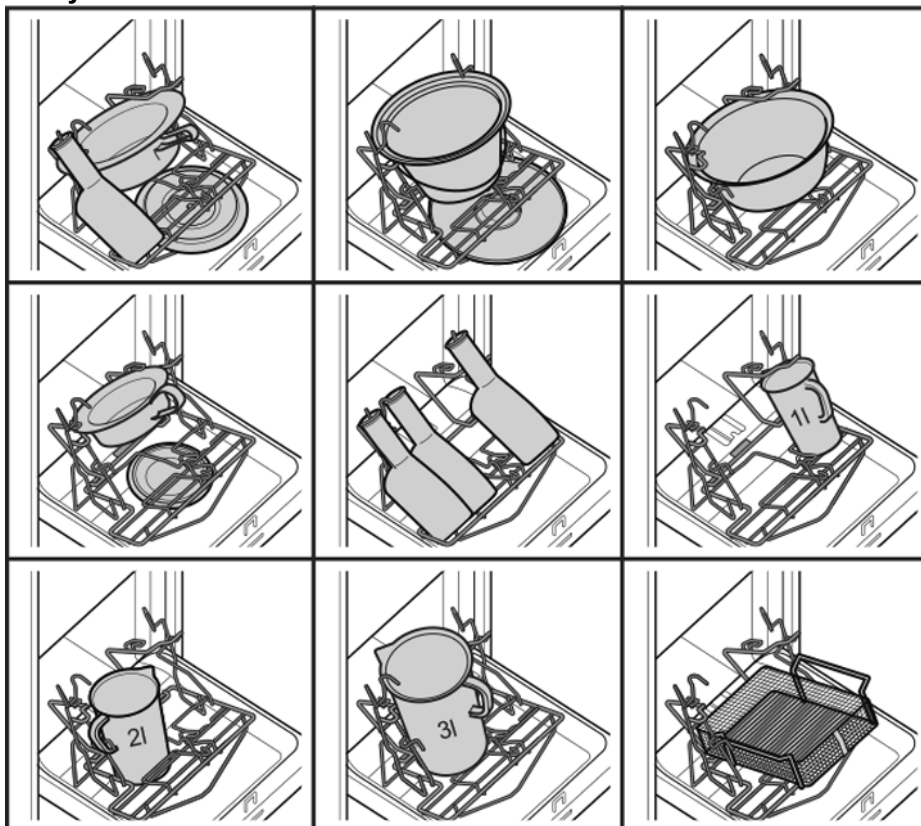

Polohy držáku sanitárních nádob SUH 2

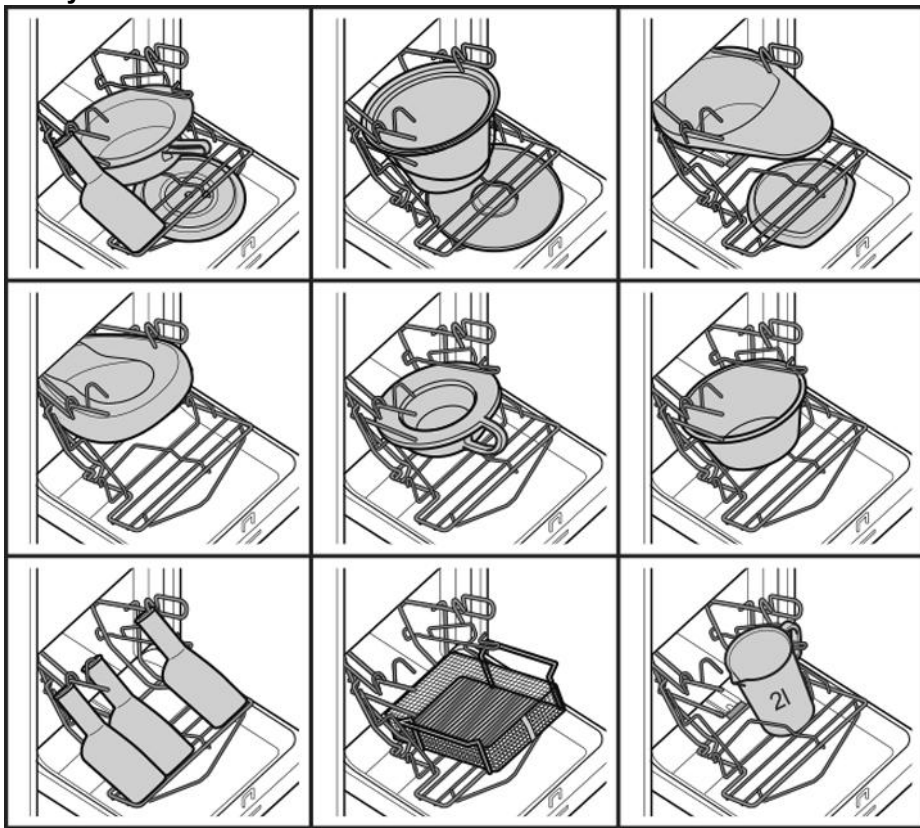

Polohy speciálního držáku nádob

- viz samostatný soupis sanitárních nádob

5 Technické údaje

Stupeň krytí	MEIKO TOPIC 10/20/40: IP X4
Třída ochrany	Třída I podle VDE 0750 / IEC 601
Podmínky instalace	Max. výška 2000 n.m. NHN, 5–40 °C s max. 80% rel. vlh., výlučně pro vnitřní použití, stupeň znečištění 2, kategorie přepětí 2, tolerance síťového napětí $\pm 10\%$, min. intenzita osvětlení okolního světla: 200 lx
Přívod čerstvé vody	Volný výtok skupiny A, typ A podle DIN 1988 / DIN EN 1717
Přívod na straně stavby	DN 20 ($\frac{3}{4}$ palce), studená voda 5–25 °C, teplá voda 45–60 °C. Čerstvá voda musí mít z mikrobiologického hlediska kvalitu pitné vody. To platí rovněž pro upravovanou vodu.
Tlak vody	100–500 kPa, před elektromagnetickým ventilem
Průtok vody	18 l/min
Objem bojleru DT-NDV	2,1 l
Emise hluku	Hladina hluku na pracovišti: $L_{pA} = 48,2$ dB(A) Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti pro dokumentovaný případ zátěže byla stanovena na základě: DIN EN ISO 11204; Třída přesnosti 3, nejistota měření ± 5 dB. Hladina akustického výkonu $L_{WA} = 58,5$ dB(A) Stanovení hladiny akustického výkonu z měření akustického tlaku bylo provedeno metodou obalové plochy pro zdokumentovaný případ zátěže podle: DIN EN ISO 3746; třída přesnosti 3, nepřesnost měření ± 3 dB.
Dezinfekční výkon	Hodnota A_0 nastavitelná od 60 do 3 000 (3 000 možné pouze v případě dovybavení ventilátorem)
Předávání tepla	při 9 cyklech programu/h: celkem 0,8 kW / senzitivně 0,5 kW / latentně 0,3 kW
Celkový objem komory	64,5 l

Hmotnosti netto (max.)	MEIKO TOPIC 10 75 kg	MEIKO TOPIC 40 97 kg (vč. podstavce, automaticky ovládaných dvířek, krytu a skříňky 200 mm)
	MEIKO TOPIC 20 78 kg	MEIKO TOPIC 40 (700) 83 kg (s podstavcem, krytem)

Systém dopravníku	
Teplota [°C]	-20 °C–40 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu [%]	80 %
Druh balení	Pouze v originálním přepravním obalu

Skladování s přepravním obalem	
Teplota [°C]	-20 °C–40 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu [%]	80 %
Místo	Možné přechodně (max. 14 dnů), i ve venkovním prostoru, doporučujeme zastřešení

Skladování bez přepravního obalu	
Teplota [°C]	-20 °C–40 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu [%]	80 %
Místo	Pouze ve vnitřním prostoru

Rozměry [mm]		MEIKO TOPIC 10	MEIKO TOPIC 20	MEIKO TOPIC 40
	Výška	1630	1730	900
	Šířka	500	500	900
	Hloubka	450	450	600

Elektrické parametry DT-NDV

Jmenovitý proud	Jmenovitý výkon	Síťové napětí (± 10 %)
11,8 A	2,6 kW	1 NPE, 220 V, 60 Hz
12,2 A	2,8 kW	1 NPE, 230 V, 50 Hz
12,2 A	2,8 kW	1 NPE, 230 V, 60 Hz
12,5 A	3,0 kW	1 NPE, 240 V, 50 Hz
18,7 A	4,5 kW *	1 NPE, 240 V, 50 Hz
11,5 A	2,3 kW	2 PE, 200 V, 50 Hz
11,5 A	2,3 kW	2 PE, 200 V, 60 Hz
12,5 A	3,0 kW	2 PE, 240 V, 50 Hz
13,2 A	3,6 kW	3 PE, 200 V, 50 Hz
13,2 A	3,6 kW	3 PE, 200 V, 60 Hz
14,2 A	4,3 kW	3 PE, 220 V, 50 Hz
14,5 A	4,6 kW	3 PE, 230 V, 50 Hz
14,2 A	4,3 kW	3 NPE, 220 V, 50 Hz
10,0 A	4,2 kW	3 NPE, 380 V, 50 Hz
10,0 A	4,2 kW	3 NPE, 380 V, 60 Hz
10,3 A	4,6 kW	3 NPE, 400 V, 50 Hz
10,7 A	5,0 kW	3 NPE, 415 V, 50 Hz
* Průřez přípojky 4,0 mm ²		

Elektrické parametry DT-NDV USA + Kanada

Jmenovitý proud	Jmenovitý výkon	Síťové napětí (± 10 %)
10,1 A	2,2 kW	1 Gnd, 208 V, 60 Hz
11,8 A	2,8 kW	1 Gnd, 230 V, 60 Hz
12,5 A	3,0 kW	1 Gnd, 240 V, 60 Hz
12,5 A	3,0 kW	1 NGnd, 240 V, 60 Hz
10,1 A	2,2 kW	2 Gnd, 208 V, 60 Hz
11,8 A	2,8 kW	2 Gnd, 230 V, 60 Hz
12,5 A	3,0 kW	2 Gnd, 240 V, 60 Hz
13,6 A	3,9 kW	3 Gnd, 208 V, 60 Hz
14,6 A	4,6 kW	3 Gnd, 230 V, 60 Hz
10,6 A	4,5 kW	3 Gnd, 240 V, 60 Hz

6 Montáž



Upozornění

Montáž čistícího a dezinfekčního zařízení viz návod k montáži.

7 Uvedení do provozu




Upozornění

Uvedení čistícího a dezinfekčního zařízení do provozu viz návod k montáži.

8 Provoz/obsluha

8.1 Ovládací fólie

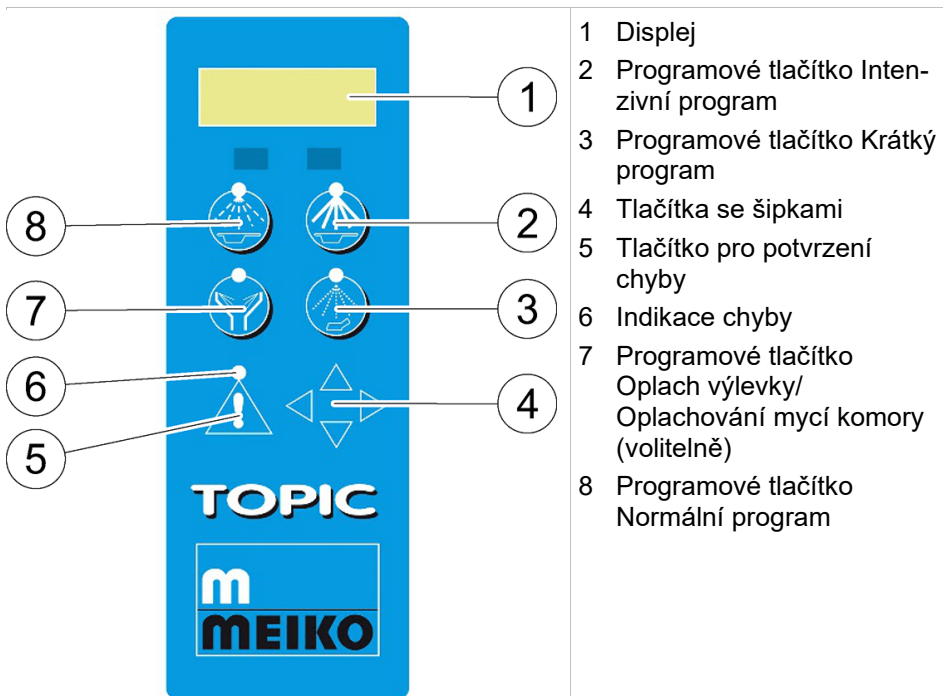

Indikace chyby

Stav indikace chyby	Význam
Indikace chyby vyp	Zařízení na mytí podložních mís je připravené k provozu.
Indikace chyby bliká	Zařízení na mytí podložních mís • vykazuje chyby. • ozývá se signální tón. • displej zobrazuje chybové hlášení. Pro vypnutí signálního tónu a potvrzení chyby: ➔ Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .
Svítlí indikace chyby	Zařízení na mytí podložních mís vykazuje chyby. Chyba byla potvrzena. ➔ Odstraňte chybu. ➔ Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

8.2 Čištění a dezinfikování s sanitárních nádob (programový cyklus)

NEBEZPEČÍ – Nebezpečí výbuchu způsobeného rozpouštědly v mycí komoře

- Do mycí komory nikdy nedávejte rozpouštědla.

VAROVÁNÍ – Opaření v důsledku vysokých teplot

- Před vyjmutím nechejte nádoby dostatečně vychladnout.

VAROVÁNÍ – Uskřípnutí ve dveřích mycí komory

- Při otevírání a zavírání dveří mycí komory se ujistěte, že nedojde k uskřípnutí údů.
- Při nejasnostech při odstraňování zablokování, zavolejte k odstranění zablokování domovního technika nebo servisního technika.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí infekce v důsledku nedostatečného čištění

- Zvolte čisticí program podle stupně znečištění a typu sanitárních nádob viz strana 30.

VAROVÁNÍ – Nebezpečí infekce v důsledku zbytkového znečištění

- Při vyjmutí z přístroje zkontrolujte, zda sanitární nádoby neobsahují zbytky.

POZOR – Nedostatečný výsledek mytí v důsledku vadného držáku nádob

- Ujistěte se, že držák nádob není ohnutý, příp. zdeformovaný (např. v důsledku nevhodných sanitárních nádob).
- Vkládejte sanitární nádoby podle soupisu.

POZOR – Poškození zařízení v důsledku zaseknutí nebo ucpání odtoku

- Používejte sanitární nádoby podle soupisu
- Dbejte na to, aby příslušné sanitární nádoby nesklouzly z držáku nádob.
- Zajistěte, aby se do mycí komory nedostala buničina a podobné látky ani nástroje.

POZOR – Koroze v cizorodého železa


- Zajistěte, aby se prostřednictvím přívodu čerstvé vody do zařízení na mytí podložních mís nedostalo žádné cizorodé železo nebo jiné kovové částice (například měděné piliny).

8.2.1 Čištění sanitárních nádob (základní provedení zařízení)


Použitých sanitárních nádob se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích. Dodržujte hygienické předpisy provozovatele!

Doporučení


Sanitární nádoby čistěte bezprostředně po použití. Maximální doba uložení použitých sanitárních nádob by neměla překročit 30 minut.

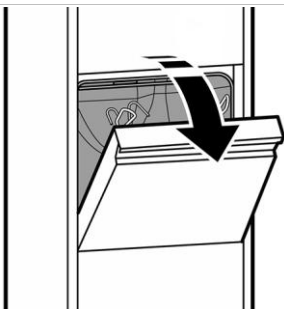


1. Otevřete dveře mycí komory.

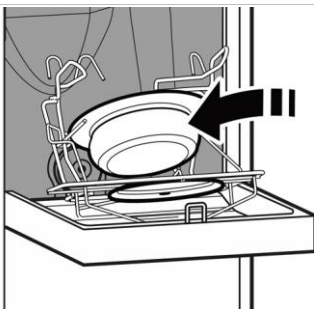

2. Sanitární nádoby vkládejte do držáku nádob v předepsané poloze.

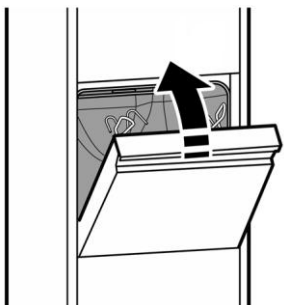

3. Zavřete dveře mycí komory.

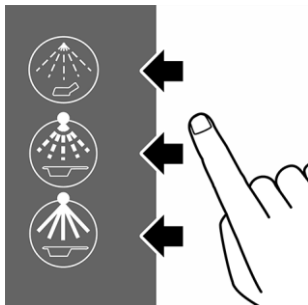


4. Zvolte čisticí program viz strana 24a spusťte program stisknutím příslušného tlačítka programu.

Během čisticího programu svítí LED dioda nad zvoleným tlačítkem programu.


Čistící a desinfekční program se spustí a běží až do konce programu plně automaticky.

Během průběhu programu jsou dveře mycí komory zajištěny.


Po ukončení programu:

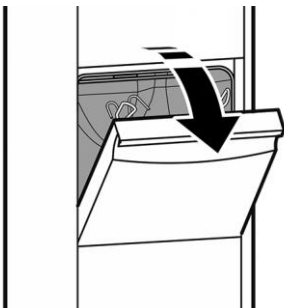

5. Sundejte si ochranné rukavice, otevřete dveře mycí komory.

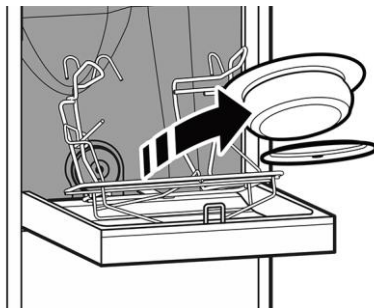

6. Vyměte sanitární nádoby.

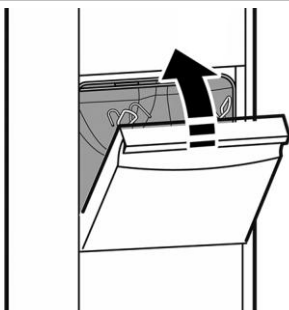


7. Zavřete dveře mycí komory.

8. Proved'te vizuální kontrolu sanitárních nádob. Pokud je čištění nedostatečné, zvolte příp. intenzivní program nebo nádoby podrobte alternativnímu čištění.

8.2.2 Přerušení programu

V případě, že byl spuštěn nesprávný čisticí program, je možné čisticí program zrušit a spustit správný program. Dveře mycí komory zůstanou zajištěná, dokud neproběhne kompletní program.

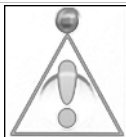

1. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby.




2. Zvolte čisticí program viz strana 24a spustíte program stisknutím příslušného tlačítka programu.

8.2.3 Volba čistícího programu

Program se spustí okamžitě po stisknutí tlačítka volby programu.

Provedení zařízení	Čistící programy	
	Tlačítko	Význam
Základní provedení		Krát.program Čištění a dezinfekce sanitárních nádob s kapalinami (např. močové lahve). Hodnota A ₀ : 60 Doba chodu 400 s Minimální teplota 70 °C
		Normál.program Čištění a dezinfekce sanitárních nádob s lidskými výměšky (např. podložní mísy). Hodnota A ₀ : 60 Doba chodu 440 s Minimální teplota 70 °C
		Intenziv.program Čištění a dezinfekce sanitárních nádob se silně ulpělými lidskými výměšky (např. kbelíky na stolici). Hodnota A ₀ : 60 Doba chodu 490 s Minimální teplota 70 °C
Volitelné možnosti (volitelně)		Oplach výlevky Čištění separátní výlevky Doba chodu 23 s
		Oplachování mycí komory Čištění mycí komory

8.2.4 Automatické dveře (AT), provoz se senzorem (volitelná výbava)

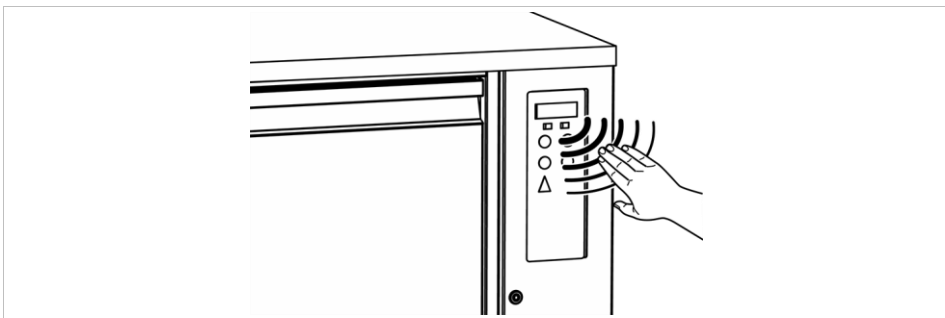


Všechny modely s AT (automatické dveře) jsou vybaveny senzorem, který umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří mycí komory.

V závislosti na přednastavení zařízení na mytí podložních mís se čisticí program spustí automaticky po zavření dveří.

- Pro otevření a zavření dveří položte ruku na krátkou chvíli 2–8 cm před senzor.
- Zvolte/spusťte program.

8.2.5 Automatické dveře (AT), provoz s nožním tlačítkem (volitelná výbava)

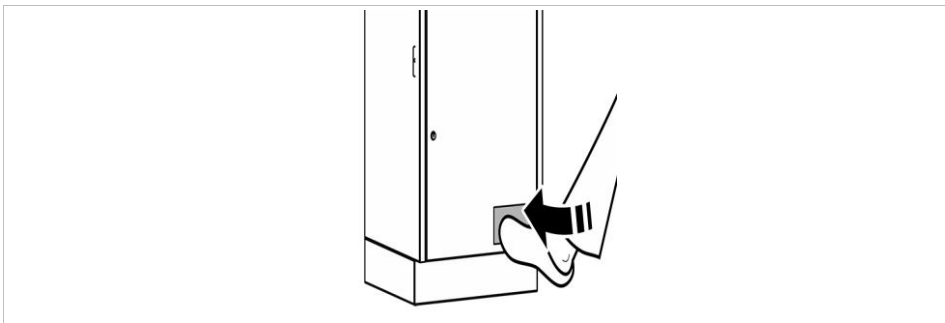

Dveře zařízení na mytí podložních mís je možno otevřít i pomocí nožního tlačítka. V závislosti na přednastavení zařízení na mytí podložních mís se čisticí program spustí automaticky po zavření dveří.

- Pro otevření a zavření dveří mycí komory stiskněte nožní tlačítko.
- Zvolte/spusťte program.

8.2.6 Blokování dveří s kódovým zámkem / zadání kódu (volitelná možnost)






Upozornění

Procesy, které je možno chránit kódovým zámkem:

- Otevření dvířek po skončení programu
- Spuštění programu
- Obojí

Z výroby je kód nastaven na **1**. Může jej změnit servisní technik.

- Čistící program je dokončen
A/NEBO
- Do zařízení bylo vloženo sanitární nádobí a systém nyní čeká na spuštění programu

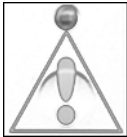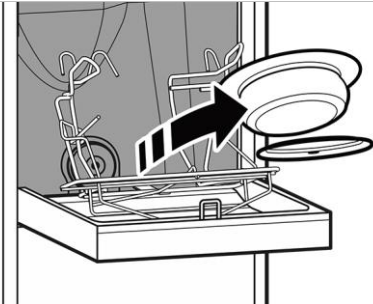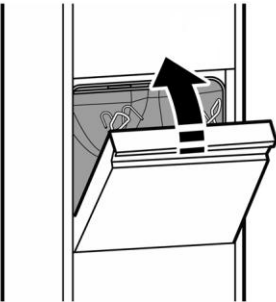CODE Zobrazí se výzva k zadání kódu.	△ ▽, resp. ◁ ▷ 1. Nastavte hodnotu šipkovými tlačítky.
 2. Potvrďte zadaný kód stisknutím tlačítka pro potvrzení chyby.	 3. Spusťte mycí program, viz strana 30, NEBO
 4. Vyjměte sanitární nádobí jako obvykle, viz strana 27.	 5. Zavřete dvířka mycí komory.

8.3 Tovární nastavení hodnoty A_0

Z výroby je parametr dezinfekce nastaven na hodnotu $A_0 = 60$.

Pokud budete potřebovat nastavit jinou hodnotu A_0 , kontaktujte servis MEIKO.

8.4 Výběr hodnoty A_0

Pro jednorázové spuštění programu lze hodnotu A_0 zvýšit až na 3000 ve stanovených krocích, v závislosti na parametrizaci zařízení. V menu výběru jsou zobrazeny pouze hodnoty, které jsou větší nebo rovny přednastavené hodnotě A_0 programu.



60 [600] 3000

1. Výběrové menu aktivujete stisknutím a přidržením některého programovatelného tlačítka. Zůstane-li programovatelné tlačítko dále stisknuté, probíhají přednastavené hodnoty A_0 zprava doleva. Prostřední hodnota v [] je vybraná hodnota.

2. Uvolněním tlačítka programu bude vybraná hodnota převzata a spustí se program

Kromě popsaného jednorázového zvýšení hodnoty A_0 nabízí zařízení možnost zvýšení hodnoty A_0 prostřednictvím centrálního externího ovládání, např. během pandemie, dočasně pro několik/všechna zařízení v budově.

8.5 Vyměnit kanystr

VAROVÁNÍ – Nebezpečí poranění při kontaktu s chemikáliemi

- Používejte ochranné brýle.
- Používejte ochranné rukavice.
- Respektujte platné bezpečnostní předpisy a bezpečnostní listy výrobců dávkovacích prostředků.
- V případě nouze dodržujte opatření první pomoci uváděná výrobcí dávkovacích prostředků.
- Přehled opatření první pomoci umístěte v blízkosti zařízení.



Upozornění

Může se stát, že jiné oplachovací/změkčovací prostředky než ty schválené společností MEIKO mohou vykazovat nižší schopnost vázání vápníku. Nevhodný oplachovací/změkčovací prostředek vede za určitých okolností k usazování vápníku na topných prvcích a na mycích tryskách. Tím se zhoršuje výsledek čištění.

Při použití čisticího prostředku jiného výrobce nebo jiné varianty dávkovacího prostředku propláchněte kompletní dávkovací systém čisticího prostředku vodou.

Obzvláště chemikálie a zvýšené teploty v procesu a také mechanické zatěžování při pevném uchycení a transportování negativně ovlivňují umývané materiály.




Upozornění

Kanystry na dávkovací prostředky jsou umístěny na různých místech v závislosti na zařízení, viz strana 16.

1. Otevřete dvířka, resp. zásuvku.
2. Vytáhněte z kanystru sací hubici.
3. Vyjměte prázdný kanystr.
4. Vložte nový kanystr (ještě uzavřený), až poté odstraňte víčko. Kanystr musí stát rovně.
5. Připojte ke kanystru sací hubici. Sací hubice musí být v kanystru umístěna svisle.
6. Zamkněte dvířka klíčem.
7. Odvzdušněte dávkovací systém, viz strana 47.


8.6 PŘivedení oplachu výlevky (oplach výlevky)

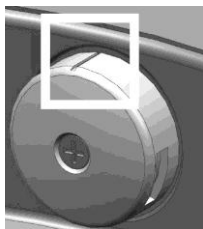

⚠ POZOR – Špatný výsledek čištění oplachu výlevky a odstříkující voda v důsledku chybně orientovaných čistících trysek

- Drážka trysek musí být zarovnaná s důlkováním na trychtýři.
- Povolte fixační šroub pomocí křížového šroubováku, zarovnejte trysky a utáhněte šroub rukou.

Při manipulaci se znečištěnými nádobami dbejte hygienických předpisů provozovatele!

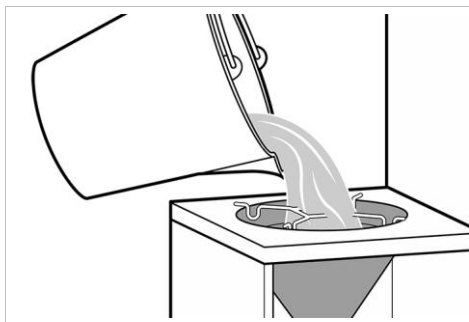

1. Vyprázdněte obsah nádoby.


2. Oplach výlevky pro separátní výlevku spusťte stisknutím tlačítka programu Oplach výlevky.

Oplachování pro separátní výlevku se spustí a běží po nastavený čas až do konce programu. Během průběhu programu jsou dveře mycí komory zajištěny.


8.7 Oplachování mycí komory (volitelné vybavení)

VAROVÁNÍ – Nebezpečí infekce v důsledku chybějící desinfekce


- Nikdy nepoužívejte oplachování mycí komory pro čištění sanitárních nádob.

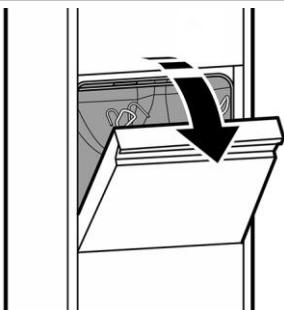

1. Otevřete dveře mycí komory.

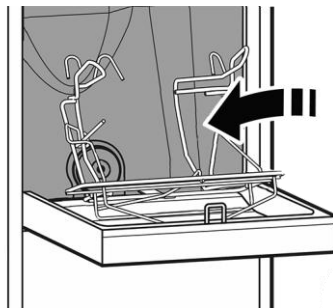

2. Vyprázdněte obsah nádoby do mycí komory.

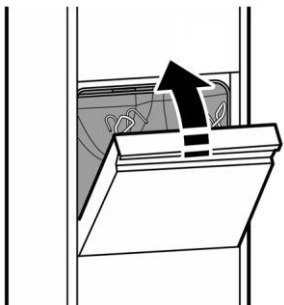

3. Zavřete dveře mycí komory.



4. Spusťte oplachování mycí komory stisknutím tlačítka programu **Oplachování mycí komory**.

Oplachování mycí komory se spustí a běží po nastavený čas až do konce programu. Během průběhu programu jsou dveře mycí komory zajištěny.

8.8 Poruchy

VAROVÁNÍ – Uskřípnutí ve dveřích mycí komory

- Při otevírání a zavírání dveří mycí komory se ujistěte, že nedojde k uskřípnutí údů.
- Při nejasnostech při odstraňování zablokování, zavolejte k odstranění zablokování domovního technika nebo servisního technika.

Příležitostně se vyskytující poruchy

Porucha	Možná příčina	Upozornění/náprava
Zablokování dveří během automatického zavření prostřednictvím senzoru nebo nožního tlačítka	Sanitární nádoby chybně vložené do držáku nádob / nevhodné sanitární nádoby	• Reverzní režim se spustí automaticky: dveře mycí komory se automaticky o kousek pootevřou a uvolní zablokování. • Aktivujte infračervený přibližovací spínač nebo nožní tlačítko pro kompletní otevření dveří. • Odstraňte zablokování. • Pokud nedošlo k zablokování, informujte oddělení domovní techniky nebo servisního technika.
Zablokování dveří při otevření po ukončení programu senzorem nebo nožním tlačítkem	Sanitární nádoby vypadlé z držáku nádob brání otevření dveří	• Reverzní režim se neaktivuje: dveře mycí komory zůstanou stát. Na displeji se objeví chybové hlášení 702, infračervený přibližovací spínač a nožní tlačítko jsou deaktivovány. • Odstraňte zablokování. • Potvrďte chybové hlášení. • Používejte zařízení jako obvykle. • Pokud nedošlo k zablokování, informujte oddělení domovní techniky nebo servisního technika.
Neúplný cyklus čištění	Přerušení programu obsluhou	• Nechte proběhnout celý čisticí cyklus.

Porucha	Možná příčina	Upozornění/náprava
		V případě poruchy zařízení je bezpečný přístup k sanitárním nádobám v zařízení možný pouze pro oprávněné osoby (např. servisní techniky).
Po skončení programu nejsou sanitární nádoby čisté	Nevhodné nebo chybně vsazené sanitární nádoby Zvolen chybný program Zbytky jsou příliš pevně zaschnuté	- Zkontrolujte polohu / vhodnost sanitárních nádob - Opravte výběr programu a spusťte znovu - Je třeba provést alternativní zpracování sanitární nádob. Odpovědnost za vhodné zpracování má provozovatel. Společnost MEIKO doporučuje, aby bylo za použití vhodného ochranného vybavení provedeno ruční základní čištění a následná dezinfekce.

8.8.1 Hlášení

Displej zobrazuje následující údaje:

- Informace
- Provozní hlášení
- Varování
- Chybová hlášení



Upozornění

K varováním a chybovým hlášením viz strana 41.

Informace

Nezávisle na aktuálním stavu procesu je možné vyvolat na displeji informace o zařízení na mytí podložních mís.

Přechod mezi jednotlivými zobrazeními:

- Šipkami ◀ příp. ▶ můžete přejít na předchozí, respektive následující zobrazení.

Opuštění zobrazení informací:

- Na první obrazovce stiskněte šipku △.

- Na poslední obrazovce stiskněte šipku ▽.



Upozornění

Pokud není po delší dobu stisknuto žádné tlačítko, dojde k automatickému opuštění zobrazení informací.

Text na displeji	Význam
Příští údržba	Počet cyklů programu do příští údržby
Počítadlo dávek Celkem	Součet dávek: všechny programy
Počítadlo dávek Krátký program	Součet dávek: Krátký program
Počítadlo dávek Normální pro- gram	Počet dávek: Normální program
Počítadlo dávek Intenzivní pro- gram	Počet dávek: Intenzivní program
Počítadlo dávek Externí tla- čítko programu	Počet dávek: Externí tlačítko programu (volitelná možnost)
Počítadlo dávek Spuštění podle času	Počet dávek: Spuštění podle času (volitelná možnost)
Počítadlo dávek PRS/WKS Program	Součet dávek: Program PRS (oplach výlevky) (volitelná možnost) Program WKS (Oplachování mycí komory) (volitelná možnost)
Sériové číslo	Sériové číslo zařízení na mytí podložních mís
Číslo AU	Objednací číslo zařízení na mytí podložních mís
Provozní hodiny	Počet provozních hodin zařízení na mytí podložních mís

Provozní hlášení zobrazují průběh zpracování programu.

Text na displeji	Význam
Připraven k pro- vozu	• Zařízení na mytí podložních mís je připravené k provozu. • Je možné vložení sanitárních nádob.
Plnění Studená voda >>	• Zařízení na mytí podložních mís naplní studenou vodu do nádrže.
Plnění >>>	• Zařízení na mytí podložních mís naplní studenou vodu do nízkotlakého výparníku.
Čištění Studená voda >>>	• Spustí se mycí čerpadlo. • Čištění studenou vodou.
Plnění Teplá voda >>>>>	• Zařízení na mytí podložních mís naplní teplou vodu do nádrže.
Čištění Teplá voda >>>>>>	• Spustí se mycí čerpadlo. • Čištění teplou vodou.
Zahřátí ... °C >>>>>>	• Výhradně při zadání pevného času zastavení a desinfekční teploty. • Zařízení na mytí podložních mís zahřeje nízkotlaký výparník. • Displej zobrazuje teplotu v mycí komoře.
Dezinfekce ... °C ... s >>>>>>>>>>>>	• Výhradně při zadání pevného času zastavení a desinfekční teploty. • Zařízení na mytí podložních mís zahřeje mycí komoru a sanitární nádoby párou. • Zařízení na mytí podložních mís dezinfikuje sanitární nádoby.
Zahřátí NDV 50 °C	• Výlučně při výpočtu hodnoty A₀. • Na displeji se zobrazuje teplota v nízkotlakém výparníku (NDV), dokud není dosaženo přednastavené hodnoty.

Text na displeji	Význam	Opatření
Otevřené dveře	Kontakt dveří není zavřený.	Zavřete správně dveře
Vyměňte oplachovací / změkčovací prostředek	Indikace zásobníku pro oplachovací prostředek / změkčovací nebo mycí prostředek.	- Připravte oplachovací prostředek. - Ještě lze provést 25 programových cyklů.
Vyměňte mycí prostředek		
Nádoba na oplachovací / změkčovací prostředek prázdná	Indikace zásobníku pro oplachovací prostředek / změkčovací nebo mycí prostředek.	Programový cyklus již nelze provést, je třeba vyměnit nádobu.
Mycí prostředek prázdný		
Podkročeny min. impulzy oplach. prostředku	Dočasně nebyly dosaženy minimální impulsy pro monitorování dávkování oplachovacího/změkčovacího nebo čisticího prostředku.	Není nutné žádné opatření.
Podkročeny min. impulzy čist. prostředku		
Provedení údržby	Proved'te údržbu.	Nechte provést údržbu.
Otevřete prosím dveře	Čisticí program je ukončen.	Otevřete dveře a vyjměte sanitární nádoby.
Spínač s klíčem	Zařízení s funkcí klíčového spínače.	Před spuštěním programu aktivujte klíčový spínač pomocí klíče.
Ruční ovládání	Stroje je dálkově řízen prostřednictvím M-Commander (Kabel - PC-Palm).	- Není nutné žádné opatření. - Není možné ovládání foliovou klávesnicí.
Chybné heslo	Chybně zadané heslo.	Zadejte znovu správné heslo.

V případě výskytu chyby:

- zobrazí displej chybové hlášení.
- vydá zařízení na mytí podložních mís akustický signál.
- bliká LED indikace chyby.

Pro vypnutí akustického signálu:

- Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

Chyba je potvrzená. Indikace chyby trvale svítí.

V případě všech níže neuvedených chybových hlášení nebo poruch:

- Informujte servis společnosti MEIKO.

Text na displeji	Význam	Opatření
Chyba č. 103 Je ucpaný odtok	Voda v sifonu neodtéká.	• Odstraňte znečištění, případně informujte servis MEIKO.
Chyba č. 401 Změkčovací/oplachovací prostředek je prázdný	Nádoba se změkčovacím/oplachovacím prostředkem je prázdná. Sací tryska je parametrisovaná, avšak není připojená.	• Vsaďte nový kanystr, viz strana 34.
Chyba č. 402 Monitorování dávkování změkčovacího/oplachovacího prostředku	Oplachovací / změkčovací prostředek již není dostatečně dávkován.	• Informujte servis společnosti MEIKO.
Chyba č. 501 Mycí prostředek prázdný	Nádoba s čisticím prostředkem je prázdná. Sací tryska je parametrisovaná, avšak není připojená.	• Vsaďte nový kanystr, viz strana 34.
Chyba č. 502 Monitorování dávkování Změkčovací prostředek	Čisticí prostředek již není dostatečně dávkován.	• Informujte servis společnosti MEIKO.
Chyba č. 210 Teplota studené	Vstupní teplota studené vody je příliš vysoká.	• Informujte servis společnosti MEIKO.

Text na displeji	Význam	Opatření
vody je příliš vysoká	Zaměněný přívod studené / teplé vody. Zaměněné cívky magnetických ventilů. Chyba při snímání teploty.	• Otevřete dveře mycí komory přes nastavení na servisní úrovni , viz strana 48.
Chyba č. 211 Teplota teplé vody je příliš nízká	Vstupní teplota teplé vody je příliš nízká. Tepelné ztráty v přívodním potrubí. Zaměněný přívod studené / teplé vody, zaměněné cívky elektromagnetických ventilů. Chyba při snímání teploty. Čidlo teploty není správně umístěné.	• Informujte servis společnosti MEIKO.

9 Změna servisní úrovně/nastavení

POZOR – Chyba funkce v důsledku nesprávného nastavení parametrů

Před změnou nastavení parametrů:

- Informujte autorizovaného podnikového technika nebo servis MEIKO.
- Dbejte pokynů v servisní příručce.

Servisní úroveň umožňuje na displeji následující nastavení a funkce:

- Zobrazení nebo změnu servisních parametrů
- Odvzdušnění vedení oplachovacího prostředku
- Odvzdušnění vedení čisticího prostředku
- Nastavení data a času
- Otevření dveří, příp. zrušení zajištění dveří
- Definujete první textový řádek zobrazení chyby (např. Servisní číslo nebo číslo technika domovní techniky)

9.1 Vyvolání servisní úrovně

1. Ujistěte se, že je zařízení na mytí podložních mís připraveno k provozu a že jsou ukončeny všechny čisticí programy.
2. Držte po dobu 2 sekund tisknutou šipku ▷.
3. Zadejte přístupový kód.
4. 10000 = zobrazení úrovně 1
5. 10001 = zobrazení úrovně 1 a změna
6. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

Displej zobrazuje servisní úroveň.



Upozornění

Pokud je na displeji zobrazena servisní úroveň, jsou zablokovány všechny ostatní funkce zařízení na mytí podložních mís.

Pokud není po dobu 120 sekund stisknuto žádné tlačítko, opustí zařízení na mytí podložních mís automaticky servisní úroveň a přepne se do stavu **připravenosti k provozu**.

Pokud je upravováno některé nastavení, pak zvolená hodnota bliká.

V servisní úrovni mají tlačítka na zařízení na mytí podložní mís následující funkce:

Tlačítko	Význam
Tlačítka se šipkami △ popř. ▽	- Pohyb v menu. Pokud je upravováno některé nastavení (zvolená hodnota bliká): - Zvyšte nebo snižte hodnotu.
Tlačítka se šipkami ◁ popř. ▷	- Opusťte bod nabídky. Pokud je upravováno některé nastavení (zvolená hodnota bliká): - Přejděte k předchozímu, případně následujícímu místu hodnoty.
Tlačítko pro potvrzení chyby ⚠	- Vyvolejte zvolený bod nabídky. Pokud je upravováno některé nastavení (zvolená hodnota bliká): - Potvrďte zadání.

9.2 Zobrazení nebo změna servisních parametrů

1. V servisní úrovni vyvolání bodu nabídky **Změna seznamu parametrů**.
2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby ⚠.
3. Tlačítka se šipkou △ popř. ▽ se pohybujete v seznamu parametrů.

Pro změnu parametrů:

1. Volejte požadovaný parametr.
2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby ⚠.
3. Změňte nastavení parametrů pomocí šipek.
4. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby ⚠ pro uložení nastavení.

- nebo -

5. Stiskněte šipku ▷ pro neuložení nastavení a návrat do seznamu parametrů.

9.3 Odvzdušnění vedení

Odvzdušnění vedení čisticího nebo mycího prostředku musí být odvzdušněno, když došlo k nasátí vzduchu dávkovacími přístroji. K tomu dochází, když se kanystr během provozu úplně vyprázdní nebo když nebyla sací hubice zavedena ke dnu kanystru.

1. V servisní úrovni vyvolejte bod nabídky **Odvzdušnění čisticího prostředku** nebo **Odvzdušnění oplachovacího prostředku**.

2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

Zařízení na mytí podložních mís odvzdušní požadované vedení.

Displej zobrazuje zbývající dobu činnosti.

Pro přerušení odvzdušňování vedení:

- Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

- neo -

- Stiskněte šipku .

9.4 Nastavení data a času

1. V servisní úrovni vyvolejte bod nabídky **Nastavení data + času**.

2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

Displej zobrazuje datum a čas.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

2. Tlačítky se šipkou změňte nastavení data a času.

3. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby  pro uložení nastavení.

- nebo -

Stiskněte šipku  pro neuložení nastavení a návrat do servisní úrovně.



Upozornění

Změnu mezi letním/zimním časem je možno provést výlučně ručně.

9.5 Nastavení spínacích hodin pro automatické spuštění programu

1. V servisní úrovni vyvolání bodu nabídky **Změna seznamu parametrů**.
2. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení chyby pro potvrzení podnabídky. Zobrazí se 1. parametr seznamu s aktuální hodnotou.
3. Pomocí tlačítek  popř.  zvolte v seznamu **parametr 118a (den v týdnu)** popř. **118b (hodiny)**.

Parametr 118a:

1: Po	2: Út	3: St	4: Čt	5: Pá
6: So	7: Ne	8: Po–Pá	9: Po–Ne	

Parametr 118b: Hodiny 1-24

4. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby  pro editaci hodnoty. Zobrazení hodnoty bliká.
5. Šípkami  popř.  změňte příslušnou hodnotu.
6. Tlačítkem pro potvrzení chyby  převezměte/uložte hodnotu. (Tlačítkem  přerušte.)

9.6 Otevření dveří, příp. zrušení zajištění dveří

1. V servisní úrovni vyvolejte bod nabídky **Otevření dveří**.
2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .

Zařízení na mytí podložních mís otevírá dveře mycí komory automaticky, případně automaticky odblokovává dveře mycí komory.



Upozornění

Sanitární nádoby nejsou dezinfikovány.

9.7 Definování prvního textového řádku zobrazení chyby

1. V servisní úrovni vyvolejte bod nabídky **Změna textu chyby**.
2. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby .
3. Pomocí kláves se šípkami zadejte čísla nebo text pro první řádek zobrazení chyby (max. 20 znaků).
4. Stiskněte tlačítko pro potvrzení chyby  pro uložení nastavení.

- nebo -

Stiskněte šipku  pro neuložení nastavení a návrat do seznamu parametrů.

10 Údržba a čištění

VAROVÁNÍ – Ohrožení života zásahem elektrickým proudem

Kontakt s díly přístroje pod napětím může mít za následek vážná zranění nebo usmrcení.

- Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři při dodržování elektrotechnických předpisů.
- Před zahájením prací na elektrickém zařízení odpojte zařízení od el. napětí. Za tímto účelem přepněte síťové odpojovací zařízení do polohy **VYPNUTO** a zajistěte je proti opětovnému zapnutí.
- Po vypnutí spínače pro opravy jsou připojovací svorky stále pod napětím.

POZOR – Věcné škody vniknutím vody

- Zařízení na mytí podložních mís, skříňové rozvaděče a elektronické součásti nikdy nečistěte hadicí na vodu, vysokotlakým čističem nebo parním čističem.

10.1 Údržba



Upozornění

Aby byla zajištěna pravidelná a řádná údržba, doporučujeme vám se servisem MEIKO společnosti MEIKO uzavřít smlouvu o údržbě.

Předpokladem pro trvale spolehlivý a bezpečný provoz zařízení na mytí podložních mís je pravidelná údržba. Nedostatečná nebo neodborně provedená údržba zvyšuje zbytkové riziko pro nepředvídané škody na majetku i ohrožení osob, za které poté nelze převzít záruku.

Pro Rakousko má údržba podle ÖMPG a ÖMPBV stejný význam jako pravidelné bezpečnostně technické kontroly.

Údržbu je nutno provádět:

- Pokud se zobrazí hlášení č. 3 **Proved'te údržbu**
- Po každých 5 000 čisticích cyklech (tovární nastavení, v případě potřeby lze upravit)
- Minimálně 1x ročně (viz samolepka **Následující údržba** na zařízení na mytí podložních mís)

Údržba zahrnuje následující body:

- elektrická bezpečnost podle VDE 0701/0702 (protokol o zkoušce v Německu volitelný)
- dávkovací systémy
- čisticí trysky
- nádoba na vodu/parní generátor
- držák nádob
- přítok a odtok vody
- šroubení a přípojky
- zpětné ochlazení
- mechanika dveří, zajišťování a těsnění dveří

V rámci údržby se provádí funkční kontrola následujících bodů:

- Průběh programu jako funkční zkouška
- Měření teploty. Protokol je volitelný.
- Kontrola měřicích systémů

Podrobný seznam toho, co zahrnuje údržba, je třeba nalézt v plánu údržby. Plán údržby je k dispozici pro autorizovaný a školený odborný personál.

Pro tlakotěsná flexibilní připojovací hadicová vedení dodaná společností MEIKO deklaruje výrobce provozní životnost v délce 10 let.

10.1.1 Nálepka „Následující Provozní údržba“

Samolepka „Následující údržba“ ukazuje, kdy je nutná následující pravidelná údržba zařízení na mytí podložních mís.



Měsíc, ve kterém je nutná údržba, směřuje nahoru (poloha 12 hodin). Na zde zobrazené samolepce je to prosinec 2006.

10.2 Validace procesu

Přiměřené provádění pravidelných čistících a dezinfekčních procesů je povinen zajistit provozovatel. V některých zemích to vyžadují také národní zákony, nařízení nebo doporučení.

10.3 Rutinní kontrola

Každý den před zahájením práce musí obsluha provést rutinní kontroly.

Je nutno provést vizuální kontrolu následujících bodů:

- čisticí trysky v mycí komoře (úplnost a poškození)
- mycí komora (nečistoty)
- držáky nádob (poškození a uchycení nádob)
- Kanystry (hladina náplně a vhodná chemie)
- indikace chyb a varování na displeji (v případě chyby předejte odpovídajícím způsobem informace)

10.4 Denní čištění

POZOR – Věcné škody způsobené nesprávným čištěním

Čištění dílů z nerezové oceli nevhodnými čisticími prostředky, ošetrujícími prostředky a čisticími pomůckami vede k poškození, zanášení nebo zbarvení zařízení.

- Nikdy nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující kyselinu solnou nebo bělidla na bázi chlóru.
- Nepoužívejte žádné čisticí pomůcky, které byly dříve použity k čištění běžné oceli.

Pokud není zařízení na mytí podložních mís používáno každý den, spustíte 1x denně program nebo ho nechte pomoci spínacích hodin (viz strana 48) spouštět automaticky.

- 1x denně vyčistěte vnější část zařízení na mytí podložních mís, zejména madlo dveří a membránovou klávesnici. Povrchy z nerezové oceli čistěte pouze čistíči vhodnými pro nerezovou ocel.
- Dbejte na to, aby čisticí prostředky nepoškozovaly materiál, netvořily na něm povlaky a materiál nezbarvovaly.
- Zařízení na mytí podložních mís nikdy nečistěte vodní hadicí, vysokotlakým nebo parním čističem.
- Těsnění mycí komory čistěte pouze vodou nebo mýdlovým roztokem.

10.5 Odvápňení

⚠ POZOR – Zničení plastových dílů a těsnění zbytky odvápňovacího prostředku

- Odvápňovací prostředek beze zbytku odstraňte z mycí komory.
- Vápenné usazeniny (změna barvy) v mycí komoře je nutno postříkat komerčně dostupným kapalným odvápňovačem (např. na bázi 10-20% kyseliny citrónové nebo kyseliny fosforečné).
- Je nutné mechanické ošetření kartáčem nebo hadrem. Nepoužívejte ocelový kartáč. Je třeba dbát bezpečnostních údajů výrobce a zavést vhodná bezpečnostní opatření (ochranné rukavice a ochrana očí, případně jednorázová zástěra).
- Nechte krátce působit (5 minut), poté dveře mycí komory zavřete a okamžitě spustíte čisticí program. Tím dojde k vymytí mycí komory.

11 Postup při nepoužívání zařízení

Čisticí a dezinfekční zařízení při své funkci používá a zpracovává vodu. Několikadenní odstávky vedou ke kontaminaci potrubí.

Abyste zabránili kontaminaci:

- Aktivujte program spínacích hodin viz strana 48.
- Naprogramujte program spínacích hodin tak, aby se zapínal každý den.
- Při dočasném nepoužívání zařízení zavřete v budově uzavírací ventil přívodu čerstvé vody.
- Při déletrvajícím nepoužívání nechte navíc vyprázdnit potrubní systém vyškoleným podnikovým technikem nebo pracovníkem servisu MEIKO.

12 Uvedení mimo provoz

Odstavení čisticího a dezinfekčního zařízení z provozu viz servisní příručka.

13 Demontáž a likvidace

Obal a vysloužilé zařízení mohou kromě cenných surovin a recyklovatelných materiálů obsahovat také látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí, které byly nezbytné pro fungování a bezpečnost starého zařízení.

13.1 Likvidace obalového materiálu

Veškerý obalový materiál je vyroben z recyklovatelných materiálů. Jedná se o následující materiály:

- rám z dřevěných profilů
- plastová fólie (PE fólie)
- pěnová hmota
- kartonáž (chrániče hran)
- balicí páska (pásková ocel)
- balicí páska (plast PP)
- popř. přepravní pojistka (nerezová ocel)

13.2 Likvidace vysloužilého zařízení

- Vysloužilá zařízení mohou být kontaminována lidskými výměškami, jinými tělesnými tekutinami, patogenními zárodky a dalšími látkami. Z tohoto důvodu musí být vysloužilá zařízení před likvidací dekontaminována.
- Vysloužilá zařízení je nutné po odborné demontáži znehodnotit, aby se tak vyloučily případné pozdější nehody.
- Zbytky procesních chemikálií se musejí likvidovat v souladu s bezpečnostními předpisy. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice.



Zařízení je označeno tímto symbolem. Za účelem řádné likvidace svého starého zařízení dodržujte prosím místní předpisy.

Součásti je nutno podle materiálů v nich použitých přednostně odevzdat k recyklaci.

Při likvidaci vysloužilého zařízení je nutné demontovat baterii uloženou v řídicí jednotce a zlikvidovat ji samostatně.

Nevyhazujte prosím své vysloužilé zařízení do zbytkového odpadu.

Za účelem odborné dekontaminace, demontáže a likvidace vysloužilého zařízení se můžete obrátit na servis společnosti MEIKO.

14 Index

A

Automatické dveře	31
Automatické dveře (AT)	17

B

Bezpečnost	9
Bezpečnostní pokyny	11

C

Chování v případě nebezpečí	13
Chybné použití	10
Čištění	27
Odvápnění	52
Čištění sanitárních nádob	25

D

Dávkování mycího prostředku	17
Definování pomocného textu chyby	48
Demontáž a likvidace	52
Denní čištění	51
Displej	16, 17
Držák nádob	16, 17, 18
SUH 1	18
SUH 2	18
Dvířka mycí komory	16, 17

E

Elektrické parametry	23
Elektromagnetická slučitelnost ...	13

F

Fóliová klávesnice	24
--------------------------	----

H

Hlášení	38
---------------	----

Hodnota A0

Předvolba	33
Tovární nastavení	33

I

Indikace chyby	25
Inspekční dvířka	16, 17

K

Kanistr	16, 17
Konvence zobrazení	6

L

Likvidace obalového materiálu	53
Likvidace vysloužilého zařízení ...	53

M

Membránová klávesnice	16, 17
Montáž	24
Mycí komora	16, 17

N

Následující Provozní údržba	50
Nastavení data a času	47
Nepoužívání	52
Nožní tlačítko	31

O

Obsah dodávky	5
Odvápnění	52
Odvzdušnění vedení	47
Okruh osob, činnosti	10
Okruh uživatelů	9
Oplach výlevky	18, 35
Oplachování mycí komory (volitelné vybavení)	36

Oplachování okraje	18
Otevření dveří	48
Ovládací fólie	24
Označení přístroje.....	5

P

Pokyny k návodu k obsluze	5
Ilustrace.....	7
Popis funkce	14
Popis produktu	14
Poruchy	37
Použití v souladu s účelem	9
Přehledové zobrazení	16
Přerušení programu	29
Prohlášení o shodě	8
Prostředí použití	9
Provoz/obsluha	24

R

Rutinní kontrola	51
------------------------	----

S

Servisní parametry	
zobrazení/změna.....	46
Snímač	31
Související dokumenty	5
Spínací hodiny	48

SUH 1	18
SUH 2	18

T

Technické údaje	21
TOPIC 10	16
TOPIC 20	16
TOPIC 40	17

U

Údržba a čištění	49
Určený účel	9
Uvedení do provozu	24
Uvedení mimo provoz	52

V

Validace procesu.....	50
Varianty	14
Volba čistícího programu.....	30
Volitelné možnosti	17
Vyměnit kanýstr.....	34
Vyvolání servisní úrovně	45

Z

Zadání kódu	32
Zrušení zajištění dveří.....	48

15 Poznámky

.....

.....

.....

.....

.....



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com