

## Краткая инструкция по эксплуатации



**Индикатор рабочего состояния**  
Индикация рабочего состояния, предупреждений, ошибок

**Стандартная программа ②**  
Чистка и дезинфекция загрязненных приспособлений для ухода

**Промывка краев**  
(для отдельной раковины)  
Промывка моечной камеры (опция)

**Индикатор**  
Отображение предупреждений или ошибок  
Проинформировать техническую службу  
Кнопка приема квитирует ошибку, отключает сигнал

**Программа интенсивной очистки ③**  
Чистка и дезинфекция сильно загрязненных приспособлений для ухода

**Короткая программа ①**  
Чистка и дезинфекция слегка загрязненных приспособлений для ухода (например, мочеиспускателей)

**Поле курсора**  
Кнопки ▲ ▼ для установки количества циклов программы, кнопки ◀ ▶ — см. подробную инструкцию по эксплуатации

Готово к работе

TOPIC

m MEIKO

### Выбор уровня дезинфекции (значения A<sub>0</sub>), опция






- Откройте дверцу моечной камеры при помощи светового датчика или педали напольного переключения.
- Установите очищаемый предмет в соответствующем положении в держатель емкостей.
- Выберите программу очистки в зависимости от степени загрязнения. Нажмите кнопку выбора программы. Дверца закроется, и программа запустится с предварительно настроенным установочным значением A<sub>0</sub> автоматически.



**4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ**  
Удерживайте кнопку выбора программы нажатой до тех пор, пока нужное значение A<sub>0</sub> не отобразится посередине в квадратных скобках [ ]. После этого сразу отпустите кнопку выбора программы. Дверца закроется, и программа запустится автоматически.



**Осторожно**

**Опасность защемления**  
Во время перемещения дверцы существует риск защемления пальцев, ладони или руки.

- Держитесь подальше от дверцы во время ее перемещения.
- Для устранения блокировки дверцы обратитесь к инженерно-техническому персоналу или в сервисную службу.