

MEIKO TopLine

Myjnie-dezynfektory



MEIKO Care



NIEZAWODNE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ W BRUDOWNIKACH

Zgodność z przepisami, należyta staranność, zdrowie i bezpieczeństwo personelu oraz regularne monitorowanie i dokumentowanie działań w zakresie kontroli zakażeń – to obowiązki placówek opieki zdrowotnej na całym świecie. Ich cel jest jasny: zapobieganie zakażeniom w szpitalach i domach opieki.

Dzięki kompetencjom i niezawodnej technologii mycia i dezynfekcji MEIKO jego osiągnięcie jest prostsze niż kiedykolwiek.

W ofercie mamy szereg dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie zarządzania higieną. Dzięki nim MEIKO daje swoim klientom pewność spełnienia ustawowych wymagań oraz obowiązków związanych z kontrolą zakażeń.

Od wydajnego przygotowywania naczyń sanitarnych do ponownego użycia aż po niezawodność i łatwą obsługę – urządzenia z serii *TopLine* dbają zarówno o bezpieczeństwo pacjentów, jak i personelu, oraz o ścisłe spełnianie wymogów normy EN ISO 15883.




KLUCZOWE CECHY:

- Technologia klasy premium – najwyższy poziom bezpieczeństwa higienicznego dla pacjentów
- Paroszczelny system – bezpieczne środowisko pracy dla personelu
- Maksymalna elastyczność – możliwość wyboru wartości A₀ (60, 600, 3000) oraz koncepcja wielofunkcyjnych uchwytów na różne naczynia sanitarne
- Bezpieczeństwo i higiena – suszenie filtrowanym powietrzem i chłodzenie z dezynfekcją systemową wszystkich przewodów, przez które przepływa woda
- MEIKO 360° – kompleksowe rozwiązanie obejmujące środki chemiczne, serwis, MEIKO Academy i planowanie

MEIKO TopLine – technologia

Jeden z najwydajniejszych modeli myjni-dezynfektorów MEIKO, wyposażony w zintegrowane chłodzenie, dezynfekcję systemową, teleskopową dyszę obrotową i wiele innych funkcji. Opracowany, by eliminować źródła zakażeń w brudownikach.

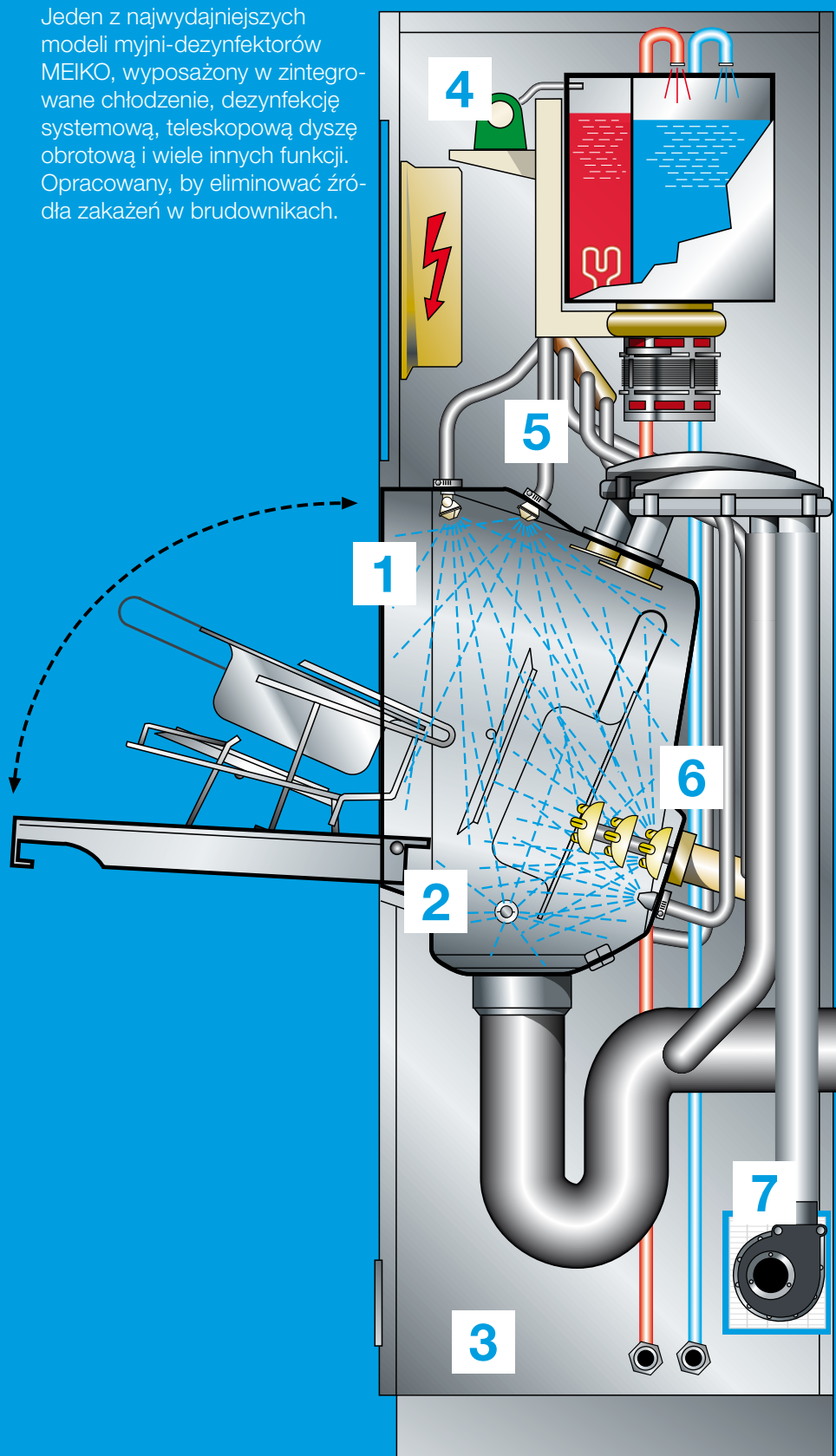



Steam
Stop

Thermo
Control

Chem
Code

Chem
Control

System
Disinfect+

Power
Clean+

Cool
Touch

KLUCZOWE CECHY:

1. Całkowicie paroszczelny system, kontrolujący i w bezpieczny sposób uwalniający parę

Korzyści

- Skutecznie zapobiega uwalnianiu drobnoustrojów
- Podnosi poziom bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy
- Ogranicza ryzyko uszkodzenia urządzenia i pomieszczenia spowodowane wilgocią

2. Dwa monitorujące się wzajemnie czujniki temperatury, dokonujące pomiarów dokładnie tam, gdzie ma to znaczenie – w najchłodniejszych punktach

Korzyści

- Monitoruje zgodność z wartościami A_0
- Zapewnia niezawodną skuteczność dezynfekcji
- Spełnia wymagania norm EN ISO 15883-1 i -3

3. Kodowanie przylączy nabłyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu za pomocą koloru i kształtu

Korzyści

- Skutecznie chroni przed nieprawidłowym podłączeniem
- Zapewnia jasne przebiegi pracy
- Upraszcza codzienną pracę

4. Monitorowanie objętości i działania dozowania nabłyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu za pomocą czujników

Korzyści

- Optymalizuje wykorzystanie nabłyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu
- Zapewnia niezawodność procesu zgodnie z normami EN ISO 15883-1 i -3
- Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz związanym z tym uszkodzeniom

5. Dezynfekcja systemowa komory mycia, rur, przez które przepływa woda, dysz i zbiornika wody w trakcie każdego cyklu

Korzyści

- Spełnia aktualne wymagania normy EN ISO 15883-1
- Skutecznie zapobiega skażeniu wtórnemu
- Zapewnia niezmienną skuteczność dezynfekcji dzięki równomiernemu rozprowadzaniu pary

6. System mycia z teleskopową dyszą obrotową i dodatkowymi, optymalnie rozmieszczonymi dyszami myjącymi

Korzyści

- Podnosi skuteczność czyszczenia od wewnątrz, nawet w przypadku stosowania różnych kształtów basenów sanitarnych
- Skutecznie usuwa drobnoustroje i aktywnie je spłukuje
- Skuteczny nawet przeciwko zarodnikom *C. difficile* (potwierdzone ekspertyzą) dzięki połączeniu działania czynników mechanicznych, temperatury i detergentu

7. Schładzanie filtrowanym powietrzem – wraz z efektem suszenia

Korzyści

- Chłodzi powietrzem pozbawionym drobnoustrojów dzięki zastosowaniu filtra HEPA
- Zapewnia, że naczynia sanitarne są od razu gotowe do ponownego użycia
- Ogranicza ryzyko skażenia wtórnego w porównaniu z chłodzeniem wodą

MEIKO TopLine – opcje rozszerzeń i ustawienia



AUTOMATYCZNIE OTWIERANE I ZAMYKANE DRZWI Z CZUJNIKIEM DŁONI NA PODCZEWIEŃ I/LUB PRZEŁĄCZNIKIEM NOŻNYM:

(opcja)

- Minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów
- Łatwiejsza obsługa przez personel

REGULOWANA WARTOŚĆ A_0 :

- Możliwość wyboru wartości A_0
- Możliwe ustawienia: A_0 60, A_0 600, A_0 3000
- Zależnie od rekomendacji zespołu ds. kontroli zakażeń, wymagań w zakresie higieny oraz bieżących potrzeb

WYBÓR WŁAŚCIWEJ WARTOŚCI A_0 W TRZECH KROKACH



Krok 1:

Wybieramy program mycia odpowiedni do umieszczonych naczyń sanitarnych oraz ich stopnia zanieczyszczenia – poprzez przytrzymanie przycisku.




Krok 2:

Na wyświetlaczu pokazują się dostępne wartości A_0 : A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000. Gdy żądana wartość pojawi się pośrodku, zwalniamy przycisk.



Krok 3:

Po zwolnieniu przycisku program automatycznie uruchamia się.

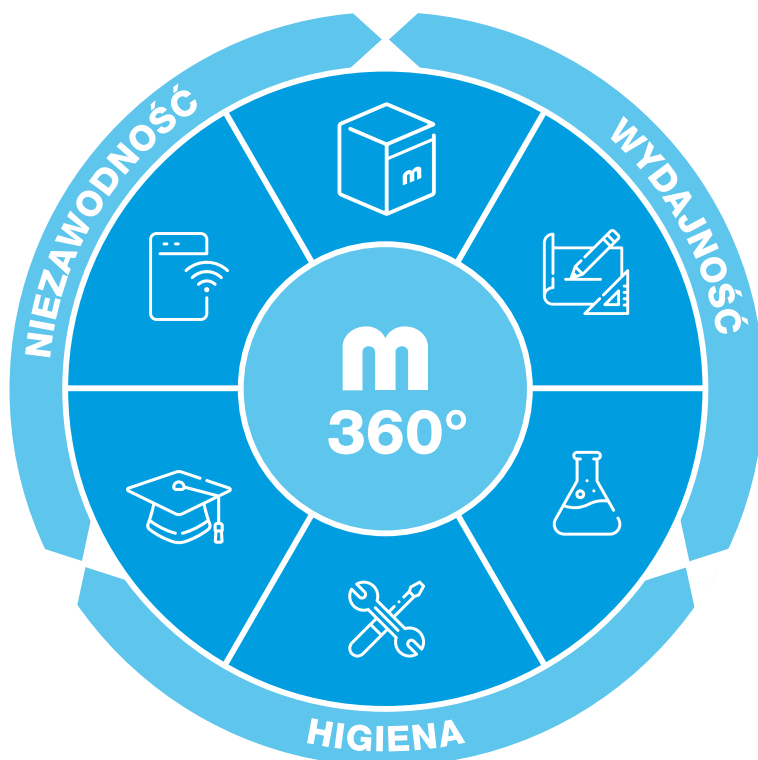

MEIKO 360°: KOMPLEKSOWA KONCEPCJA. PROFESJONALNA REALIZACJA.

Doskonała czystość nigdy nie jest dziełem przypadku. Wymaga ona idealnego zgrania wielu elementów. MEIKO 360° to połączenie wszystkich decydujących czynników w jedno kompleksowe rozwiązanie – od profesjonalnego planowania poprzez wysoce skuteczne technologie i idealnie dobrane środki chemiczne aż po niezawodny serwis, inteligentne opcje łączności oraz transfer wiedzy w MEIKO Academy.

Razem z naszymi klientami łączymy wiele elementów w jedno skuteczne, higieniczne, wydajne i niezawodne rozwiązanie.

ŚRODKI CHEMICZNE MEIKO

Uzyskanie doskonałych wyników mycia wymaga dokładnego dobrania do siebie technologii, detergentu (opcja) oraz nabłyszczacza. W przypadku zatwierdzonych przez MEIKO produktów Doyen jest to zawsze zagwarantowane.

Zalety środków chemicznych Doyen:

- Zatwierdzone do zastosowania w urządzeniach TopLine
- Optymalne, ograniczone do minimum dozowanie
- Potwierdzona zgodność materiałowa



MEIKO TopLine – wszystko z jednego źródła



PLANOWANIE MEIKO

Od osobnych urządzeń aż po zestawy do mycia i dezynfekcji – we współpracy z klientem planujemy kompletne brudowniki. Trudno o lepszy sposób na stworzenie wyjątkowo higienicznych i zoptymalizowanych pod kątem ergonomii stanowisk pracy, które w równym zakresie spełniają życzenia klientów, jak i wymogi ustawowe.


Co nas wyróżnia:

- Rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb – od remontów poprzez modernizacje aż po nowe projekty
- Bezpośrednie połączenia elementów
- Pozbawione szczelin powierzchnie, doskonale łączące wszystkie elementy
- Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej




MEIKO ACADEMY

Czy wiedzieli Państwo, że oferujemy również szkolenie techników wewnętrznych? MEIKO Academy zapewnia bezpośredni dostęp do ogromu wiedzy, zgromadzonej w ciągu wielu dziesięcioleci naszej działalności. W ramach szkoleń online i stacjonarnych przekazujemy wiedzę o najnowszych technologiach. Ich uzupełnienie stanowią istotne informacje na temat mikrobiologii, zapobiegania zakażeniom oraz aspektów prawnych.

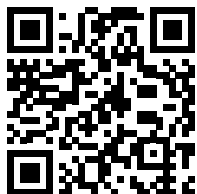

Więcej na temat programów szkoleniowych:
www.meiko-academy.com

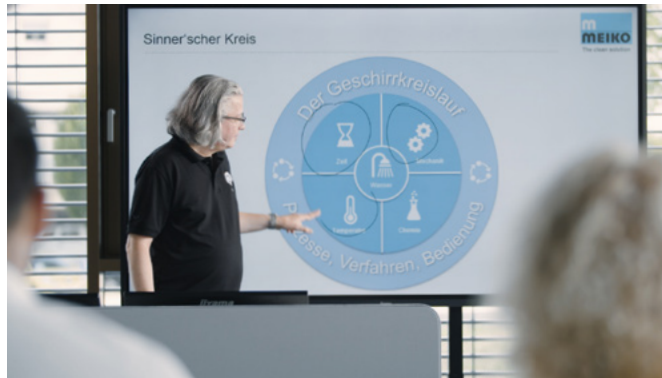

SERWIS MEIKO

Nasze zespoły serwisowe oferują krótkie czasy reakcji, szybki dojazd i zawsze mają w samochodzie dużą liczbę części zamiennych.

Zalety serwisu MEIKO:
całodobowa infolinia serwisowa, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
Autoryzowani technicy serwisu, przeszkoleni przez *MEIKO Academy*.



MEIKO TopLine – przegląd modeli

Osobne urządzenia

TopLine 10 – model naścienny (ze zlewem użytkowym lub bez)

Do montażu ściennego z prześwitem nad podłogą – umożliwiającą łatwe czyszczenie podłogi



Wymiary (w mm):

szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. (urządzenia) 1630



Wymiary (w mm):

szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. (urządzenia) 1630

TopLine 20 – model wolnostojący (ze zlewem użytkowym lub bez)

Do montażu podłogowego z cokołem, do szybkiej instalacji



Wymiary (w mm):

szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1730

Zdjęcia ukazują opcjonalne funkcje/akcesoria



Wymiary (w mm):

szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1730

TopLine 30 – model do montażu zlicowanego w ścianie (z przyłączem do WC lub bez)
Do montażu zlicowanego w ścianie w łazienkach szpitalnych

Wymiary (w mm):

Rama:

szer. 650, gł. 450, wys. 2210

Widocznie fronty:

szer. 530, wys. 1760



Wymiary (w mm):

Rama:

szer. 650, gł. 450, wys. 2210

Widocznie fronty:

szer. 530, wys. 1760

TopLine 20 – model nastawny (z umywalką lub bez)

Do montażu podłogowego z cokołem, zapewniający maksymalną powierzchnię roboczą i odstawczą



Wymiary (w mm):

Urządzenie:

szer. 900, gł. 600, wys. 900



Wymiary (w mm):

Urządzenie:

szer. 900, gł. 600, wys. 1000

Umywalka:

szer. 340, gł. 370, wys. 150

MEIKO TopLine – zestawy do mycia i dezynfekcji

Zestawy do mycia i dezynfekcji MEIKO z modelami wolnostojącymi lub nastawnymi są dostępne w różnych konfiguracjach, dostosowanych do indywidualnych wymagań oraz warunków przestrzennych w brudowniku. Zapewniają one funkcjonalną organizację i ułatwienie codziennej pracy.

SAN 14 B / MEIKO TopLine

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym i umywalką



Wymiary (mm): szer. 1400, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362



Wymiary (mm): szer. 1400, gł. 600, wys. 1000
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362 mm
Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150

SAN 19 B / MEIKO TopLine

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, umywalką i szafką (500 mm)

Wymiary (mm):	szer. 1900, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy:	wys. 700
Komora zlewu użytkowego:	Ø 362
Umywalka:	szer. 340, gł. 370, wys. 150
Szafki:	szer. 500



SAN 20 BW / MEIKO TopLine

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, umywalką, zlewem i szafką (600 mm)

Wymiary (mm):	szer. 2000, gł. 600, wys. 1000
Zlew użytkowy:	wys. 700
Komora zlewu użytkowego:	Ø 362
Umywalka:	szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zlew:	szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki:	szer. 600



SAN 24 W / MEIKO TopLine

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, umywalką i szafką (1000 mm)

Wymiary (mm):	szer. 2400, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy:	wys. 700
Komora zlewu użytkowego:	Ø 362
Umywalka:	szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki:	szer. 1000



SAN 29 BW / MEIKO TopLine

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, umywalką, zlewem i szafką (1500 mm)

Wymiary (mm):	szer. 2900, gł. 600, wys. 1000
Zlew użytkowy:	wys. 700
Komora zlewu użytkowego:	Ø 362
Umywalka:	szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zlew:	szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki:	szer. 1500



MEIKO TopLine – akcesoria

Jako uzupełnienie swojej technologii mycia i dezynfekcji MEIKO oferuje również kompleksową gamę osprzętu i wyposażenia. Zapewnia ona bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz umożliwia higieniczne przechowywanie naczyń sanitarnych. Opracowujemy także indywidualne rozwiązania dla naszych klientów!



Regały susząco-odstawcze*

- Na zdezynfekowane kaczki i baseny sanitarne oraz pojemniki, z regałem odstawczym i tacą ociekową
- Dostępne w szerokościach od 500 do 1400 mm



Półki ścienne*

- Z możliwością regulacji wysokości montażu półek
- Dostępne we wszystkich szerokościach (głębokość 350 mm)



Zamknięte szafki montowane na ścianę**

- Z drzwiami na zawiasach i jedną półką środkową
- Dostępne w szerokościach 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- Opcja: listwa oświetleniowa i lampa



Otwarte szafki montowane na ścianę

- Do otwartego przechowywania, z jedną półką środkową
- Dostępne w szerokościach 500/1000/1200 mm

* Zdjęcia ukazują opcjonalne funkcje/akcesoria

** Opcja: listwa oświetleniowa i lampa



Zestaw zmywalniczy*


- Szafki dolne, z szufladami i innymi elementami, do zestawów do mycia i dezynfekcji
- Dostępne w wielu szerokościach i wysokościach




Zlew użytkowy*

- Model standardowy dostępny z opcjonalnym splukiwaniem zlewu użytkowego
- Obsługiwany niezależnie od myjni-dezynfektora


MEIKO TopLine jako model wolnostojący

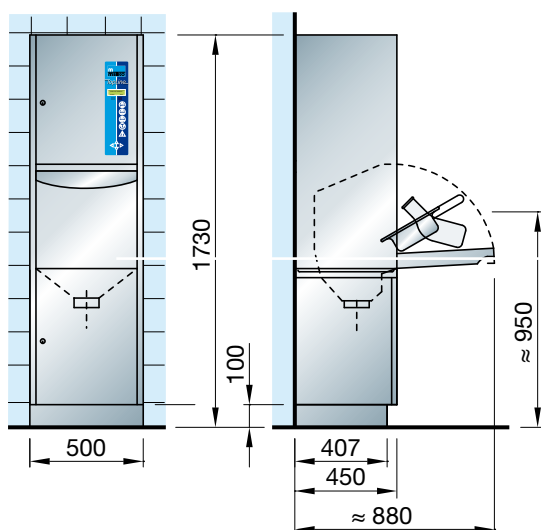

MEIKO TopLine jako mały zestaw do mycia i dezynfekcji

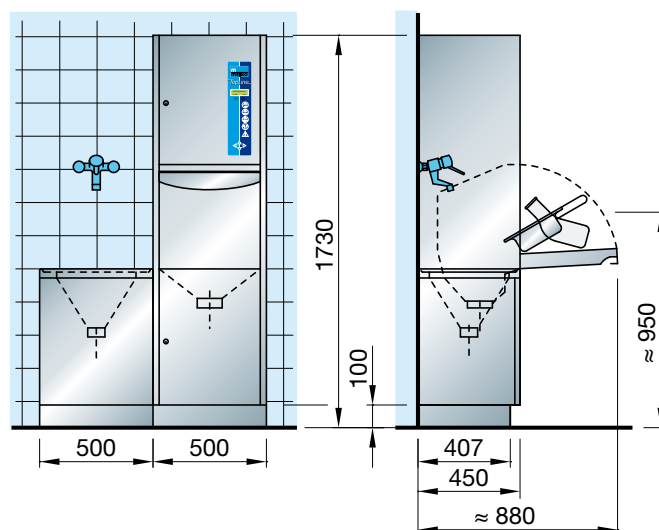

MEIKO TopLine jako model podblatowy

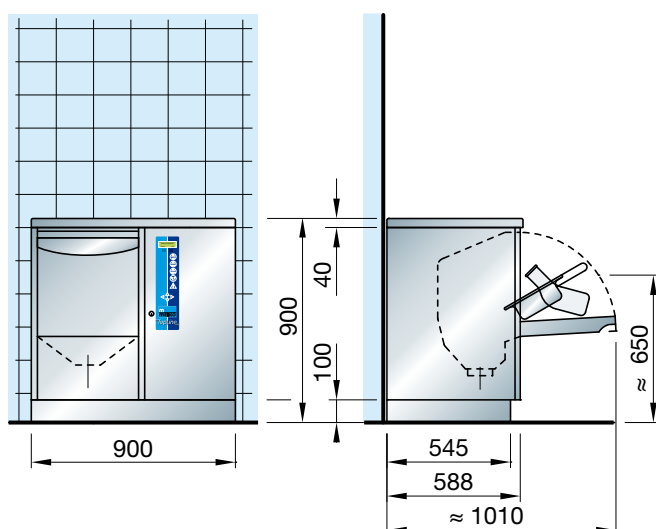

		TopLine	
		400 V	230 V
Łączna moc przyłączeniowa	kW	4,6	2,8
Przyłącze wody zasilającej, woda zimna		G ¾"	
Przyłącze wody zasilającej, woda gorąca 45-60°C		G ¾"	
Ciśnienie dynamiczne	bar	1-5	
Przepływ	l/min	18	
Odpyływ		DN 100	
Poziom hałasu	dB(A)	48,2	

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa, Polska
Tel. kom.: +48 731 889 961 · info@meiko.com.pl · www.meiko.com

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

