

MEIKO TopLine

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri



MEIKO Care



KİRLİ TEMİZLİK ODALARI İÇİN GÜVENİLİR HİJYEN YÖNETİMİ

Yasal uyumluluk, özen yükümlülüğü, personel sağlığı ve güvenliği ile enfeksiyon kontrol önlemlerinin sürekli denetimi ve dokümantasyonu dünyanın her yerinde modern bakım hizmetlerinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Burada hedef, hastanelerde ve bakımevlerinde enfeksiyon hastalıklarını önlemektir.

MEIKO bunun için ihtiyaç duyacağınız uzmanlığı ve güvenilir temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerini sunar.

İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, size özgü hijyen yönetimi çözümlerimizle tamamı karşılanır. Yasal gereklilikler ve enfeksiyon kontrolü şartnamelerini karşılamak ciddi bir iştir: MEIKO yanınızda olduğu sürece bunun doğru şekilde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz.

TopLine serisi, hasta bakım malzemelerinin etkin şekilde temizliğinden güvenilir ve kullanıcı dostu operasyona kadar EN ISO 15883 koşullarına bağlı olarak hem hastaların hem de personelin güvenliğini sağlayan etkileyici bir teknoloji sunar.




TEMEL ÖZELLİKLER:

- Birinci sınıf teknoloji - Hastaların güvenebileceği hijyen standartları
- Buhar sızdırmaz sistem - Personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı
- Maksimum esneklik - Serbestçe seçilebilen A₀ değerleri (60, 600, 3.000) ve farklı hasta bakım malzemelerine yönelik çok işlevli tutucu konsepti
- Güvenli ve hijyenik - Filtrelenmiş hava ile kurutma ve soğutma; tüm su hatlarının sistem dezenfeksiyonu
- MEIKO 360° - Kimyasallar, servis, MEIKO Academy ve planlama içeren komple çözüm

MEIKO TopLine - Teknoloji

MEIKO'nun en güçlü yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinden biri olarak entegre soğutma, sistem dezenfeksiyonu, teleskopik döner nozul ve çok daha fazlasını sunar. Kirli temizlik odasındaki salgınları kaynağında önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

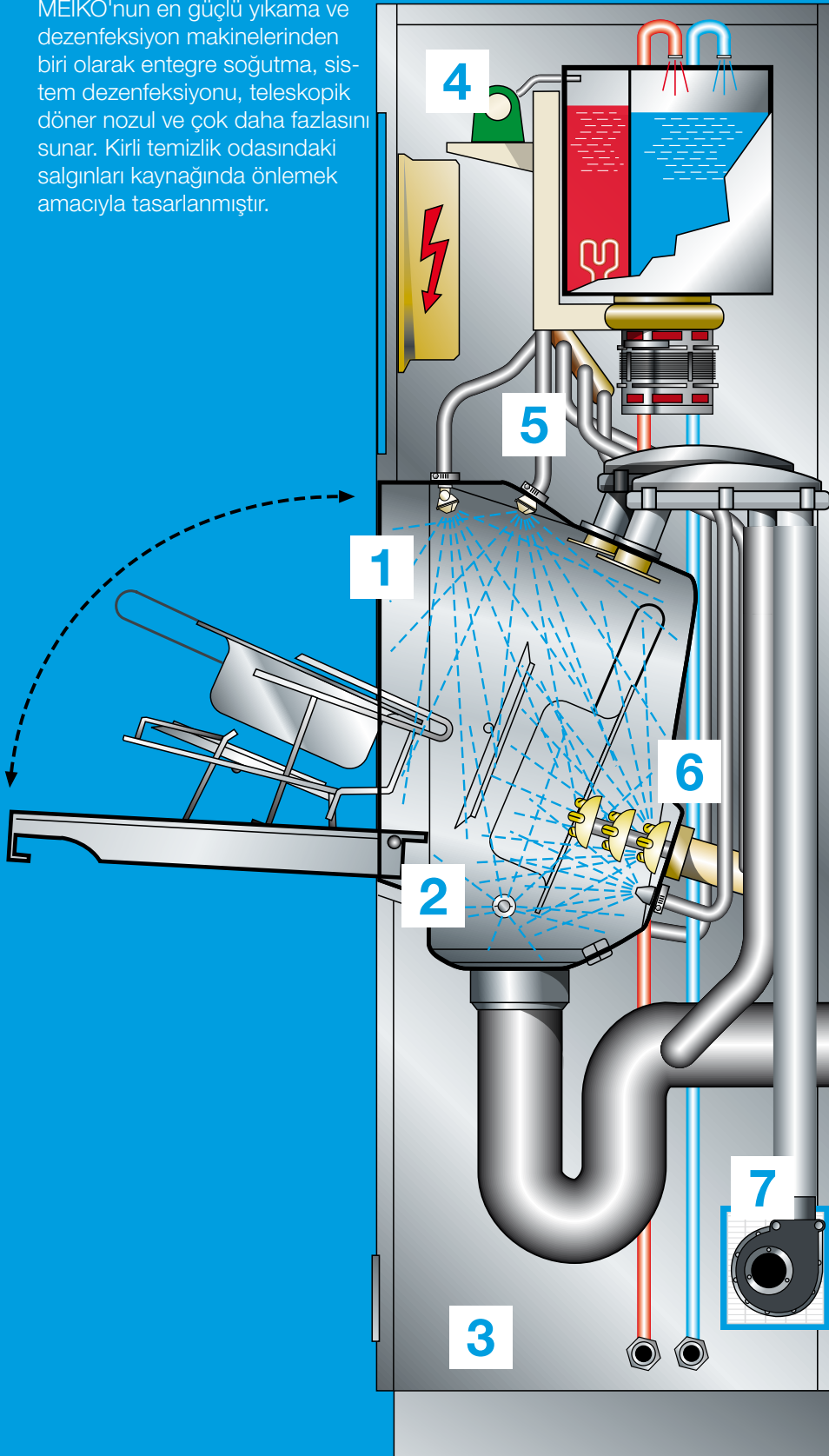

TEMEL ÖZELLİKLER:**1. Buharı güvenli şekilde kontrol edip salan tamamen buhar sızdırmaz sistem****Avantajlarınız**

- Mikropların yayılması etkin şekilde önlenir
- İş yeri güvenliğini ve hijyenini artırır
- Makine ve odada nem kaynaklı hasarlar azalır

**Steam
Stop****2. En kritik nokta, yani en soğuk noktada ölçümler yapan, birbirini karşılıklı denetleyen iki sıcaklık sensörü****Avantajlarınız**

- A0 değerlerine uygunluk durumu izlenir
- Güvenilir dezenfeksiyon performansı sağlar
- EN ISO 15883-1 ve -3 standartlarına uygundur

**Thermo
Control****3. Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan için renk ve şekil kodlu kimyasal bağlantıları****Avantajlarınız**

- Olası karışıklıkları güvenilir şekilde önler
- Net iş akışları sağlar
- Günlük operasyonu kolaylaştırır

**Chem
Code****4. Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan dozaj miktarının ve işlevinin sensör kontrollü izlenmesi****Avantajlarınız**

- Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan kullanımını optimize eder
- EN ISO 15883-1 ve -3 standartları uyarınca proses güvenilirliği sağlar
- Kireç oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan zararları önler

**Chem
Control****5. Her yıkamada yıkama haznesinin ve tüm su taşıyan hatların, nozulların ve su tankının sistem dezenfeksiyonu****Avantajlarınız**

- EN ISO 15883-1 uyarınca güncel standart gerekliliklerini karşılar
- Tekrar kontaminasyonu güvenilir bir şekilde önler
- Eşit buhar dağılımı sayesinde tutarlı bir dezenfeksiyon performansı sağlar

**System
Disinfect+****6. Teleskopik döner nozul ve optimum şekilde konumlanmış ilave yıkama nozullarına sahip temizleme sistemi****Avantajlarınız**

- Birçok farklı şekillerde olabilen sürgülerde iç temizliğin etkinliğini artırır
- Mikropları etkin şekilde yok eder ve aktif olarak uzaklaştırır
- Mekanik etki, sıcaklık ve deterjanın kombinasyonu sayesinde C. diff sporlarına karşı dahi etkilidir (uzman görüşüyle doğrulanmıştır)

**Power
Clean+****7. Filtrelenmiş hava ile tekrar soğutma – kurutma etkisi dahil****Avantajlarınız**

- HEPA filtrasyon sayesinde mikropsuz hava ile soğutur
- Hasta bakım malzemelerinin derhal kullanıma hazır olmasını sağlar
- Su ile soğutmaya göre tekrar kontaminasyon riskini düşürür

**Cool
Touch**

MEIKO TopLine – Makine opsiyonları ve ayarları



KIZILÖTESİ EL SENSÖRLÜ VE/VEYA AYAK ŞALTERLİ OTOMATİK KAPAK: (opsiyonel)

- Patojen yayılma riskini minimuma indirir
- Sağlık ve bakım tesislerinde daha kolay kullanım sağlar

AYARLANABİLİR A₀ DEĞERİ:

- A₀ değerinizi esnek bir şekilde seçin
- Mevcut değerler: A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3000
- Enfeksiyon kontrol ekibinizle koordinasyon halinde, temel hijyen amaçlı veya ihtiyaca göre ayarlanır

ÜÇ ADIMDA MÜKEMMEL A₀ DEĞERİ



Adım 1:

Temizlik programını, hasta bakım malzemelerinin türüne ve kirlilik derecesine göre seçin: Tuşu basılı tutun.




Adım 2:

Ekranında mevcut A₀ değerleri gösterilir: A₀ 60 / A₀ 600 / A₀ 3000. İstediğiniz değer ortada görüldüğünde tuşu bırakın.



Adım 3:

Tuşu bırakmanızla birlikte program otomatik olarak başlar.

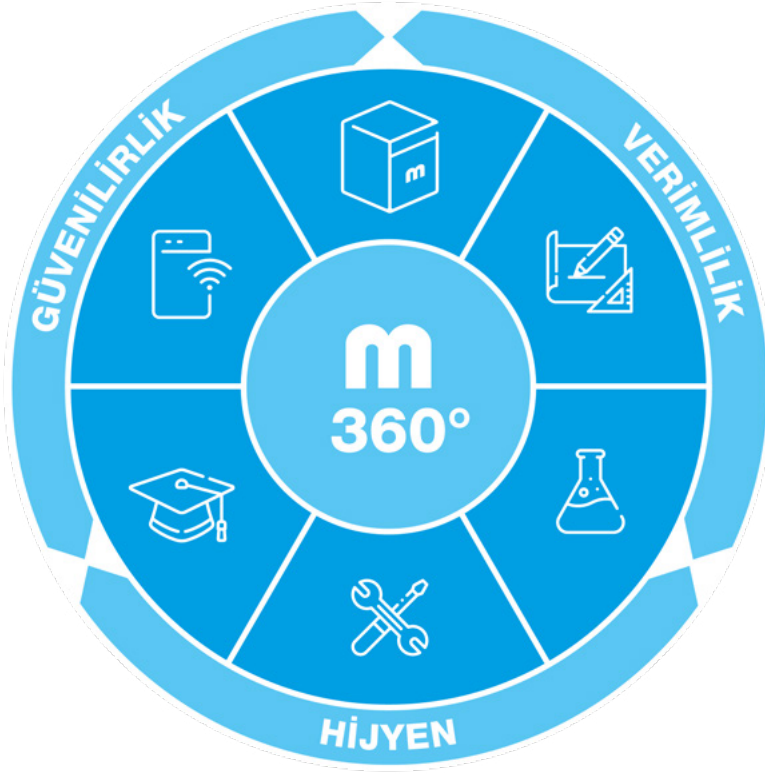

MEIKO 360°: BÜTÜNSEL TASARIM. UZMAN UYGULAMA.

Mükemmel temizlik asla tesadüf değildir. Tüm unsurların uyum içinde çalışmasının bir sonucudur. MEIKO 360°, uzman planlaması, yüksek performanslı teknoloji ve kusursuz uyum halindeki kimyasallardan, güvenilir servis, akıllı bağlantı imkanları ve MEIKO Academy ile bilgi transferine kadar, tüm kritik faktörleri tek bir entegre çözüm altında birleştirir.

Sizinle birlikte birçok farklı parçayı hijyenik, verimli ve güvenilir olan güçlü bir bütün haline getiririz.

MEIKO KİMYASALLARI

Mükemmel temizlik sonuçları için teknoloji, deterjan (opsiyonel) ve durulama ürünü birbiriyle uyumlu olmalıdır. MEIKO onaylı DOYEN ürünleri ile bu mümkündür.

Doyen kimyasallarının avantajları:

- TopLine makinelerde kullanım için onaylı
- Olabildiğince düşük tutulan optimum dozaj miktarı
- Test edilmiş malzeme uyumluluğu



MEIKO TopLine – Her şey tek kaynaktan




MEIKO PLANLAMA

İster tekli cihazlar ister kombine üniteler olsun, temizlik odanızın tamamını sizinle birlikte planlarız. Böylece müşterilerin beklentilerini ve yasal gereklilikleri eşit derecede karşılayan, sıra dışı düzeyde hijyenik ve ergonomik açıdan optimize edilmiş çalışma alanları sağlarız.

Bizi farklı kılan özelliklerimiz:

- Yenileme ve modernizasyon projeleri ile yeni projeler için işletmeye özel temiz çözümler
- Kaynaksız bağlantılar
- Tüm parçaları birbiriyle kusursuz bir şekilde birleştiren düz yüzeyler
- Tamamen paslanmaz çelik tasarım

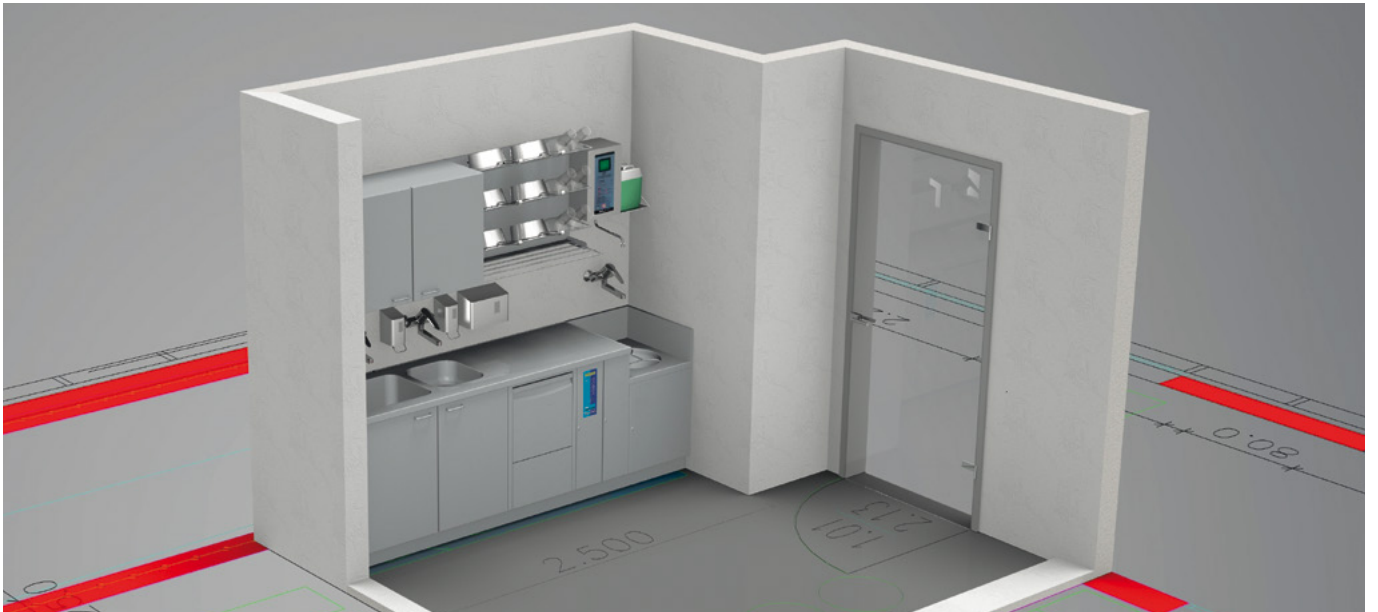

MEIKO ACADEMY

Kurum içi teknisyenlerinize de eğitim verdiğimiz biliyor muydunuz? MEIKO Academy ile uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz bilgi birikimine doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerimizle son teknolojilerden haberdar olursunuz. Kurslarımız mikrobiyoloji dünyasından ilgi çekici bilgilerin yanı sıra enfeksiyon önleme ve yasal konuları da kapsar.



Eğitim programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin:
www.meiko-academy.com



MEIKO SERVİS

Servis departmanımız hızlı müdahale süreleri, yaygın servis ağı ve yüksek yedek parça stoğu ile öne çıkar.

MEIKO Servisin sunduğu avantajlar: Kolay ulaşılabilir yaygın servis ağı, *MEIKO Academy* tarafından eğitilen yetkili servis teknisyenleri.



MEIKO TopLine – Modeller

Tekli cihazlar

TopLine 10 – Duvara monte model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Kolay zemin temizliği için yerden yüksek, duvara montaj



Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y (makine) 1630



Ebatlar (mm):
G 1000, D 450 veya 588, Y (makine) 1630

TopLine 20 – Ayaklı model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Hızlı kurulum için kaideli zemin montajı



Ebatlar (mm):
G 500, D 450 veya 588, Y 1730



Ebatlar (mm):
G 1000, D 450 veya 588, Y 1730

TopLine 30 – Duvara gömme model (WC bağlantılı veya bağlantısız)
Banyolarda duvara gömme montaj için

Ebatlar (mm):

Ana iskelet:

G 650, D 450, Y 2210

Görünür ön kısım:

G 530, Y 1760



Ebatlar (mm):

Ana iskelet:

G 650, D 450, Y 2210

Görünür ön kısım:

G 530, Y 1760

TopLine 40 – Tezgahaltı model (el yıkama evyeli veya evyesiz)
Çalışma ve depolama alanını genişletmek için kaideli zemin montajı



Ebatlar (mm):

Makine:

G 900, D 600, Y 900



Ebatlar (mm):

Makine:

G 900, D 600, Y 1000

El yıkama evyesi:

G 340, D 370, Y 150

MEIKO TopLine – Kombine üniteler

MEIKO kombine üniteler, ayaklı veya tezgahaltı modellerle birlikte farklı konfigürasyonlarda mevcut olup, ortam koşullarına ve gereksinimlere uyum sağlarlar. Bu ürünler maksimum işlevsellik sunarak günlük iş akışını kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

SAN 14 B / MEIKO TopLine

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi



Ebatlar (mm): G 1400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi: Y 700
Boşaltma evyesi: Ø 362



Ebatlar (mm): G 1400, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi: Y 700
Boşaltma evyesi: Ø 362 mm
El yıkama evyesi: G 340, D 370, Y 150

SAN 19 B / MEIKO TopLine

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi ve dolap (500 mm)

Ebatlar (mm):	G 1900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Dolap alanı:	G 500

**SAN 20 BW / MEIKO TopLine**

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (600 mm)

Ebatlar (mm):	G 2000, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 600

**SAN 24 W / MEIKO TopLine**

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi ve dolap (1000 mm)

Ebatlar (mm):	G 2400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1000

**SAN 29 BW / MEIKO TopLine**

Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (1500 mm)

Ebatlar (mm):	G 2900, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1500



MEIKO TopLine – Aksesuarlar

MEIKO, temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerinin yanı sıra kapsamlı bir aksesuar ve ekipman portföyü sunar. Bu ürünler, güvenli ve ergonomik çalışma koşullarını destekleyerek hasta bakım malzemelerinin hijyenik şekilde depolanmasını mümkün kılar. Ayrıca işletmenize özel çözümler geliştirmekten memnuniyet duyarız!



Kuruma ve depolama rafları*

- Dezenfekte edilen ördekler, sürgüler ve kaplar için ızgara taban raflı veya damlalıklı
- 500 ila 1400 mm genişliklerde mevcuttur



Duvar rafı*

- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Tüm genişliklerde mevcuttur (derinlik 350 mm)



Kapaklı duvar dolapları**

- Menteşeli kapaklı ve 1 ara raflı dolaplar
- 500/600/800/1000/1200/1500 mm genişliklerde mevcuttur
- Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma



Açık duvar dolapları

- Açık depolama için 1 ara raflı dolaplar
- 500/1000/1200 mm genişliklerde mevcuttur



Kombine yıkama ünitesi*

- Kombine üniteler için çekmeceli vs. alt dolaplar
- Farklı genişlik ve yüksekliklerde mevcuttur




Boşaltma evyesi ünitesi*

- Standart model, isteğe bağlı olarak entegre sifon sistemiyle donatılabilir.
- Yıkama ve dezenfeksiyon makinesinden bağımsız olarak kullanılabilir


* Fotoğraflar opsiyonel özellikler/aksesuarlar içermektedir

** Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma


MEIKO TopLine ayaklı model

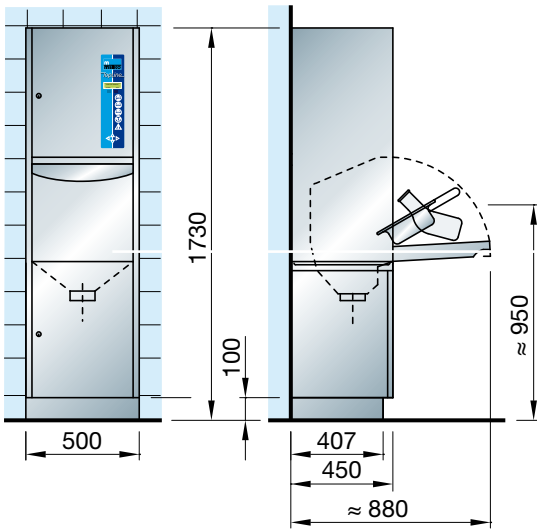

MEIKO TopLine küçük kombine ünite

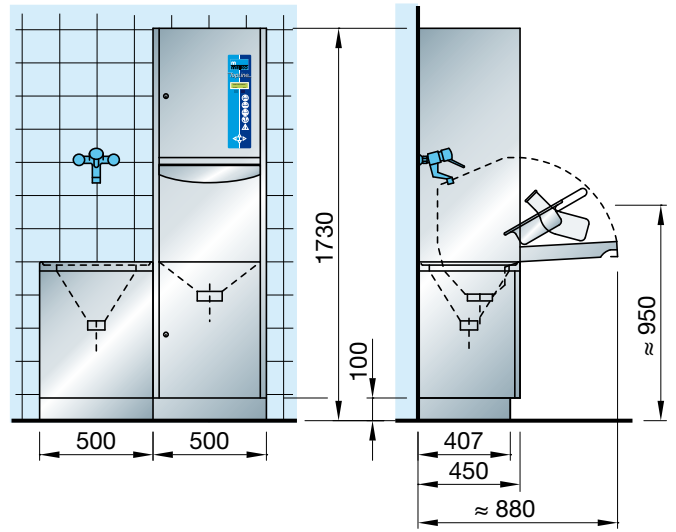

MEIKO TopLine tezgahaltı model

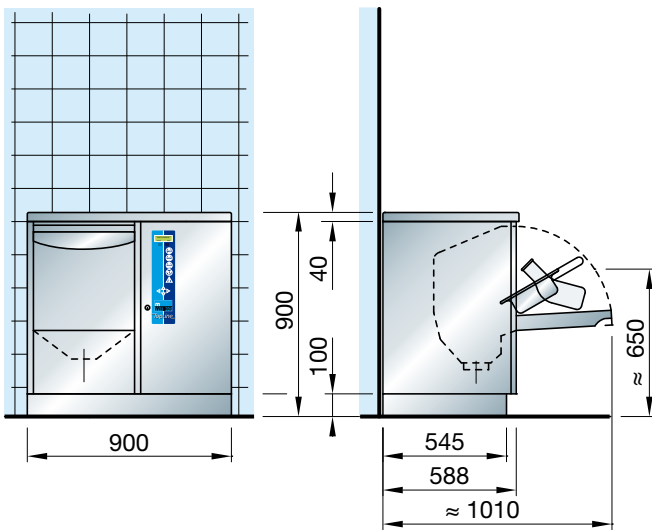

		TopLine	
		400 V	230 V
Toplam bağlantı gücü	kW	4,6	2,8
Besleme suyu bağlantısı, soğuk su		G ¾"	
Besleme suyu bağlantısı, sıcak su 45-60°C		G ¾"	
Akış basıncı	bar	1-5	
Akış hızı	l/dk	18	
Gider		DN 100	
Gürültü seviyesi	dB(A)	48,2	

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

