

TopClean 60

Multiwasher



MEIKO TopClean 60

Maschinelle Reinigung on Top



Einschubhöhe (in mm):
H 420
Maße (in mm):
H 820-850, B 600, T 600

Gesundheits- und Arbeitssicherheit betrifft Personal und Patienten gleichermaßen! Um einen hygienisch sicheren Schutz des Personals und der Patienten zu gewährleisten, fordern renommierte Hygieniker den regelmäßigen Einsatz von standardisierten und somit maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.

Der innovative „Multiwasher“ TopClean 60 bietet Ihnen die Möglichkeit, diese Hygieneanforderungen sowie Arbeitssicherheit und ökonomische Effizienz miteinander zuverlässig zu kombinieren.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Desinfektionsverfahren:

Thermische Desinfektion

für Top-Hygiene mit A_0 -Wert 60 Desinfektion für die meisten Praxisfälle

Chemo-thermische Desinfektion

speziell für die Desinfektion thermolabiler OP-Schuhe mit definierter Desinfektionschemie

Vorzüge im Überblick:	Thermische Desinfektion	Chemo-thermische Desinfektion
Top Hygiene speziell für thermolabile OP-Schuhe mit definierter Desinfektionschemie	–	•
Optimale Hygiene mit A_0 -Wert 60 Desinfektion für die meisten Praxisfälle	•	–
Schnelle Verfügbarkeit der Utensilien durch kurze Prozesszeiten	•	•
Standardisierte und somit sichere Hygieneprozesse	•	•
Kontaminationsfreie Arbeitsplätze durch maschinelle Reinigung	•	•
Kostensparende Reinigungs- und Desinfektionsprozesse durch ökonomischen Ressourceneinsatz von Strom, Wasser und Prozessmedien	•	•
Sicherheit und Arbeitsschutz durch automatische Türver-/entriegelung	•	•

Der professionelle Hygieneprozess

- Anwenderfreundliche und einfachste Bedienung durch klar strukturierte Folientastatur mit Display
- Flexible Hygienelösung durch drei Programme:
 - Kurzprogramm
 - Normalprogramm
 - Intensivprogramm
- Wasserwechselfunktion im Intensivprogramm für schwierige Anschmutzungen
- Sicherheit durch automatische Türver-/entriegelung
- Optimale Feinfiltrertechnik *AktivPlus* für ein hervorragendes Reinigungsergebnis
- Ideale Einschubhöhe von 420 mm – auch geeignet für Transportbehälter und Eimer mit einem Fassungsvermögen von 10 l
- Flexible Arbeitshöhe durch einstellbare Gerätehöhe, auch über verschiedene Sockelalternativen
- Einfache Integration in eine Pflegekombination
- Optimale Stauraumnutzung durch modulares Schrankprogramm mit viel Platz




Universal-Korb SK 500 mit optionalem Dorn zur optimalen Bestückung mit Reinigungsgut (Option)



Korb SK 500-1 für OP-Schuhe (Option)



Korb SKR 500-2 für Tablettts (Option)

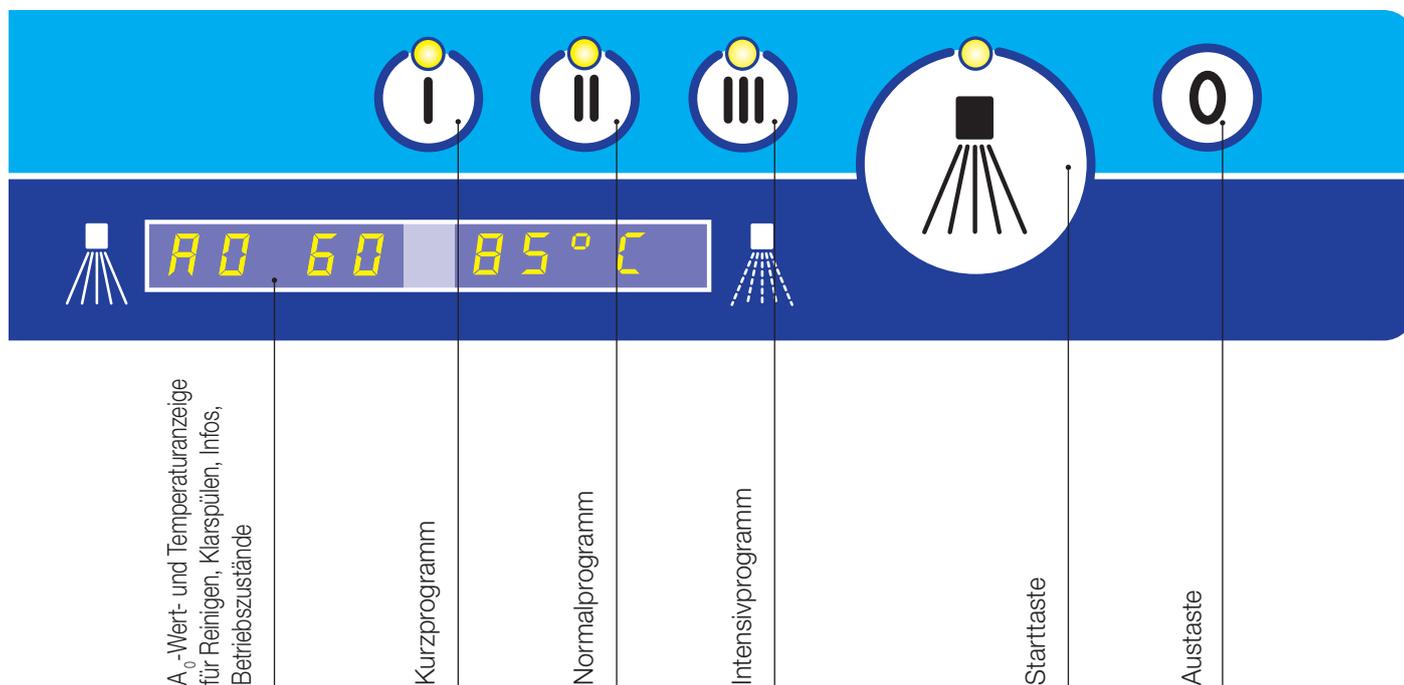

Bedienungskomfort, der den Fortschritt zeigt: Die elektronische Steuerung

Serienmäßig wird der MEIKO Multiwasher mit der modernen Vollelektronik *MIKE 2* ausgerüstet. Die drei Programme werden durch leichtes Antippen der jeweiligen Taste gewählt. Betriebsablauf und eventuelle Meldungen werden digital angezeigt. Leicht verständliche Symbole und klar angezeigte Temperaturen fürs Reinigen und Klarspülen machen die Bedienung und Kontrolle kinderleicht.

MIKE 2 – die zuverlässige und effiziente Elektronik mit integrierter Infrarot-Schnittstelle.

In Verbindung mit dem intelligenten *M-Commander W* lassen sich jetzt auf einfachstem Wege Daten lesen, definieren, verändern, über PC transferieren und online dem Werk bzw. Kundendienst zur sofortigen Bearbeitung mitteilen. Das verschafft dem Kunden bei einer Wartung deutliche Vorteile in puncto Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten.

Zubehör




MEIKO GiO-MODUL Umkehrosmose für beste Wasserqualität

Umkehrosmosemodul inklusive
Sicherheitsgruppe:

- Absperrschieber
- Feinfilter 10 µm mit Aktivkohle

Ihre Vorteile:

- Erstklassige Reinigungsergebnisse
- Längere Wartungsintervalle
- Erhöhte Sicherheit der Maschine
- Einsparung an Reiniger und Klarspüler

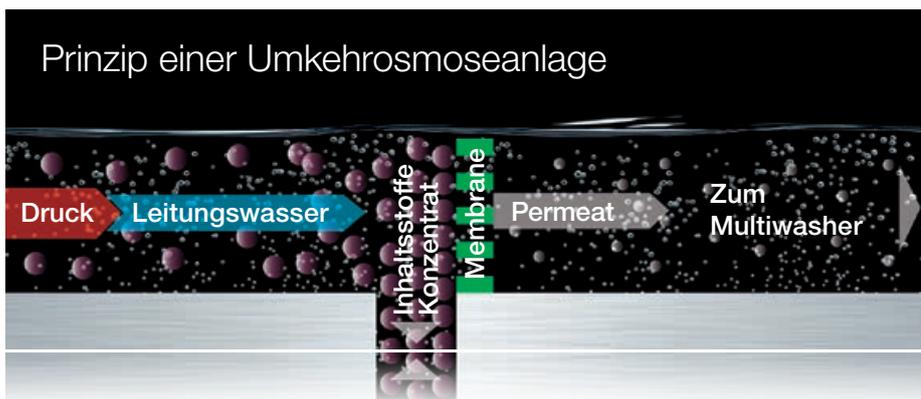


Speziell abgestimmt auf TopClean 60

- Reiniger RF 90 (Option):
zur intensiven Reinigung von allen
eingesetzten Utensilien
- Klarspüler GT500 (Option):
für optimale Reinigungsergebnisse
und eine rasche Trocknung der
Utensilien



Beispiel für die Integration einer TopClean 60 im Pflegebereich

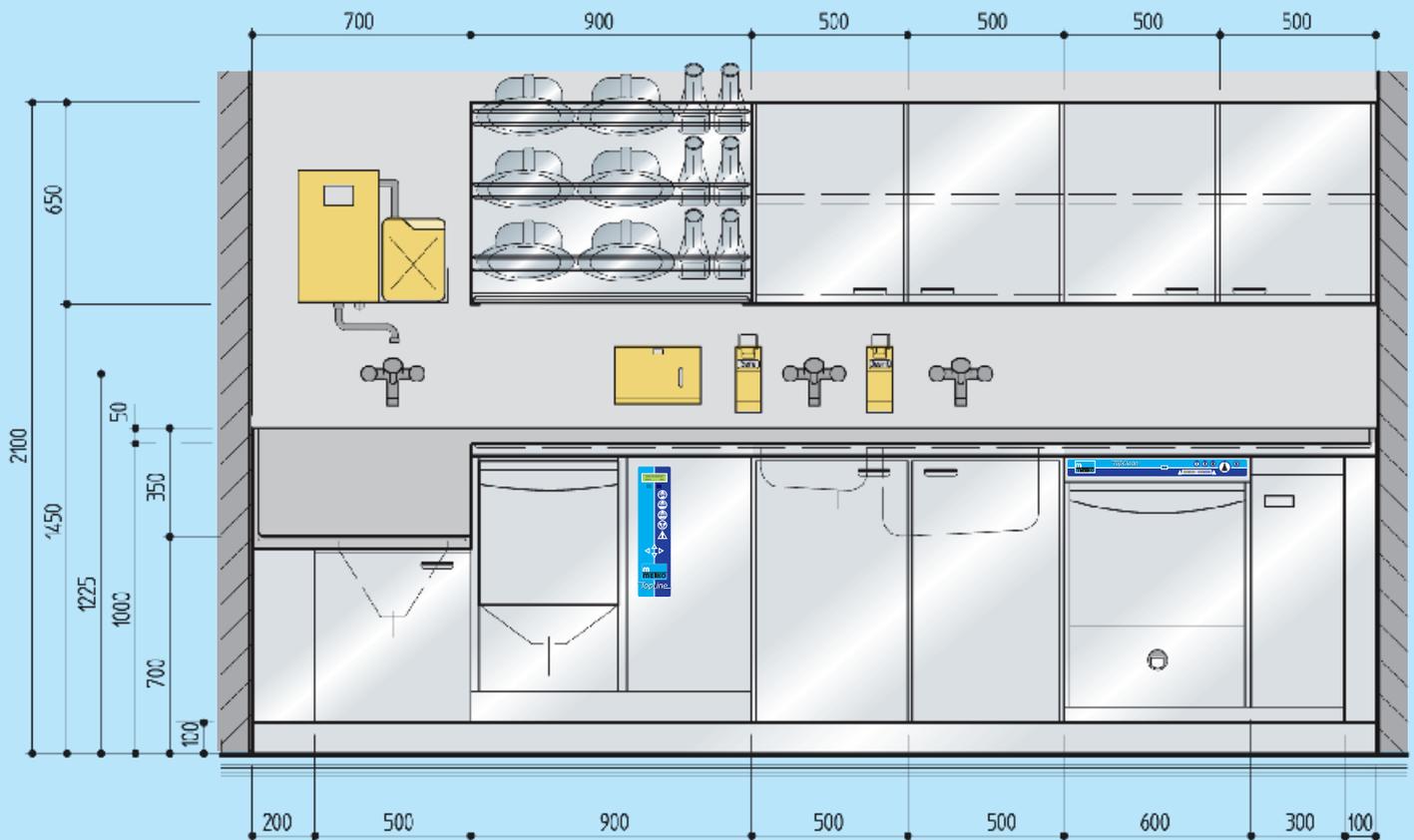



TopClean 60 mit AktivPlus

Die innovative MEIKO Laugenfeinfilter-Technik *AktivPlus* trägt zu einer bisher einmaligen Reinheit der Waschlauge

bei. Für ein erstklassiges Reinigungsergebnis sind in Verbindung mit der effektiven Klarspülung nur noch

2,6 Liter frisches Wasser je Spülgang erforderlich.

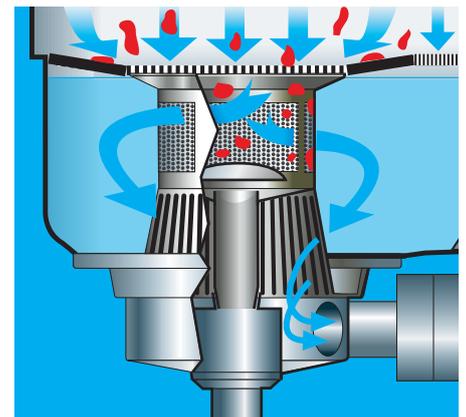

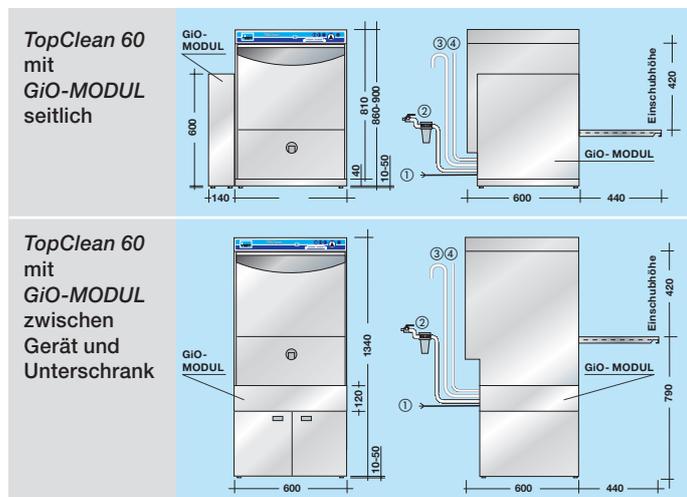

	TopClean 60	
Korbabmessungen	mm	500 x 500
Einschubhöhe	mm	420
Pumpenmotor	kW	0,55
Tankinhalt	ltr.	11
Klarspülung	ltr.	2,6
Tankheizung	kW	4
Einbauboiler bei 10 °C Zulauftemperatur	kW	7,5
Elektrischer Gesamtanschluss bei 10 °C Zulauftemperatur	kW	12,2

Elektro-Installation:

Elektroanschluss: ① Drehstrom 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Die Schaltung entspricht den Bestimmungen des VDE.

Wasser-Installation mit Aquastop:

Die Geräte können ohne Zwischenschaltung von Sicherheitsarmaturen an das Frischwassernetz angeschlossen werden. Mindestfließdruck 0,6 bar, Maximaldruck 5 bar. Die Installationsvorschrift EN 1717 ist zu beachten. Ablauf ¾". Bauseitiger Wandablauf max. 700 mm hoch ③. Länge der Anschlussleitungen ca. 1,4 m ab Gerät.

Wasser-Installation mit GIO-MODUL:

Kaltwasseranschluss (max. 35 °C), Mindestfließdruck 1 bar, Maximaldruck 5 bar. Leitwert Rohwasser < 1000 µS/cm. Gesamtwasserhärte max. 28 °dH. Inkl. Anschluss-Set ②: Absperrventil, Druckminderer, Filter 10 µm mit Aktivkohle. Für den DIN-konformen Betrieb ist eine Frischwasser-Netztrennung gemäß EN 1717 erforderlich (Option). Zulauflänge ca. 3 m. Anschluss-Set des Gerätes mit Panzerschlauch (ohne Aquastop). Konzentrat Ablauf ½" ④, Länge ca. 2 m. Permeat- und Elektroleitung zwischen Gerät und separat beigestelltem GIO-MODUL ca. 3 m.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO₂)



MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info.de@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

