

TopClean 60

Multiwasher



MEIKO TopClean 60

Limpieza a máquina de excelente calidad



Altura útil (en mm)

Altura 420

Dimensions (en mm)

Altura 820-850, anchura 600,
profundidad 600

La seguridad en el trabajo y la protección de la salud afectan al personal y a los pacientes de igual manera.

A fin de garantizar la protección del personal y de los pacientes en términos de higiene, muchos higienistas renombrados exigen la aplicación regular de procesos de limpieza y desinfección estandarizados y, por ende, mecánicos.

El innovador «Multi-Washer» *TopClean 60* le ofrece la posibilidad de combinar perfectamente estos requisitos de higiene y de seguridad laboral con eficiencia económica.

Seleccione su proceso de desinfección preferido:

Desinfección térmica

para una higiene perfecta con una desinfección con un valor A_0 de 60, para la mayoría de los casos

Desinfección termoquímica

ideal para la desinfección de zuecos de quirófano sensibles al calor, realizada con productos químicos de desinfección definidos

Las ventajas en síntesis	Desinfección térmica	Desinfección termoquímica
Perfecta higiene, sobre todo, para zuecos de quirófano sensibles al calor, realizada con productos químicos de desinfección definidos	—	•
Higiene óptima con una desinfección con un valor A_0 vde 60, para la mayoría de los casos	•	—
Rápida disponibilidad de los utensilios gracias a los tiempos de proceso cortos	•	•
Procesos de higiene estandarizados y, por lo tanto, seguros	•	•
Lugares de trabajo sin contaminación gracias a la limpieza realizada a máquina	•	•
Procesos de limpieza y desinfección de bajo coste debido al empleo económico de electricidad, de agua y de los medios necesarios para el proceso de lavado	•	•
Seguridad y protección laboral gracias al bloqueo y desbloqueo automáticos de la puerta	•	•

El proceso de higiene profesional

- Manejo sencillo y cómodo gracias a un teclado de membrana estructurado con claridad y con pantalla
- Solución flexible para la higiene gracias a tres programas:
 - Programa corto
 - Programa normal
 - Programa intensivo
- Función de cambio de agua en el programa intensivo para la suciedad difícil
- Seguridad gracias al bloqueo y desbloqueo automáticos de la puerta
- Óptima técnica de filtros finos «AktivPlus» para obtener excelentes resultados de lavado
- Altura útil ideal de 420 mm: adecuada también para contenedores de transporte y cubos con una capacidad de 10 litros
- Altura de trabajo flexible gracias a la altura regulable de la máquina, también mediante varios tipos de zócalos
- Integración sencilla en una combinación sanitaria
- Aprovechamiento óptimo del espacio para guardar objetos gracias a una gama modular de armarios con mucho espacio



Cesta universal SK 500 con una púa opcional para acomodar los objetos a lavar (opcional)




Cesta SK 500-1 para zuecos de quirófano (opcional)



Cesta SKR 500-2 para bandejas (opcional)

Mando completamente electrónico con tecnología de infrarrojos

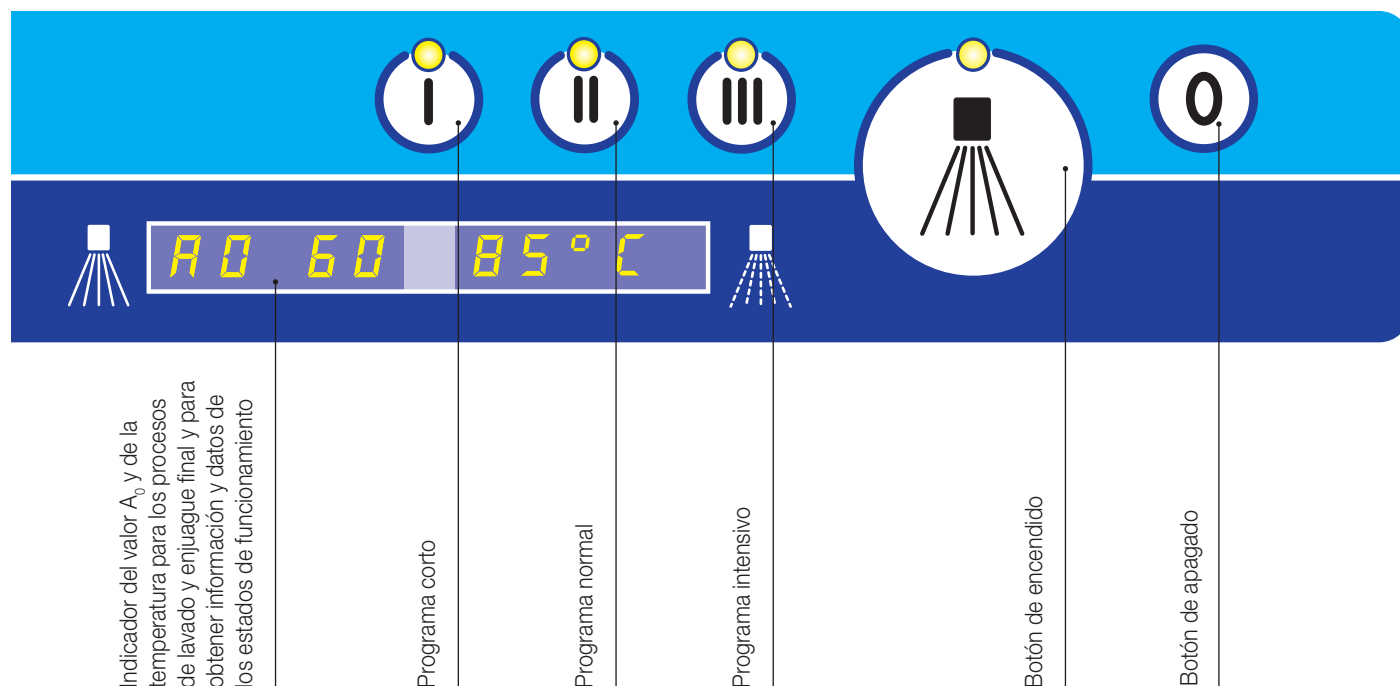

Comodidad de manejo que demuestra modernidad:

La unidad de control electrónica

Las máquinas de limpieza y desinfección de MEIKO vienen dotadas, de serie, con la moderna unidad de control electrónico *MIKE 2*. Cada uno de los tres programas se selecciona pulsando ligeramente la tecla correspondiente. El desarrollo del proceso y los posibles mensajes se visualizan de forma digital. Los símbolos fáciles de comprender y la indicación clara de las temperaturas de lavado y enjuague hacen que el manejo y el control sean sencillísimos.

MIKE 2 – electrónica de vanguardia con interfaz de infrarrojos integrada

En combinación con el inteligente *M-Commander W* ahora es posible leer, definir y modificar datos con toda facilidad, transferirlos mediante un PC y en línea a la fábrica o al servicio técnico de posventa para su procesamiento inmediato. En caso de trabajos de mantenimiento, el cliente se beneficia gracias a los tiempos muy breves y a los gastos reducidos de trabajo.

Accesorios



MEIKO GiO MODULE Ósmosis inversa para la mejor calidad del agua

Instalación de ósmosis inversa, con grupo de seguridad incluido:

- Válvula de cierre
- Filtro fino de 10 µm con carbón activo
- Válvula de ventilación de tubo/válvula de retención

Sus ventajas:

- Resultados de primera calidad en la limpieza
- Intervalos de mantenimiento más prolongados
- Mayor seguridad de la máquina
- Ahorro de detergente y abrillantador




Especialmente adaptados a TopClean 60

- Detergente **RF 90** (opcional): para la limpieza intensiva de recipientes de succión FMS
- Abrillantador **GT 500** (opcional): para resultados perfectos de lavado y un rápido secado de los utensilios



Ejemplo de la integración de una máquina TopClean 60 en el área de asistencia sanitaria


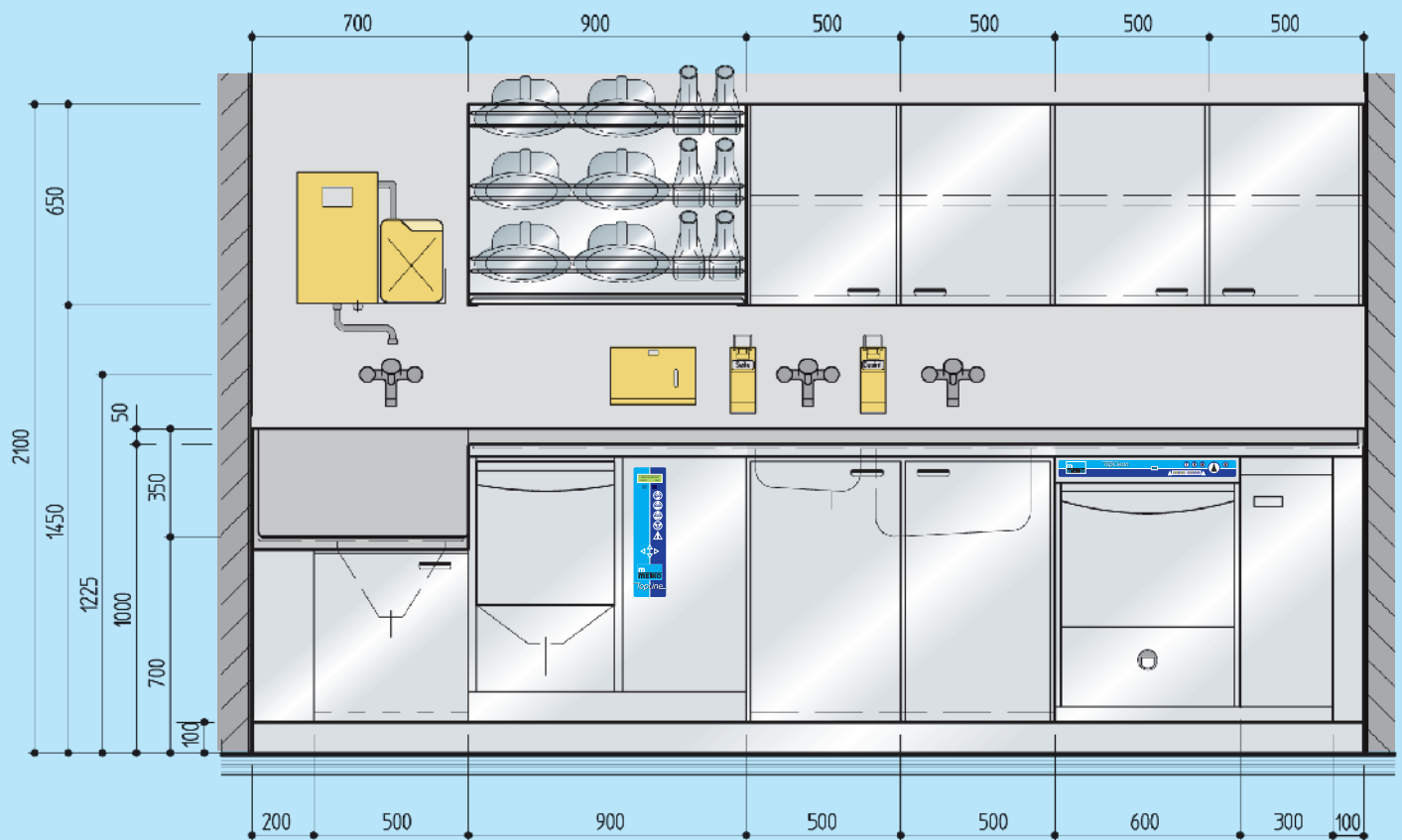



TopClean 60 con AktivPlus

La innovadora técnica de filtros finos para lejía *AktivPlus* de MEIKO contribuye a la obtención de una pureza de la

lejía, única hasta ahora. En combinación con el enjuague efectivo, únicamente se requieren 2,6 litros de agua limpia por

cada lavado para obtener un perfecto resultado en la limpieza.

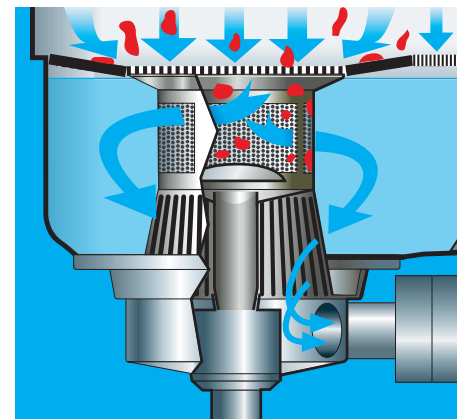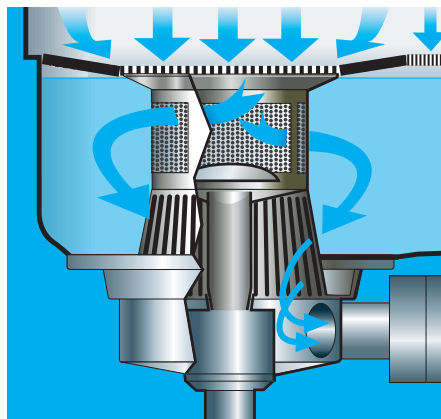

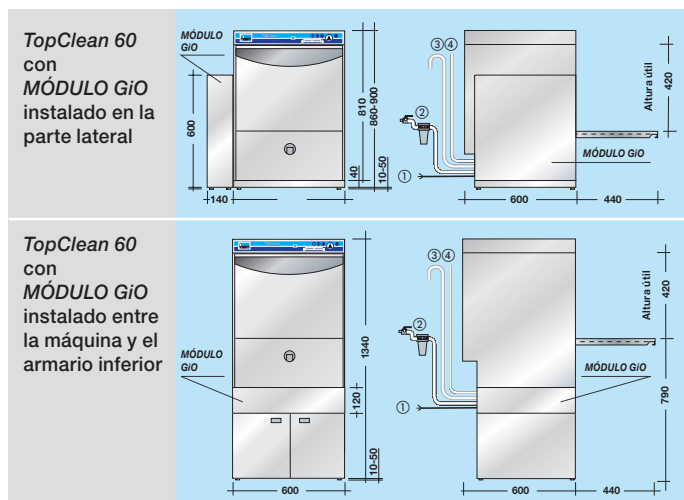

		TopClean 60
Dimensiones de la cesta	mm	500 x 500
Altura útil	mm	420
Motor de bomba	kW	0,55
Capacidad del depósito	litros	11
Aclarado	litros	2,6
Calefacción del depósito	kW	4
Calentador integrado en caso de una temperatura del agua fría de 10 °C	kW	7,5
Consumo total de corriente eléctrica en caso de una temperatura del agua fría de 10 °C	kW	12,2

Instalación eléctrica:

Conexión eléctrica: ① Corriente trifásica 3 NPE, 400 V, 50 Hz. El circuito cumple la normativa VDE.

Instalación de agua con Aqua-Stop:

Las máquinas se pueden conectar directamente a la red de suministro de agua sin necesidad de intercalar elementos de seguridad. Presión mínima de la corriente 0,6 bar, presión máxima 5 bar. Debe observarse la normativa de instalación EN 1717. Tubo de desagüe de 3/4".

Desagüe en la pared, puesto a disposición por el cliente, a una altura máx. de 700 mm ③. Longitud de las tuberías de conexión, aprox. 1,4 m a partir de la máquina.

Instalación de agua con MÓDULO GiO:

Toma de agua fría (max. 35 °C), presión mínima de la corriente 1 bar, presión máxima 5 bar. Conductancia del agua natural <1000 µS/cm. Dureza total del agua máx. 28 °dH.

Incl. juego de conexión ②: válvula de cierre, reductor de presión, filtro 10 µm con carbón activo, dispositivo de seguridad «HD» (válvula de retención y de ventilación) conforme a la norma EN 1717. Longitud de la tubería de entrada: aprox. 3 m. Juego de conexión de la máquina con tubo flexible blindado (sin Aqua-Stop). Desagüe de concentrado 1/2" ④, longitud aprox. 2 m. Tubo de permeato y cable eléctrico entre la máquina y el MÓDULO GiO opcional de aprox. 3 m.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH aprox. 0,18 mmol/l CaCO₃)



MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · Fax +34 93 3775233
www.meiko.es · info@meiko.es

MEIKO Clean Solutions Mexico S. de R.L. de C.V. · Av. Santa Fe No. 170,
Oficina 6-2-24K · Col. Santa Fe · 01376 Ciudad de México
Tfno. +52 55 41722551 · www.meiko-mexico.com · info@meiko-mexico.com

Fabricante:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tfno. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



770.032.01.05.21/ES/

Reservado el derecho a realizar modificaciones
condicionadas por mejoras técnicas