

TopLine


Appareils de nettoyage et de désinfection





Respect des lois et des normes, obligation de précaution, protection au travail, enregistrement et contrôle régulier des mesures d'hygiène, autant d'exigences imposées aujourd'hui au secteur des soins dans le monde entier dans un but évident : empêcher le développement de maladies infectieuses dans les hôpitaux et les établissements de soins.

Fort d'un savoir-faire professionnel et d'une technique fiable et innovante de nettoyage et de désinfection, MEIKO est un interlocuteur compétent à votre écoute : identification de votre besoin, conseil sur une planification optimale du local vidoir, préconisations sur la solution globale en tenant compte de vos contraintes techniques et budgétaires, installation-formation et SAV par des techniciens experts MEIKO.

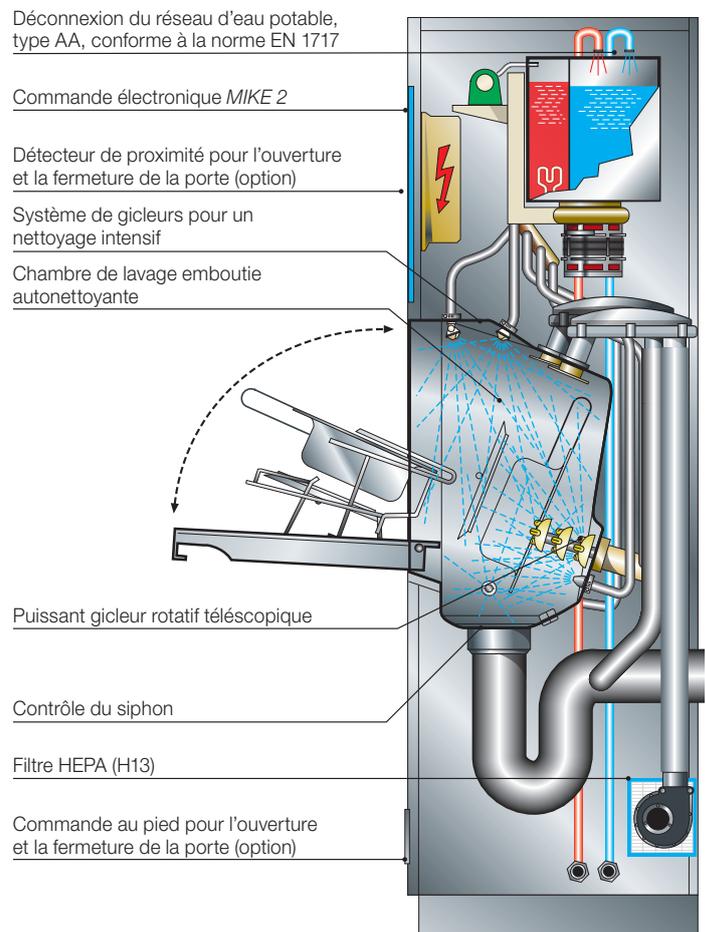

Avec MEIKO TopLine : halte aux infections, protection des patients et du personnel soignant

- Désinfection complète du système en début de programme
- Refroidissement et séchage des ustensiles de soins par air filtré HEPA
- Système totalement étanche à la vapeur. Absence de buée même à l'ouverture de la porte en fin de programme
- Certification EN ISO 15883 par un Institut d'hygiène indépendant, agréé par l'organisme national de protection de la santé et de contrôle des médicaments et produits médicaux
- Consommation d'énergie optimale pendant la désinfection, limitée à la quantité d'énergie nécessaire pour obtenir la valeur A_0
- Affichage de la valeur A_0 théorique et réelle
- Différentes valeurs A_0 disponibles : A_0 60 et plus
- Affichage d'informations en texte intégral 4 x 20 caractères avec mode économie d'énergie
- Ensemble de gicleurs pour nettoyage intensif, avec un gicleur rotatif télescopique unique en son genre pour un nettoyage ciblé de l'intérieur des ustensiles

Appareils individuels **MEIKO TopLine** – Solutions rapides et adaptables

Dans de nombreux établissements de soins, les locaux vidoirs ne répondent plus aux exigences ni aux dispositions légales en matière d'hygiène et de protection du personnel soignant. La gamme *TopLine* répond aux exigences de la norme ISO 15883-1-3, et peut être installée quelles que soient les contraintes techniques ou architecturales (modèle en pose libre sur socle, suspendu, sous paillasse ou encastré).

TopLine 10 – Modèles muraux suspendus au-dessus du sol (avec ou sans vidoir)



Lave-bassin simple à installer, peu encombrant et prêt à être raccordé.

Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H (appareil) 1630



Petit combiné de soins pratique composé du lave-bassin *TopLine 10* et d'un vidoir développé spécialement pour ce modèle.

Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H (appareil) 1630

TopLine 20 – Modèles verticaux en pose libre sur socle (avec ou sans vidoir)



Lave-bassin avec socle. Pose et raccordement faciles.
La solution idéale permettant l'utilisation des raccordements existants.

Dimensions (en mm) :
L 500, P 450 ou 588, H 1730



Petit combiné de soins pratique, facile à monter et polyvalent, composé du lave-bassin *TopLine 20* avec socle et d'un vidoir développé spécialement pour ce modèle.

Dimensions (en mm) :
L 1000, P 450 ou 588, H 1730

Lave-bassins **MEIKO TopLine** – Hygiène garantie et adaptable à chaque local de travail

TopLine 30 – Modèles à encastrement mural



Lave-bassin *TopLine 30* pour le cabinet de toilette de la chambre du malade, par ex. dans un service d'isolement. Avec cadre de montage.

Dimensions (en mm) :
Châssis de réception :
L 650, P 450, H 2210
Faces visibles :
L 530, H 1760



Lave-bassin *TopLine 30* avec raccordement au WC pour le cabinet de toilette de la chambre du malade, par ex. dans un service d'isolement. Avec cadre de montage, tuyauterie complète et raccords centralisés pour les types de WC les plus courants.

Dimensions (en mm) :
Châssis de réception :
L 650, P 450, H 2210
Faces visibles :
L 530, H 1760

TopLine 40 – Modèles pratiques avec plan de travail



Le lave-bassin *TopLine 40* se combine parfaitement avec les placards existants. L'appareil est doté d'un grand plan de travail et de rangement d'un seul tenant. Bords relevés disponibles en option.

Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 900



Le lave-bassin *TopLine 40* avec lavabo intégré et plan de pose est un petit combiné pratique et polyvalent. Bords relevés disponibles en option.

Dimensions (en mm) :
Appareil :
L 900, P 600, H 1000
Lavabo :
L 340, P 370, H 150

Combinés de soins **MEIKO TopLine** – L'hygiène à toute épreuve

Une hygiène sur mesure. Nous aménageons avec vous un local vidoir ergonomique, répondant aux plus hautes exigences de rentabilité, d'optimisation des tâches, de sécurité du travail et d'hygiène. Pour respecter les spécificités de votre emplacement, nous vous proposons une solution d'hygiène personnalisée et aux normes.

SAN 14 – TopLine 40 avec vidoir ou avec vidoir et lavabo



Combiné de soins avec plan de travail et de pose, plaque anti-éclaboussures, vidoir et bords relevés.

Dimensions (en mm) :
L 1400, P 600, H 900
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362



Combiné de soins compact *SAN 14 B* adapté aux besoins du local vidoir côté sale. Avec plan de travail et de pose, plaque anti-éclaboussures, vidoir, lave-mains et bords relevés.

Dimensions (en mm) :
L 1400, P 600, H 1000
Vidoir :
H 700
Cuvette du vidoir :
Ø 362
Lavabo :
L 340, P 370, H 150

SAN 19 B – TopLine 40 avec vidoir, lavabo et placard

Combiné de soins avec grand plan de travail et placard de 500 mm. Avec plan de travail et de pose, plaque anti-éclaboussures, vidoir et bords relevés.

Dimensions (en mm) :
L 1900, P 600, H 900

Vidoir :
H 700

Cuvette du vidoir :
Ø 362

Lavabo :
L 340, P 370, H 150

Placard
L 500



SAN 20 BW – TopLine 40 avec vidoir, lavabo, évier et placard

Combiné de soins avec plan de pose et placard de 600 mm. Avec plan de travail et de pose, plaque anti-éclaboussures, vidoir et bords relevés.

Dimensions (en mm) :
L 2000, P 600, H 1000

Vidoir :
H 700

Cuvette du vidoir :
Ø 362

Lavabo :
L 340, P 370, H 150

Évier :
L 500, P 400, H 300

Placard :
L 600



Combinés de soins **MEIKO TopLine** – L'hygiène à toute épreuve

SAN 24 W – TopLine 40 avec vidoir, évier, plan de travail et placard de 1000 mm

Un combiné de soins équipé d'un grand placard de 1000 mm de large.

Dimensions (en mm) :

L 2400, P 600, H 900

Vidoir :

H 700

Cuvette du vidoir :

Ø 362

Évier :

L 500, P 400, H 300

Placard :

L 1000



SAN 29 BW – TopLine 40 avec vidoir, lavabo, évier et placard de 1500 mm

Grand combiné de soins idéalement conçu réunissant
toutes les fonctions techniques de nettoyage.

Agencement ergonomique du vidoir et lavabo, et plan
de travail spacieux,

Dimensions (en mm) :

L 2900, P 600, H 900

Vidoir :

H 700

Cuvette du vidoir :

Ø 362

Lavabo :

L 340, P 370, H 150

Évier :

L 500, P 400, H 300

Placard :

L 1500




Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu'en option.

Confort et hygiène au plus haut niveau pour l'utilisateur associés simultanément à une protection maximale des patients. C'est ce que garantit le modèle *TopLine* avec ouverture et fermeture automatiques de la porte, sans contact, par détecteur infrarouge, et, sur demande, avec démarrage automatique du programme. L'arrêt de sécurité permet de protéger l'utilisateur. Une commande à pied faisant office d'unité de commande supplémentaire, est disponible en option.

TopLine 20 et **TopLine 40** – Ouverture et fermeture mains libres ou avec la commande à pied



Modèle vertical en pose libre sur socle *TopLine 20* et modèle avec plan de travail *TopLine 40* avec ouverture automatique de la porte (en option) et commande à pied (en option).

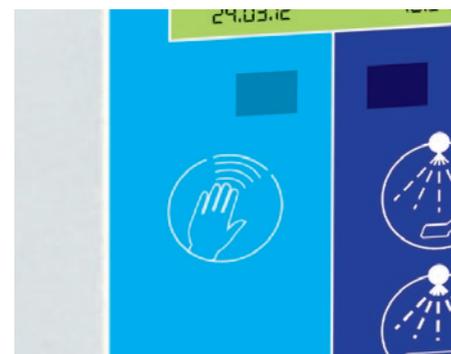

Ouverture et fermeture de la porte de l'appareil par un détecteur de proximité (en option).



Commande à pied pour l'ouverture et fermeture de la porte de l'appareil (en option).

MEIKO propose une vaste gamme d'ameublement et d'accessoires assurant ergonomie et sécurité du travail, ainsi qu'un stockage de vos ustensiles de soins dans le respect de l'hygiène. Voici 6 exemples répondant à des besoins pratiques courants. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoins spécifiques. Nous vous accompagnons dans la mise au point du système adapté à vos besoins.



Étagères de rangement et d'égouttement*
pour urinaux, bassins et récipients désinfectés. Avec grille de rangement ou cuvette d'égouttement. Largeurs disponibles : de 500 à 1400 mm.



Placards muraux fermés**
Placard avec portes battantes et 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 1500 mm.



Étagère murale*
Étagère avec tablettes réglables en hauteur, disponible dans toutes les largeurs (profondeur 350 mm).



Placard mural ouvert
Placard sans porte, avec 1 tablette intermédiaire. Largeurs disponibles : 500 mm, 1000 mm et 1200 mm.



Combiné de lavage*
Placard bas avec tiroirs pour combinés de soins. Disponible dans différentes largeurs et hauteurs.



Vidoir*
Modèle standard avec chasse d'eau intégrée en option. Commande indépendante de celle du lave-bassin.

* Certains accessoires visibles sur les photos ne sont disponibles qu'en option.


** En option : cache-lumière et ampoules

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · Fax +33 1 64617568
www.meiko.fr · contact@meiko.fr

MEIKO BVBA · Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, Belgique
Tél. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150281
www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

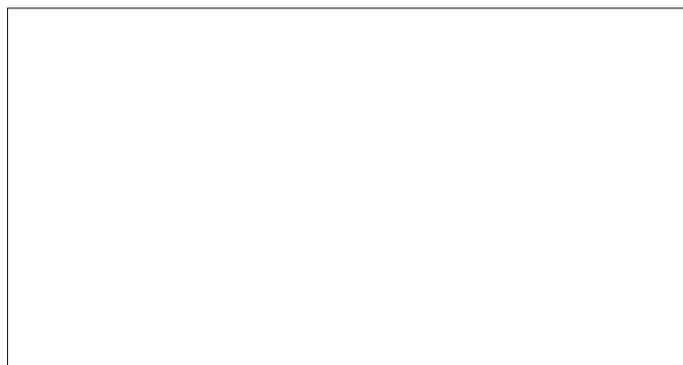

720.063.01.09.20/FR/

Sous réserve de modifications des spécifications dans le cadre du processus d'optimisation des produits.