

Kurzgebrauchsanweisung

Betriebsanzeige
Anzeige für Betrieb, Warnungen, Fehler

Randspülung
(für separaten Ausguss) Option
Waschkammerspülung

Anzeige
für Warnung oder Fehler
Haustechniker verständigen
Übernahmetaste
quittiert Fehler / schaltet Signal ab

Infrarotschnittstelle

Kurzprogramm ①

Normalprogramm ②

Intensivprogramm ③

Cursorfeld
Tasten ▲ ▼ für Anzahl Programmabläufe,
Tasten ◀ ▶ siehe Gebrauchsanweisung

Öffnen/Schließen der Tür nur mit geschlossenem WC-Deckel möglich!

1. Waschkammertür durch Tastendruck öffnen.

2. Reinigungsgut in der vorgesehenen Position im Gefäßhalter einsetzen.

3. Programm entsprechend Verschmutzung wählen, Tastendruck startet Reinigung. Tür schließt automatisch.

4. Bei Programmende, Waschkammertür durch Tastendruck öffnen.

! Vorsicht

Einklemmgefahr
Türbewegung kann Finger, Hand und Arm quetschen.

- Kein Eingreifen bei Türbewegung.
- Haustechniker oder MEIKO-Service zum Entfernen der Türblockade rufen.