

Rövid használati útmutató

Működésjelző
Működés, figyelmeztetések hibák kijelzése

Peremöblítés
(külön kiöntőnél) opció mosogatókamra öblítése

Kijelző
a figyelmeztetések vagy hibák számára
Értesítse a műszaki szolgálatot
Jóváhagyó gomb
nyugtázza a hibát/lekapcsolja a jelet

Infravörös interfész

Rövid program ①

Normál program ②

Intenzív program ③

Kurzormező
▲ ▼ gombok a programfutások számához,
◀ ▶ gombok: lásd a használati útmutatóban

Az ajtó nyitása/zárása csak lehajtott WC-fedél mellett lehetséges!

1. Gombnyomással nyissa fel a mosogatókamra ajtaját.

2. A tisztítandó tárgyat az előírt helyzetben helyezze az edénytartóba.

3. A szennyeződésnek megfelelően válassza ki a programot, majd a gomb megnyomásával indítsa el a tisztítást. Az ajtó automatikusan bezáródik.

4. A program befejeződésekor gombnyomással nyissa fel a mosogatókamra ajtaját.

Vigyázat!

Becsípődés veszélye
Az ajtó mozgása becsípheti az ujját, a kezét vagy a karját.

- Az ajtó mozgásakor ne nyúljon a készülékbe.
- Az ajtó akadásának elhárítására hívja a háztechnikust vagy a MEIKO szervizt.