

### Betriebsanzeige

Anzeige für Betrieb,  
Warnungen, Fehler

### Intensivprogramm ③

Reinigung und Desinfektion,  
von stark verschmutztem  
Pfleageschirr

### Normalprogramm ②

Reinigung und Desinfektion,  
von verschmutztem  
Pfleageschirr

### Kurzprogramm ①

Reinigung und Desinfektion,  
von leicht verschmutztem  
Pfleageschirr.  
(z. B. Urinflaschen)

### Randspülung

(für separaten Ausguss)  
Option  
Waschkammerspülung

### Cursorfeld

Tasten ▲ ▼ für Anzahl  
Programmabläufe,  
Tasten ◀ ▶ siehe  
ausführliche  
Gebrauchsanweisung


### Anzeige

für Warnung oder Fehler  
Technischen Dienst verständigen  
Übernahmetaste  
quittiert Fehler  
schaltet Signal ab

## Desinfektionsleistung (A<sub>0</sub>-Werte) auswählen (Option)



1. Reinigungsgut in der vorgesehenen Position im Gefäßhalter einsetzen und die Waschkammertür schließen.

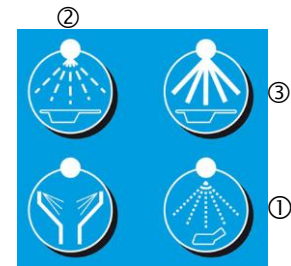

2. Reinigungsprogramm entsprechend der Verschmutzung wählen. Die Programmtaste drücken. Das Programm startet mit dem voreingestellten A<sub>0</sub>-Wert automatisch.



### 3. ALTERNATIV

Programmtaste gedrückt halten bis der geforderte A<sub>0</sub>-Wert mittig in der [ ] angezeigt wird. Dann die Programmtaste sofort loslassen. Das Programm startet automatisch.