


Üzemállapot-jelzés

Működésjelző
figyelmeztetések, hibák

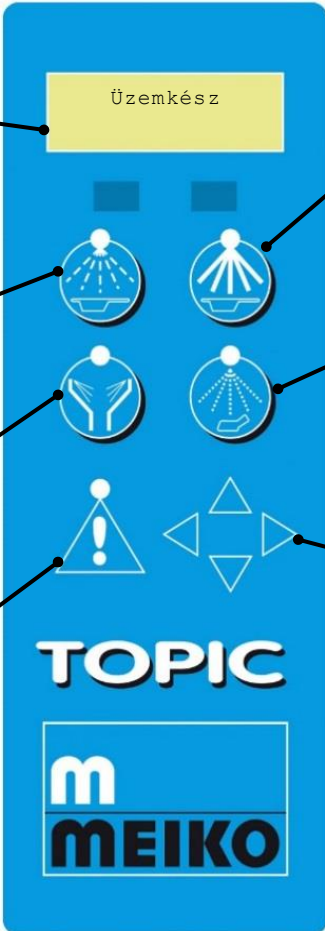

Üzemkész

Intenzív program ③

Erősen szennyezett
ápolóedények
tisztítása és csíramentesítése

Normál program ②

Szennyezett ápolóedények
tisztítása és
csíramentesítése

Rövid program ①

Enyhén szennyezett ápolási
edények
tisztítása és csíramentesítése.
(pl. vizezőkacsák)

Peremöblítés

(különálló kimenethez)
Mosogatókamra öblítés
opció

Kurzormező


▲ ▼ gombok a
programfolyamatok
számához,
◀ ▶ gombok lásd a részletes
használati útmutatót

Kijelzés

figyelmeztetés és hibák esetén
értesítse a műszaki szolgálatot
Jóváhagyó gomb
nyugtázza a hibát lekapcsolja a jelet

Fertőtlenítési teljesítmény (A₀ értékek) kiválasztása (opció)

1. Helyezze a tisztítandó tárgyakat az előírt helyzetben az edénytartóba, és zárja be a mosogatókamra ajtaját.

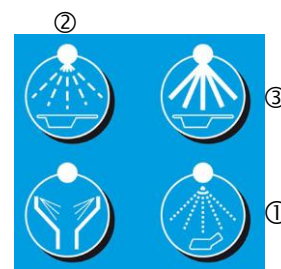

2. Válassza ki a szennyeződésnek megfelelő tisztítóprogramot. Nyomja meg a programgombot. A program automatikusan elindul az előre beállított A₀ értékkel.

**3. Alternatív megoldás**

Tartsa megnyomva a programgombot addig, amíg a szükséges A₀ érték meg nem jelenik középen a [] zárójelben. Ezután azonnal engedje el a programgombot.

A program automatikusan elindul.