



Adaptez les valeurs A_0 avec MEIKO Airstream



MEIKO TOPIC – Adaptez les valeurs A_0 avec la fonction optionnelle MEIKO Airstream

Un reconditionnement parfaitement hygiénique requiert une technologie flexible et adaptable. MEIKO vous offre la solution. Les lave-bassins de la gamme *TOPIC* s'adaptent de manière optimale à vos exigences sanitaires.

Pour un confort exceptionnel : l'option *MEIKO Airstream* permet la mise en service des lave-bassins *TOPIC* avec les valeurs A_0 requises au cas par cas.

C'est vous qui déterminez les valeurs en fonction du besoin ! En accord avec l'hygiéniste vous avez la possibilité de sélectionner les valeurs A_0 suivantes : #60 #600 #3000.

Une solution MEIKO propre pour une hygiène et une rentabilité optimales.

L'hygiène parfaite en trois étapes :



1 Choisissez le programme de nettoyage selon vos ustensiles de soins et leur degré de salissure – Appuyez sur la touche et maintenez.



2 L'écran affiche un choix de valeurs A_0 : 60 / 600 / 3000. Une fois la valeur choisie, relâchez la touche.



3 Le programme démarre automatiquement.

Des programmes personnalisables avec MEIKO TOPIC !