

# MEIKO TOPIC

Macchine di lavaggio e disinfezione degli ausili sanitari



## MEIKO TOPIC

### PIÙ TEMPO PER LE PERSONE

Basta premere un pulsante e le macchine di lavaggio e disinfezione MEIKO puliscono e disinfettano i vostri utensili sanitari. Eliminano in modo affidabile batteri, virus e persino le spore di C. diff, nel pieno rispetto della norma EN ISO 15883.

Il risultato è un livello di igiene eccezionale, oltre a un alleggerimento del carico di lavoro per il personale sanitario.

Tra i benefici figura anche una maggiore efficienza operativa. Jörg Menzel, amministratore delegato del Blindenwohnstätten di Berlino – una struttura di assistenza per non vedenti – spiega perché ciò sia così importante: «Le strutture di assistenza come la nostra hanno bisogno di poter accedere a tecnologie che riducano il nostro carico di lavoro e

Qualunque sia lo spazio disponibile, *TOPIC* si adatta con grande facilità grazie a diverse configurazioni. Scegli tra un modello appoggiato a pavimento, un modello armadiato a libera installazione o a parete sollevato da pavimento. Possiamo fornirla anche come combinazione sanitaria completamente attrezzata, con tutto il necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività quotidiane.

I singoli apparecchi *TOPIC* sono progettati per consentire la sostituzione rapida e senza complicazioni delle vecchie apparecchiature. Si inseriscono perfettamente nello spazio occupato dalla vostra vecchia macchina – indipendentemente dalla marca – utilizzando i collegamenti già presenti.




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Igiene garantita grazie al controllo del valore  $A_0$  in conformità alla norma EN ISO 15883
- Sistema di pulizia e disinfezione a tenuta di vapore
- Tre cicli di programma efficaci (breve, normale, intensivo)
- Facile da usare grazie ai comandi One Touch
- Risparmio sui costi grazie al basso consumo di risorse
- Flessibilità grazie ai supporti multifunzionali
- MEIKO 360° – la soluzione completa che comprende prodotti chimici, assistenza, la MEIKO Academy e la progettazione delle aree di lavaggio

Una tecnologia all'avanguardia, realizzata in acciaio inossidabile resistente alla ruggine, garantisce una lunga durata, rendendo l'acquisto di una MEIKO un investimento per il futuro della tua struttura sanitaria.

Ma soprattutto: la vasca di lavaggio a imbutitura profonda è progettata senza angoli né spigoli, il che la rende ideale per l'auto-pulizia. Il sistema di ugelli a getto d'acqua, altamente efficiente e posizionato in modo ottimale, garantisce una pulizia perfetta di pappagalli, padelle, secchi per le feci e altro ancora.

La tecnologia One-Touch rende il controllo dei programmi un gioco da ragazzi. Dall'avvio del programma all'analisi, tutte le operazioni vengono eseguite tramite una tastiera a membrana.

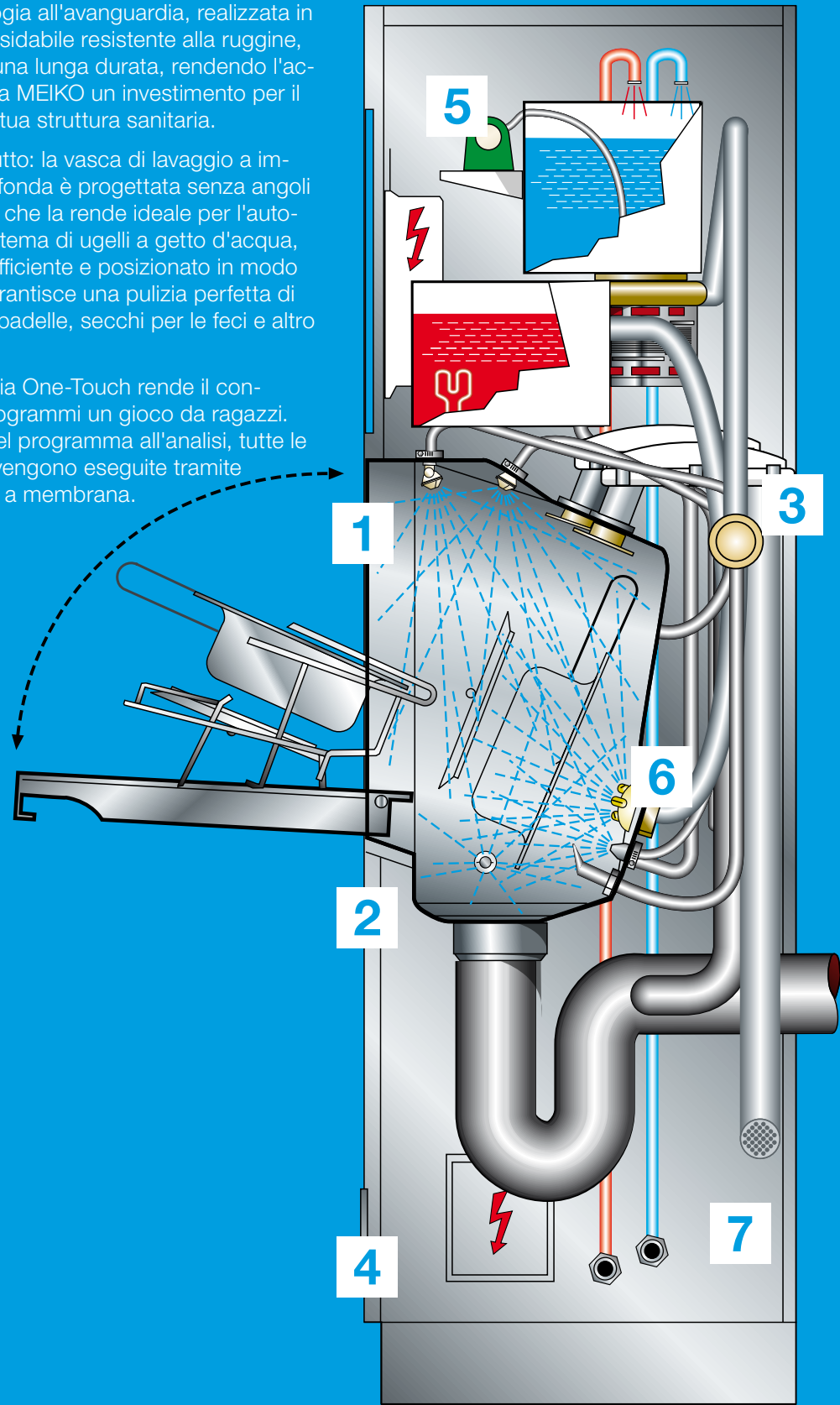

**Steam  
Stop**

**Thermo  
Control**

**System  
Disinfect**

**Chem  
Code**

**Chem  
Control**

**Power  
Clean**

**Cool  
Touch**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**

**1. Un sistema completamente a tenuta di vapore che controlla e rilascia il vapore in modo sicuro**

**Vantaggi**

- Previene efficacemente la diffusione dei germi
- Migliora la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro
- Riduce i danni alla macchina e all'ambiente circostante che possono essere causati dall'umidità

**2. Due sensori di temperatura che si monitorano a vicenda, effettuando misurazioni proprio dove serve: nel punto più freddo**

**Benefici**

- Verifica il rispetto dei valori A0
- Garantisce prestazioni di disinfezione affidabili
- Conforme ai requisiti delle norme EN ISO 15883-1 e -3

**3. Disinfezione di sistema durante ogni ciclo, inclusa la camera di lavaggio, i tubi di carico dell'acqua e gli ugelli**

**Benefici**

- Previene in modo affidabile la ricontaminazione
- Garantisce un potere disinfettante costante grazie alla distribuzione uniforme del vapore

**4. Collegamento intuitivo dei prodotti chimici: brillantante con addolcitore e detergente**

**Benefici**

- Previene gli errori manuali
- Garantisce flussi di lavoro chiari
- Semplifica le operazioni quotidiane

**5. Monitoraggio tramite sensori del dosaggio e del corretto funzionamento del brillantante con addolcitore d'acqua e del detergente**

**Benefici**

- Ottimizza l'uso del brillantante grazie all'addolcitore d'acqua e al detergente
- Garantisce l'affidabilità del processo in conformità alle norme EN ISO 15883-1 e -3
- Previene la formazione di calcare e i danni che ne derivano

**6. Sistema di lavaggio con un getto rotante telescopico e ugelli di lavaggio aggiuntivi posizionati in modo ottimale**

**Benefici**

- Consente una pulizia accurata con un impiego minimo di tempo e risorse
- Rimuove ed elimina efficacemente i germi
- Efficace anche contro le spore di C. diff (efficacia certificata) grazie alla combinazione di azione meccanica, temperatura e detergente

**OPZIONALE**

**7. Raffreddamento con aria filtrata – con effetto essiccante**

**Benefici**

- Raffredda con aria priva di germi grazie al filtro HEPA
- Garantisce che gli utensili sanitari siano immediatamente pronti per essere riutilizzati
- Riduce il rischio di ricontaminazione rispetto al raffreddamento ad acqua



**APERTURA E CHIUSURA AUTOMATICA DELLA PORTA TRAMITE SENSORE A INFRAROSSI AD ALTEZZA MANI E/O PEDALE: (OPZIONALE)**

- Riduce al minimo il rischio di diffusione di agenti patogeni
- Più facile da usare in contesti assistenziali

**VALORE A<sub>0</sub> REGOLABILE:**

- Scegli in modo flessibile il tuo valore A<sub>0</sub>
- Impostazioni disponibili: A<sub>0</sub> 60, A<sub>0</sub> 600, A<sub>0</sub> 3 000 (3 000 se combinato con CoolTouch)
- Da stabilire in accordo con il proprio team di controllo delle infezioni, per le misure igieniche di base o secondo necessità

**IL VALORE A<sub>0</sub> PERFETTO IN TRE PASSAGGI**



**Fase 1:**

Scegliere il programma di lavaggio in base al tipo di utensili sanitari da lavare e al grado di sporco: premere il pulsante e tenerlo premuto.




**Fase 2:**

Il display mostra le impostazioni A<sub>0</sub> disponibili: A<sub>0</sub> 60 / A<sub>0</sub> 600 / A<sub>0</sub> 3 000. Rilasciare il pulsante quando il valore desiderato appare al centro.



**Fase 3:**

Il programma si avvia automaticamente non appena si rilascia il pulsante.

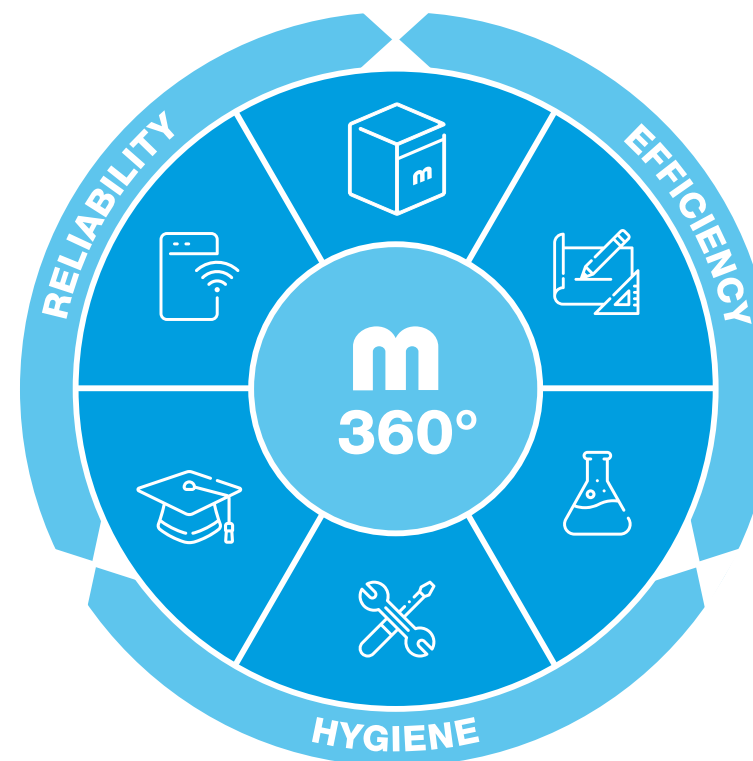

**MEIKO 360°: PROGETTATO IN MODO OLISTICO. ESEGUITO CON MAESTRIA.**

La pulizia perfetta non è mai frutto del caso. È il risultato di un perfetto equilibrio tra tutti gli elementi. MEIKO 360° riunisce tutti i fattori fondamentali in un'unica soluzione integrata: dalla progettazione, all'alta tecnologia delle nostre soluzioni di lavaggio, ai prodotti chimici adatti per ogni contesto, fino all'assistenza tecnica, alla connettività e alla formazione attraverso la MEIKOAcademy.

Insieme a voi, uniamo tanti elementi distinti in un unico progetto: igienico, efficiente e affidabile.

**PRODOTTI CHIMICI MEIKO**

Per ottenere risultati di lavaggio eccellenti, è necessaria la giusta combinazione di tecnologia, detersivo (opzionale) e brillantante. Ecco cosa si ottiene con i prodotti Doyen approvati da MEIKO.

**Benefici dei prodotti chimici Doyen:**

- Omologato per l'uso nelle macchine *TOPIC*
- Quantità di dosaggio ottimale, mantenuta il più bassa possibile
- Testato per essere efficace su tutti i materiali





#### PROGETTAZIONE MEIKO

Che abbiate bisogno di una sola macchina o di un'intera combinazione sanitaria per il lavaggio e disinfezione, lavoreremo insieme a voi per progettare l'intera area di lavaggio. Questo è il modo migliore per creare ambienti di lavoro estremamente igienici ed ergonomicamente ottimizzati, in grado di soddisfare sia le aspettative dei clienti sia i requisiti normativi.

#### Tra i nostri punti di forza figurano:

- Soluzioni di lavaggio su misura per progetti di ristrutturazione, rinnovo e nuova costruzione
- Collegamenti senza soluzione di continuità
- Superfici a filo che integrano perfettamente i singoli componenti
- Interamente in acciaio inossidabile




#### MEIKO ACADEMY

Sapevate che offriamo anche corsi di formazione per i tecnici? La **MEIKO Academy** offre accesso diretto alle conoscenze che abbiamo accumulato nel corso di decenni. I nostri corsi di formazione, sia online che in presenza, ti consentiranno di rimanere al passo con le ultime tecnologie. I corsi di formazione trattano inoltre argomenti fondamentali relativi al mondo della microbiologia e del controllo delle infezioni, oltre a importanti questioni giuridiche.



Per saperne di più sui nostri programmi di formazione, visita il sito: [www.meiko-academy.com](http://www.meiko-academy.com)

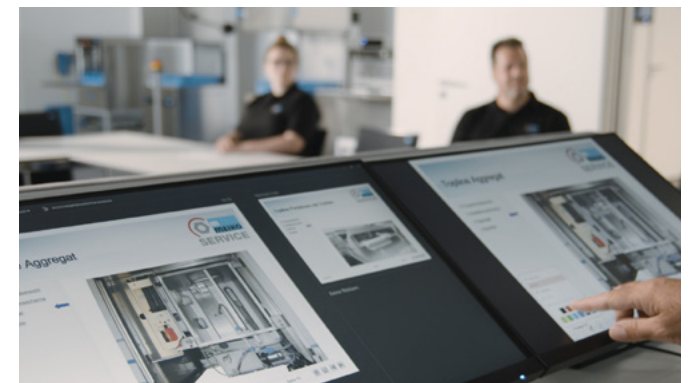

#### SERVIZIO ASSISTENZA MEIKO

I nostri team di assistenza post-vendita garantiscono risposta e tempi di intervento rapidi.

Vantaggi del servizio assistenza **MEIKO**: Tecnici autorizzati e formati presso la **Academy MEIKO**.



**Macchine a libera installazione**

**MEIKO TOPIC 10** – Unità a parete (con o senza vuotatoio)  
Il montaggio a parete lascia libero il pavimento, facilitando la pulizia



**MEIKO TOPIC 10**  
Dimensioni (mm): W 500, D 450 o 588, A (apparecchio) 1 630



**MEIKO TOPIC 10 A**  
Dimensioni (mm): W 1,000, D 450 o 588, A (apparecchio) 1 630  
Para schizzi (opzionale)

**MEIKO TOPIC 20** – Modello a pavimento (con o senza vuotatoio) – Montaggio a pavimento con basamento per un'installazione rapida



**MEIKO TOPIC 20**  
Dimensioni (mm): W 500, D 450 o 588, A 1 730



**MEIKO TOPIC 20 A**  
Dimensioni (mm): W 1 000, D 450 o 588, A 1 730  
Para schizzi (opzionale)

Macchine a libera installazione

- MEIKO TOPIC 40** – Modello armadiato a libera installazione (con o senza lavabo)  
Installazione a pavimento con zoccolo per massimizzare lo spazio di lavoro e il piano di appoggio
- Dotato già di serie di un armadietto chiudibile a chiave per i contenitori di sostanze chimiche
  - Il piano da tavolo è disponibile anche con alzatina a un costo aggiuntivo



**MEIKO TOPIC 40**  
Dimensioni (mm): L 900, P 600, A 900



**MEIKO TOPIC 40 B**  
Dimensioni (mm): L 900, P 600, A 1 000  
Lavabo: L 340, P 370, A 150

Combinazioni sanitarie

Le combinazioni sanitarie per il lavaggio e disinfezione MEIKO sono disponibili in diverse configurazioni, con modelli a pavimento o modelli armadiati a libera installazione, pensati per soddisfare le vostre esigenze e adattarsi alla disposizione della vostra area di deposito e sanificazione. Grazie alla loro massima funzionalità, contribuiscono a semplificare le attività di assistenza quotidiana.

**SAN 14 B / MEIKO TOPIC**  
Unità con appoggio a terra o modelli armadiati a libera installazione e lavabo

- Dimensioni (mm): L 1 400, P 600, H 1 000  
Vuotatoio: H 700  
Vuotatoio: Ø 362  
Lavabo: L 340, P 370, A 150



**SAN 19BW** – Unità con appoggio a terra o modelli armadiati a libera installazione con vuotatoio, lavello, lavabo e mobile (500 mm)

- Dimensioni (mm): L 1 900, P 600, H 900  
Vuotatoio: H 700  
Vuotatoio: Ø 362  
Lavabo: L 340, P 370, A 150  
Spazio vano: L 500



**SAN 20BW** – Unità con appoggio a terra o modelli armadiati a libera installazione con vuotatoio, lavello, lavabo e mobile (600 mm)

- Dimensioni (mm): L 2 000, P 600, H 1 000  
Vuotatoio: H 700  
Vuotatoio: Ø 362  
Lavabo: L 340, P 370, A 150  
Lavello: L 500, P 400, A 300  
Spazio vano: L 600



**SAN 24 W** – Unità con appoggio a terra o modelli armadiati a libera installazione con vuotatoio, lavello, lavabo e mobile (1 000 mm)

- Dimensioni (mm): L 2 400, P 600, H 900  
Vuotatoio: H 700  
Vuotatoio: Ø 362  
Lavello: L 500, P 400, A 300  
Spazio vano: L 1 000



**SAN 29BW** – Unità con appoggio a terra o modelli armadiati a libera installazione con vuotatoio, lavello, lavabo e mobile (1 500 mm)

- Dimensioni (mm): L 2 900, P 600, A 900  
Vuotatoio: H 700  
Vuotatoio: Ø 362  
Lavabo: L 340, P 370, A 150  
Lavello: L 500, P 400, A 300  
Spazio vano: L 1 500



Le immagini mostrano caratteristiche/accessori opzionali

Oltre alla sua tecnologia di pulizia e disinfezione, MEIKO offre una gamma completa di accessori e componenti. Questi prodotti favoriscono condizioni di lavoro sicure ed ergonomiche e consentono di riporre in modo igienico gli strumenti ospedalieri. Siamo inoltre lieti di sviluppare soluzioni personalizzate su misura per le vostre esigenze!



**Ripiani di asciugatura e scaffali\***

- Per provette di urina, padelle e contenitori disinfettati, dotati di griglia di appoggio o sgocciolatoi
- Disponibile nelle larghezze da 500 a 1 400 mm



**Mensola a parete\***

- Con mensole regolabili in altezza
- Disponibile in tutte le larghezze (profondità 350 mm)



**Pensile a parete con ante\*\***

- Con ante a battente e un ripiano intermedio
- Disponibile nelle larghezze 500/600/800/1 000/1 200/1 500 mm
- Opzionale: copertura per luci e lampada



**Pensili a parete senza ante**

- Per lo stoccaggio a vista con un ripiano intermedio
- Disponibile nelle larghezze 500/1 000/1 200 mm



**Combinazione sanitaria**


- Sottoarmadi con cassetti e altri elementi per combinazioni sanitarie per il lavaggio e disinfezione
- Disponibile in diverse larghezze e altezze




**Vuotatoio\***

- Modello standard personalizzabile con di sistema integrato di scarico per il risciacquo del vuotatoio
- Può essere utilizzato indipendentemente dalla macchina di lavaggio e disinfezione


\* Le immagini mostrano caratteristiche/accessori opzionali  
\*\* Opzionale: copertura per luci e lampada

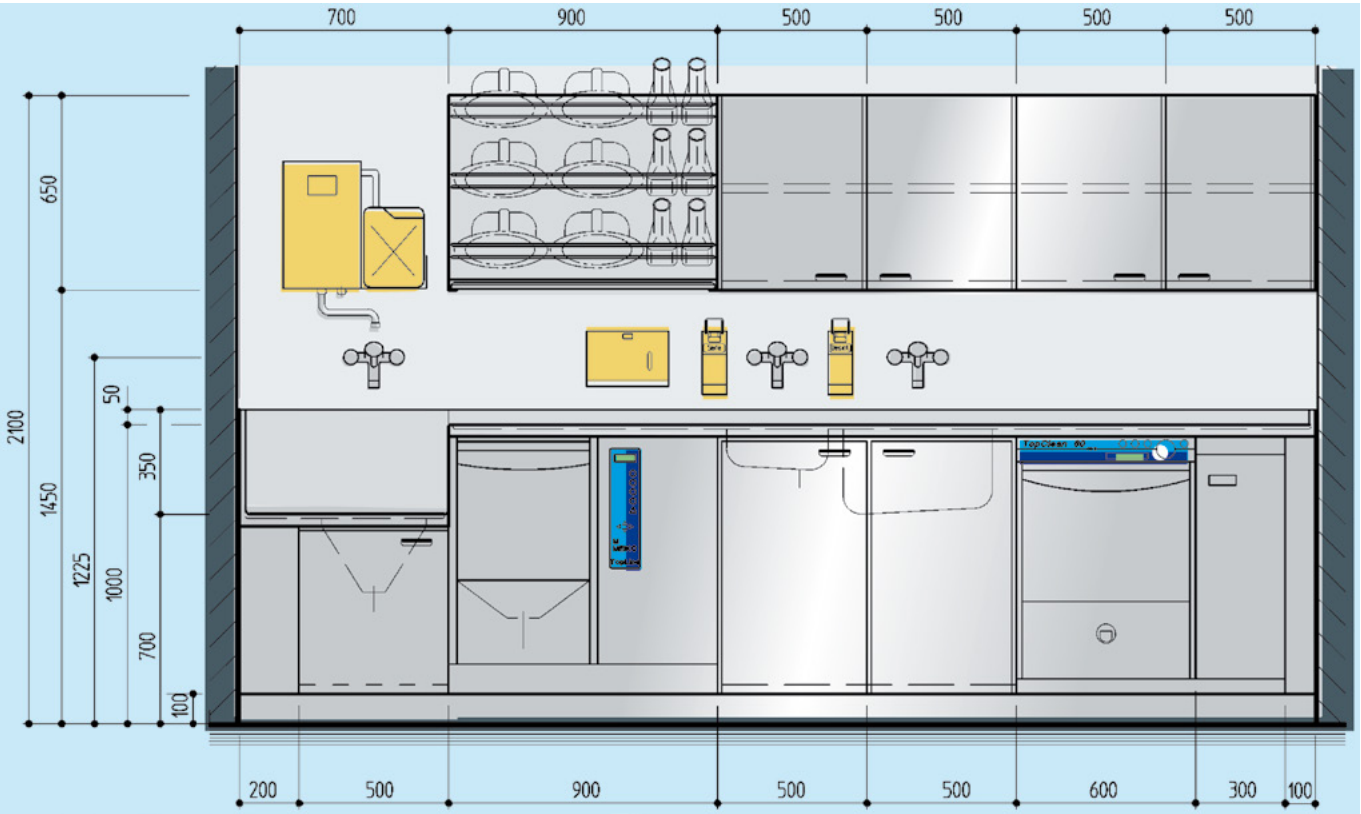


Modello a pavimento MEIKO TOPIC

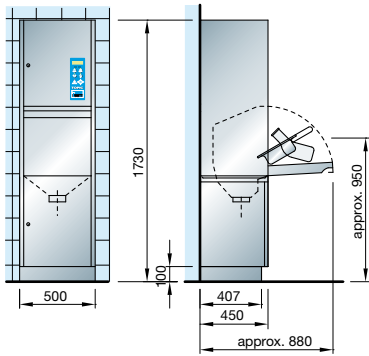

Combinazione sanitaria compatta per il lavaggio e disinfezione MEIKO TOPIC

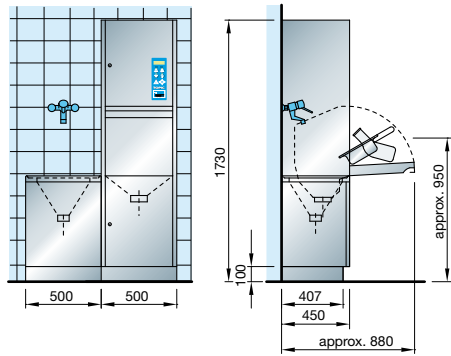

MEIKO TOPIC modello ad incasso

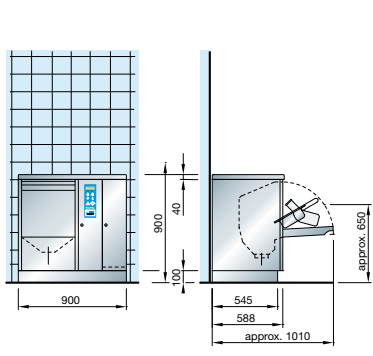

|                                                                 |       | TOPIC  |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|                                                                 |       | 400 V  | 230 V |
| Valore di allacciamento totale                                  | kW    | 4,6    | 2,8   |
| Allacciamento dell'acqua di alimentazione, acqua fredda         |       | G 3/4" |       |
| Allacciamento dell'acqua di alimentazione, acqua calda 45-60 °C |       | G 3/4" |       |
| Pressione di flusso                                             | bar   | 1-5    |       |
| Portata                                                         | l/min | 18     |       |
| Scarico                                                         |       | DN 100 |       |
| Livello di rumorosità                                           | dB(A) | 48,2   |       |



The clean solution

**MEIKO ITALIA Srl** · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia  
Tel. +39 011 9190211 · [info@meikoitalia.it](mailto:info@meikoitalia.it) · [www.meiko.com](http://www.meiko.com)

**MEIKO (Suisse) AG** · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera  
Tel. +41 44 8062626 · [info@meiko-suisse.ch](mailto:info@meiko-suisse.ch) · [www.meiko.com](http://www.meiko.com)

**MEIKO Clean Solutions Austria GmbH**  
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria  
Tel. +43 1 6992039 · [office@meiko.at](mailto:office@meiko.at) · [www.meiko.com](http://www.meiko.com)

Produttore:  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203-0 · [info@meiko-global.com](mailto:info@meiko-global.com) · [www.meiko.com](http://www.meiko.com)

