

MEIKO TOPIC

Bedpanspoelers – eenvoudig, efficiënt en veelzijdig





MEER TIJD VOOR DE OMGANG MET ELKAAR

Eén druk op de knop – en de MEIKO bedpanspoeler reinigt en desinfecteert uw zorghulpmiddelen. Bacteriën en virussen worden hierbij volgens DIN EN ISO 15883 effectief gereduceerd. Dat geldt zelfs bij sporen van het type C. diff!

En dat betekent: meer hygiënezekerheid en minder werk voor het personeel.

Zelfs de financiële afdeling is er blij mee! Dat bevestigt ook Jörg Menzel, directeur van de Blindenwohnstätten in Berlijn: “In de zorg hebben we behoefte aan techniek die ons het werk uit handen neemt en de processen makkelijker en efficiënter maakt.”

Afhankelijk van de situatie in de ruimte wordt *TOPIC* als wandmodel of als staand model toegepast. Of als compleet uitgeruste verpleegcombinatie.

De *TOPIC* stand-alone machines zijn speciaal ontworpen voor de snelle en eenvoudige vervanging van verouderde techniek. Ze worden op maat in de bestaande installatie, volledig onafhankelijk van het oorspronkelijke product, ingepast en aangesloten.



DIT KUNT U VERWACHTEN:

- Hygiënezekerheid door A₀-waardesturing volgens DIN EN ISO 15883
- Dampdicht reinigings- en desinfectiesysteem
- 3 effectieve programmacycli (kort, normaal en intensief programma)
- Ideale bediening dankzij het One-Touch-bedieningsconcept
- Besparing van kosten dankzij het gebruik van minder bedrijfsmiddelen
- Flexibiliteit door multifunctionele houders
- Het all-round zorgeloos pakket: de *MEIKO Clean Solution Cirkel* met chemie, service, academy en planning

TOPTECHNIEK

Solide techniek van roestvrij staal vormt de basis voor een lange levensduur en een betrouwbare investering.

Top: de diepgetrokken waskamer heeft geen hoeken en randen en is ontworpen voor zelfreiniging. Het zeer efficiënt gepositioneerde systeem met krachtige sproeiers zorgt voor een optimale reiniging van bedpannen en urinalen.

Met de One-Touch-techniek kunt u het programma eenvoudig aansturen. Van de start van het programma tot en met de analyse vindt alles plaats via de toetsenfolie.

ANDERE TOP FUNCTIES:

1. Volledige dampdichtheid van het systeem


Voordelen

- Geen risico op overdracht van ziektekiemen
- Hoge arbeids- en hygiënezekerheid
- Optimale bescherming tegen vocht

2. Controle van de A₀-waarden door temperatuursensoren die elkaar bewaken

Voordelen

- Hoge hygiënezekerheid (conform EN ISO 15883-1 en -3*)
- Bewaking van het desinfectievermogen en het reinigings- en desinfectieproces

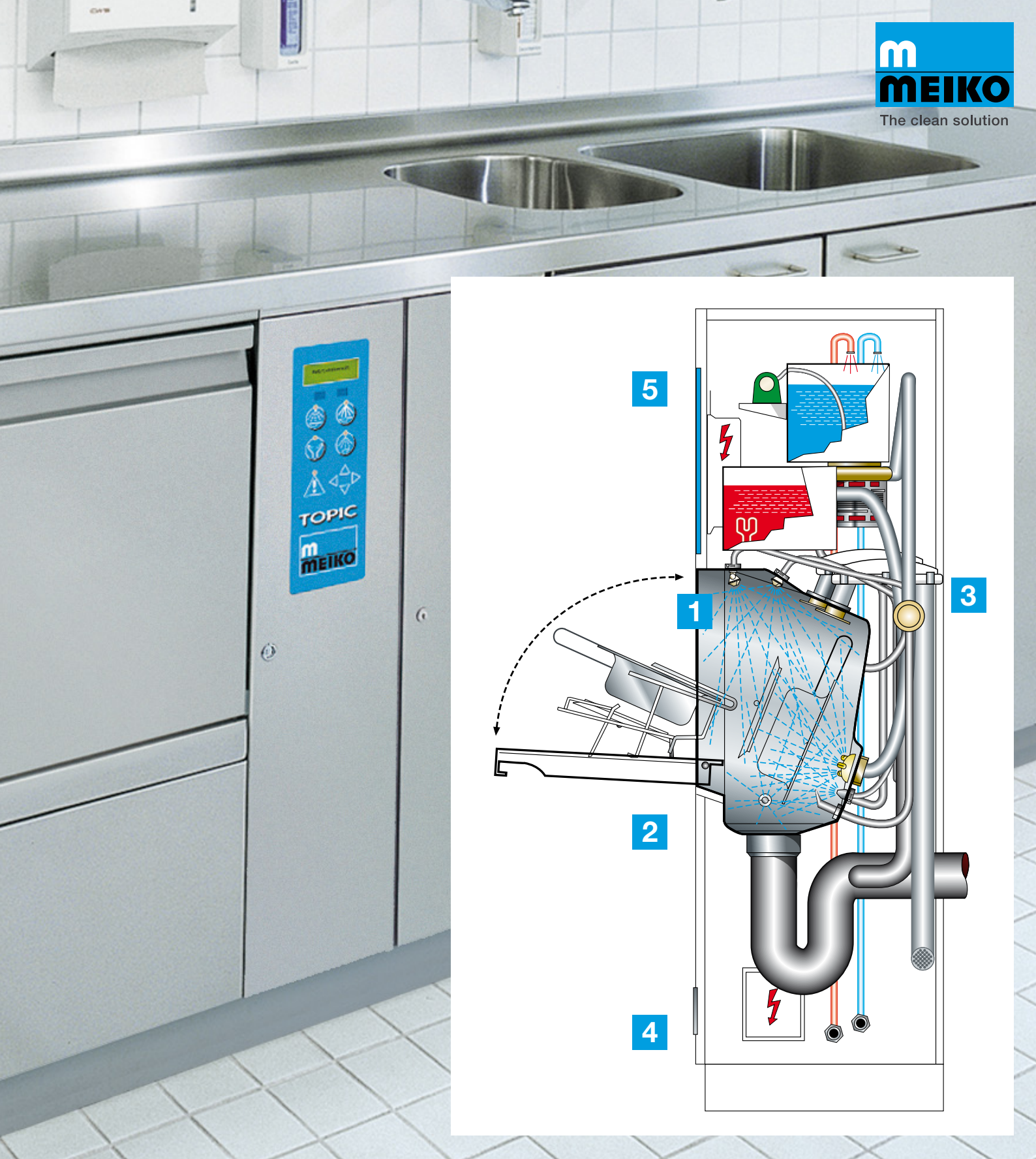

3. Systeemdesinfectie van alle water-voerende leidingen na elke cyclus

Voordelen

- Geen herbesmetting van het systeem
- Gelijmatige dampverdeling en desinfectievermogen voor alle componenten waar water doorheen gaat

4. Eenduidige codering voor reinigingsmiddel (optie) en voor naglansmiddel en waterontharder

Voordelen

- Procesveiligheid
- Gebruiksveiligheid
- Werkverlichting voor het personeel

5. Sensorgestuurde bewaking van de dosering van waterontharder met naglansmiddel en reinigingsmiddel

Voordelen

- Hoge mate van betrouwbaarheid
- Optimale inzet van bedrijfsmiddelen
- Voorkomt kalkafzetting

MEIKO TOPIC – Uitbreidingen op het apparaat



TERUGKOELING MET DROOGEFFECT (optioneel)

- Voor het koelen en drogen van zorg-hulpmiddelen met gefilterde lucht
- Waterbesparing tot wel 8 liter per programmacyclus (vergeleken met een stap voor terugkoeling met water)

AANPASBARE A₀-WAARDE:

- Om de A₀-waarde flexibel zelf te bepalen
- Er is keuze uit de waarden: A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3000 (3000 in combinatie met terugkoeling en droging)
- In overeenstemming met de ziekenhuishygiëne voor de basishygiëne en bij behoefte

AUTOMATISCHE DEUROPENING EN -SLUITING MET INFRAROOD- HANDSENSOR EN/OF VOETSCHAKELAAR: (optioneel)

- Minimaliseert het risico op overdracht van ziektekiemen
- Vereenvoudigt de bediening in de zorg

IN DRIE STAPPEN NAAR DE PERFECTE EN JUISTE A₀-WAARDE



Stap 1:

Bepaal het reinigingsprogramma op basis van de te reinigen zorg-hulpmiddelen en de vervuilingsgraad. Houd de toets ingedrukt.



Stap 2:

Het display laat de A₀-waarden zien die kunnen worden geselecteerd: A₀ 60 /A₀ 600 /A₀ 3000. Laat de toets los wanneer de opgegeven waarde is bereikt.



Stap 3:


Zodra u de toets loslaat, start het programma automatisch.

MEIKO CLEAN SOLUTION CIRCLE

Wij ondersteunen u volledig, van de planning, installatie en het onderhoud van de machines tot het instrueren van uw medewerkers en de chemie. We zorgen ervoor dat de hygiëne nergens nadelig wordt beïnvloed.

Alles onder één dak:

De *MEIKO Clean Solution Circle* houdt rekening met alle relevante parameters van een reinigingsproces, evenals met de onderlinge verbanden en afhankelijkheden. De focus ligt op de reinigingsprestaties, weergegeven door de “cirkel van Sinner” (tijd, temperatuur, mechaniek, chemie). Maar alleen met het juiste advies, de juiste toepassing, de juiste service en workflows, en training door de *MEIKO Academy*, krijgen we de cirkel rond. Zodat hygiëne, ecologie en economie kunnen worden gegarandeerd.

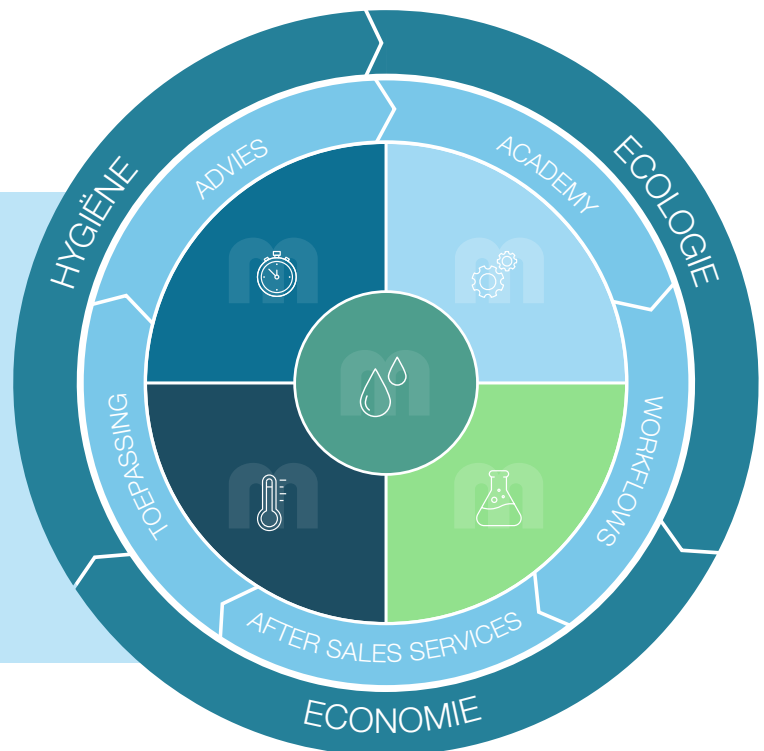

MEIKO CHEMIE

Voor een optimaal reinigingsresultaat moeten techniek, reinigingsmiddel (optioneel) en naglansmiddel op elkaar zijn afgestemd. Bij de door MEIKO goedgekeurde *DOYEN*-producten is dat absoluut het geval.

Voordelen *DOYEN*-chemie:

- Goedgekeurd voor gebruik in *TOPIC*-apparaten
- Optimale en zo laag mogelijke doseerhoeveelheid
- Geteste materiaalverdraagzaamheid



MEIKO TOPIC – All-round zorgeloos pakket



MEIKO PLANNING

Stand-alone machine of verpleegcombinatie: samen met u plannen wij uw volledige vuile spoelruimte. Zo ontstaan er geoptimaliseerde, hygiënezekere werkplekken in de zorg, die in dezelfde mate voldoen aan klantenwensen en aan wettelijke bepalingen.


Onze onderscheidende kenmerken zijn onder meer:

- Schone oplossingen op maat, bij renovaties, modernisering of nieuwe projecten
- Naadloze aansluitingen
- Gesloten oppervlakken die afzonderlijke componenten perfect met elkaar verbinden
- Geheel van roestvrij staal




MEIKO ACADEMY

Wist u dat wij ook opleidingen voor uw eigen monteurs verzorgen? De *MEIKO Academy* biedt u rechtstreeks toegang tot onze kennisdatabase, die wij gedurende vele decennia hebben opgebouwd. Tijdens online en klassikale trainingen brengen wij u op de hoogte van de nieuwste technologie. Kennis uit de wereld van de microbiologie, infectiepreventie en juridische aspecten maken onze trainingen compleet.

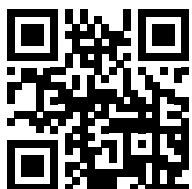

Meer over ons cursusaanbod vindt u op:
meiko-academy.com

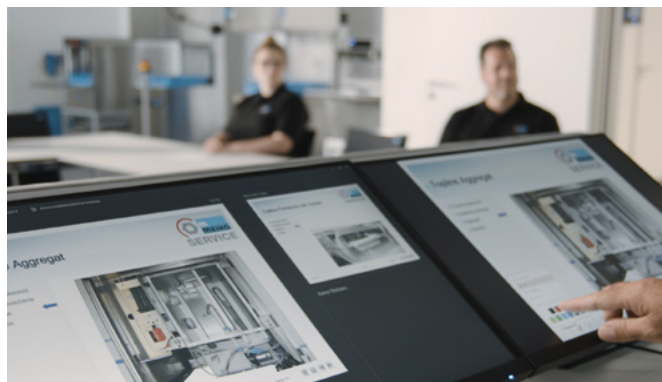

MEIKO SERVICE

Onze service staat voor: snelle reactietijden, korte aanrijroutes, hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen in de servicebus.

Voordelen van de *MEIKO Service*: 365 dagen per jaar, 24/7 servicehotline gekwalificeerde servicemonteurs (door *MEIKO Academy*).



MEIKO TOPIC – Modeloverzicht

Stand-alone machines

MEIKO TOPIC 10 – Wandmodel (met of zonder uitstortunit)

Dit model wordt gemonteerd aan de wand. Hierdoor houdt u vrije ruimte onder de machine voor eenvoudige reiniging van de vloer.



MEIKO TOPIC 10

Afmetingen (mm): B 500, D 450 of 588, H (apparaat) 1630



MEIKO TOPIC 10 A

Afmetingen (mm): B 1000, D 450 of 588, H (apparaat) 1630
Spatscherm (optioneel)

MEIKO TOPIC 20 – Vloermodel (met of zonder uitstortunit)

Dit model wordt met een sokkel geplaatst op de vloer, wat zorgt voor een snelle installatie.



MEIKO TOPIC 20

Afmetingen (mm): B 500, D 450 of 588, H 1730



MEIKO TOPIC 20 A

Afmetingen (mm): B 1000, D 450 of 588, H 1730
Spatscherm (optioneel)

MEIKO TOPIC – Modeloverzicht

Stand-alone machines

MEIKO TOPIC 40 – Tafelmodel (met of zonder wastafel)

Dit tafelmodel wordt met een sokkel op de vloer geplaatst, waardoor werk- en opbergruimte wordt gecreëerd.

- Standaard met afsluitbare opbergkast voor chemie cans
- Opstaand tafelblad tegen meerprijs leverbaar



MEIKO TOPIC 40
Afmetingen (mm): B 900, D 600, H 900



MEIKO TOPIC 40 B
Afmetingen (mm): B 900, D 600, H 1000
wastafel: B 340, D 370, H 150

Verpleegcombinaties

MEIKO verpleegcombinaties zijn verkrijgbaar met vloer- en tafelmodellen en in verschillende uitvoeringen – hierdoor passen ze zich aan de beschikbare ruimte en eisen aan.

Voor veel functies en eenvoudig werken tijdens de dagelijkse verzorging.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC

Vloer- of tafelmodel met uitstortunit, wastafel

Afmetingen (mm): B 1400, D 600, H 1000
Uitstortunit: H 700
Uitstort: Ø 362
Wastafel: B 340, D 370, H 150



SAN 19 B – Vloer- of tafelmodel met uitstortunit, wastafel en kast (500 mm)

Afmetingen (mm): B 1900, D 600, H 900
Uitstortunit: H 700
Uitstort: Ø 362
Wastafel: B 340, D 370, H 150
Kastruimte: B 500



SAN 20 BW – Vloer- of tafelmodel met uitstortunit, wastafels en kast (600 mm)

Afmetingen (mm): B 2000, D 600, H 1000
Uitstortunit: H 700
Uitstort: Ø 362
Wastafel: B 340, D 370, H 150
Wastafel: B 500, D 400, H 300
Kastruimte: B 600



SAN 24 W – Vloer- of tafelmodel met uitstortunit, wastafel en kast (1000 mm)

Afmetingen (mm): B 2400, D 600, H 900
Uitstortunit: H 700
Uitstort: Ø 362
Wastafel: B 500, D 400, H 300
Kastruimte: B 1000



SAN 29 BW – Vloer- of tafelmodel met uitstortunit, wastafels en kast (1500 mm)

Afmetingen (mm): B 2900, D 600, H 900
Uitstortunit: H 700
Uitstort: Ø 362
Wastafel: B 340, D 370, H 150
Wastafel: B 500, D 400, H 300
Kastruimte: B 1500



MEIKO TOPIC – Toebehoren

Naast de MEIKO reinigings- en desinfectietechniek bieden we u een omvangrijk assortiment accessoires en opslagmogelijkheden. Zo maken wij veilig en ergonomisch werken alsmede de hygiënische opslag van zorghulpmiddelen mogelijk. Wij werken ook met plezier individuele oplossingsvoorstellen voor u uit!



Droog- en opslagrekken*

- Voor gedesinfecteerde bedpannen en urinalen met opslagrek of afdruiptrek
- In de breedtes 500 t/m 1400 mm



Wandschap*

- Met in hoogte verstelbare planken
- In alle breedtes (diepte 350 mm)



Gesloten wandkasten**

- Kast met scharnierdeuren en steeds 1 tussenschap
- In de breedtes 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- Optioneel: lichtscherm en lamp



Open wandkasten

- Kasten voor open opbergen met steeds 1 tussenschap
- In de breedtes 500/1000/1200 mm



Reinigingscombinatie*

- Onderkasten o.a. met lades voor de verpleegcombinaties
- Kan in verschillende breedtes en hoogtes worden uitgevoerd




Uitstortunit*


- Standaardmodel optioneel met ingebouwde uitstortunitspoeling
- Onafhankelijk van de bedspanspoeler te bedienen

* Afbeeldingen laten speciale uitvoeringen zien


** Optioneel: lichtscherm en lamp

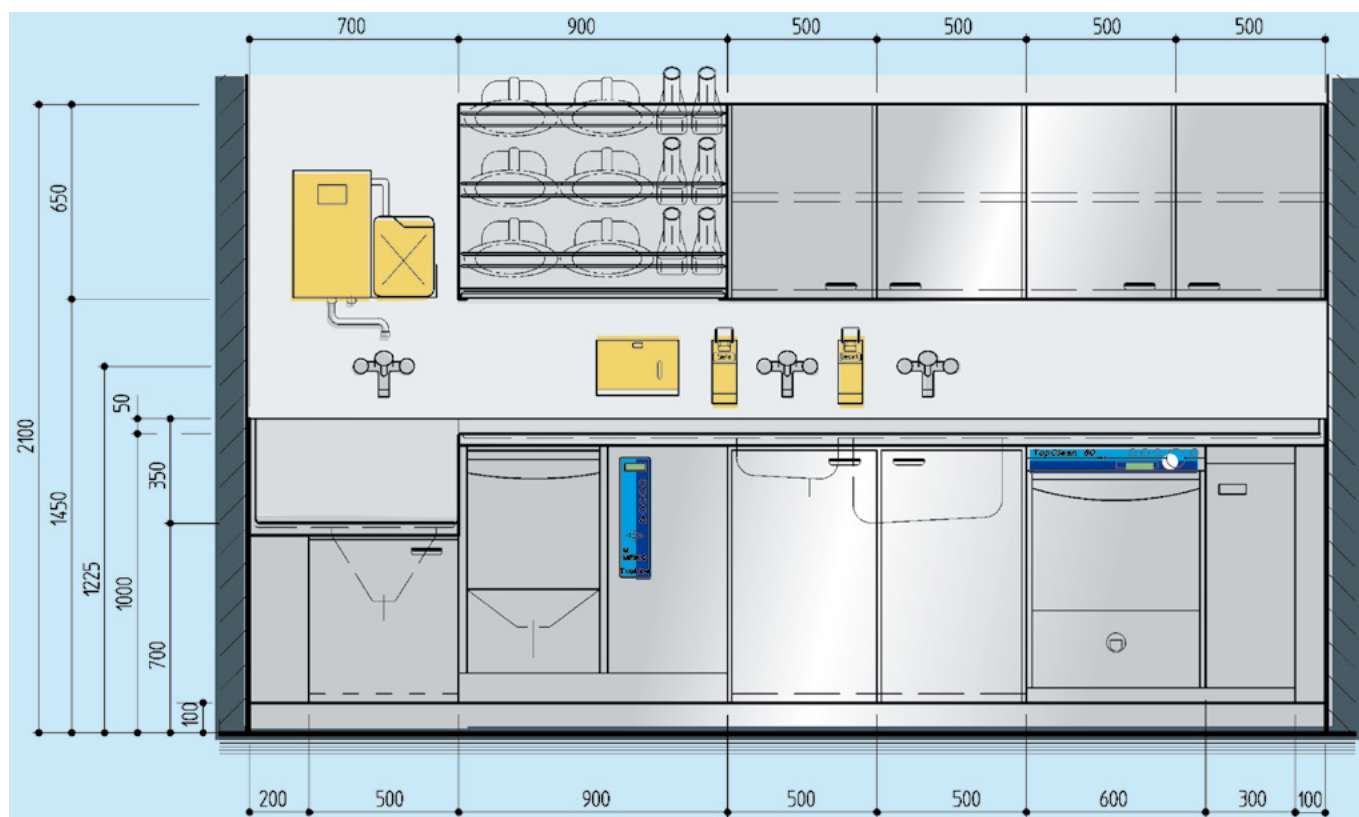


MEIKO TOPIC als vloermodel

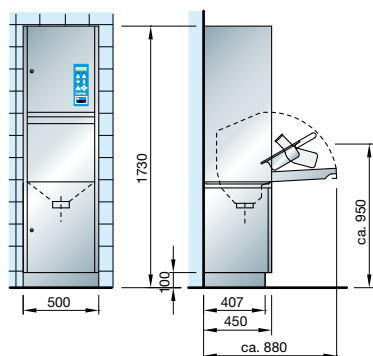

MEIKO TOPIC als kleine verpleegcombinatie

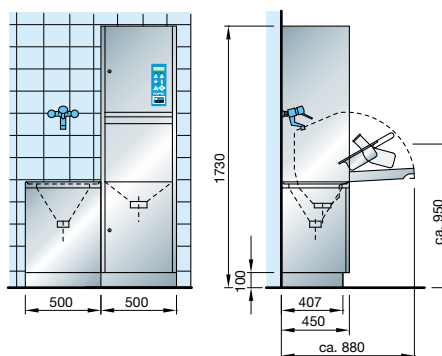

MEIKO TOPIC als onderbouwmodel

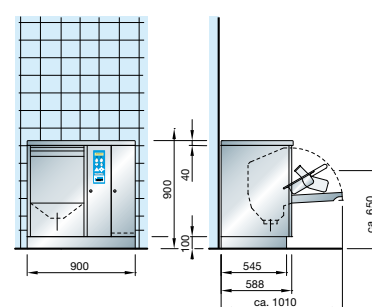

		TOPIC	
		400 V	230 V
Totale aansluitwaarde	kW	4,6	2,8
Watertoevoeraansluiting koud water		G ¾"	
Watertoevoeraansluiting warm water 45-60 °C		G ¾"	
Stroomdruk	bar	1-5	
Debiet	l/min	18	
Afvoer		DN 100	
Geluidsniveau	dB(A)	48,2	



The clean solution

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

