

MEIKO TOPIC

Myjnie-dezynfektory





WIĘCEJ CZASU DLA PODOPIECZNYCH

Mycie i dezynfekcja naczyń sanitarnych – z myjniemi-dezynfektorami MEIKO to kwestia naciśnięcia jednego przycisku. Gwarantują one skuteczne ograniczanie liczby bakterii i wirusów zgodnie z normą DIN EN ISO 15883, w tym także przetrwalników *Clostridioides difficile*.

Zapewnia to nie tylko doskonałą higienę lecz również odciążenie personelu.

Do tego dochodzą też korzyści ekonomiczne. Potwierdza to również Jörg Menzel, dyrektor zarządzający domu opieki dla niewidomych Blindenwohnstätten Berlin: „W domach opieki potrzebujemy technologii, która redukuje nakłady pracy i zapewnia bardziej ekonomiczne procesy”.

W celu umożliwienia optymalnego dostosowania do warunków przestrzennych myjnie-dezynfektory *TOPIC* oferowane są jako modele wolnostojące i nastawne, a także jako urządzenia do montażu ściennego, zapewniające prześwit nad podłogą. Są one również dostępne w ramach kompletnych zestawów do mycia i dezynfekcji, zawierających wszystkie niezbędne i praktyczne elementy wyposażenia.

Osobne urządzenia *TOPIC* są specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybkie i łatwe zastąpienie przestarzałej technologii. Zapewniają one doskonałe dopasowanie i łatwe podłączanie w miejscu starego urządzenia – niezależnie od jego marki.



KLUCZOWE CECHY:


- Bezpieczeństwo higieniczne dzięki sterowaniu wartością A_0 zgodnie z normą DIN EN ISO 15883
- Paroszczelny system mycia i dezynfekcji
- Trzy skuteczne cykle programów (krótki, normalny i intensywny)
- Łatwa obsługa dzięki koncepcji One Touch
- Redukcja kosztów dzięki niskiemu zużyciu środków eksploatacyjnych
- Wszechstronność dzięki wielofunkcyjnym uchwytom na naczynia sanitarne
- MEIKO 360° – kompleksowe rozwiązanie obejmujące środki chemiczne, serwis, MEIKO Academy i planowanie

MEIKO TOPIC – technologia

Wytrzymała technologia ze stali nierdzewnej – to podstawa długiej żywotności i bezpieczeństwo inwestycji.

Najwyższa jakość: Głęboko tłoczona komora mycia nie posiada narożników ani ostrych krawędzi, co stwarza idealne warunki do samoczyszczenia. Optymalnie rozmieszczony system wysokowydajnych dysz zapewnia skuteczne mycie kaczek i basenów sanitarnych, nocników itd.

Technologia One Touch umożliwia łatwe sterowanie programem. Wszystko – od uruchomienia programu po analizę – odbywa się za pomocą foliowego panelu sterującego.

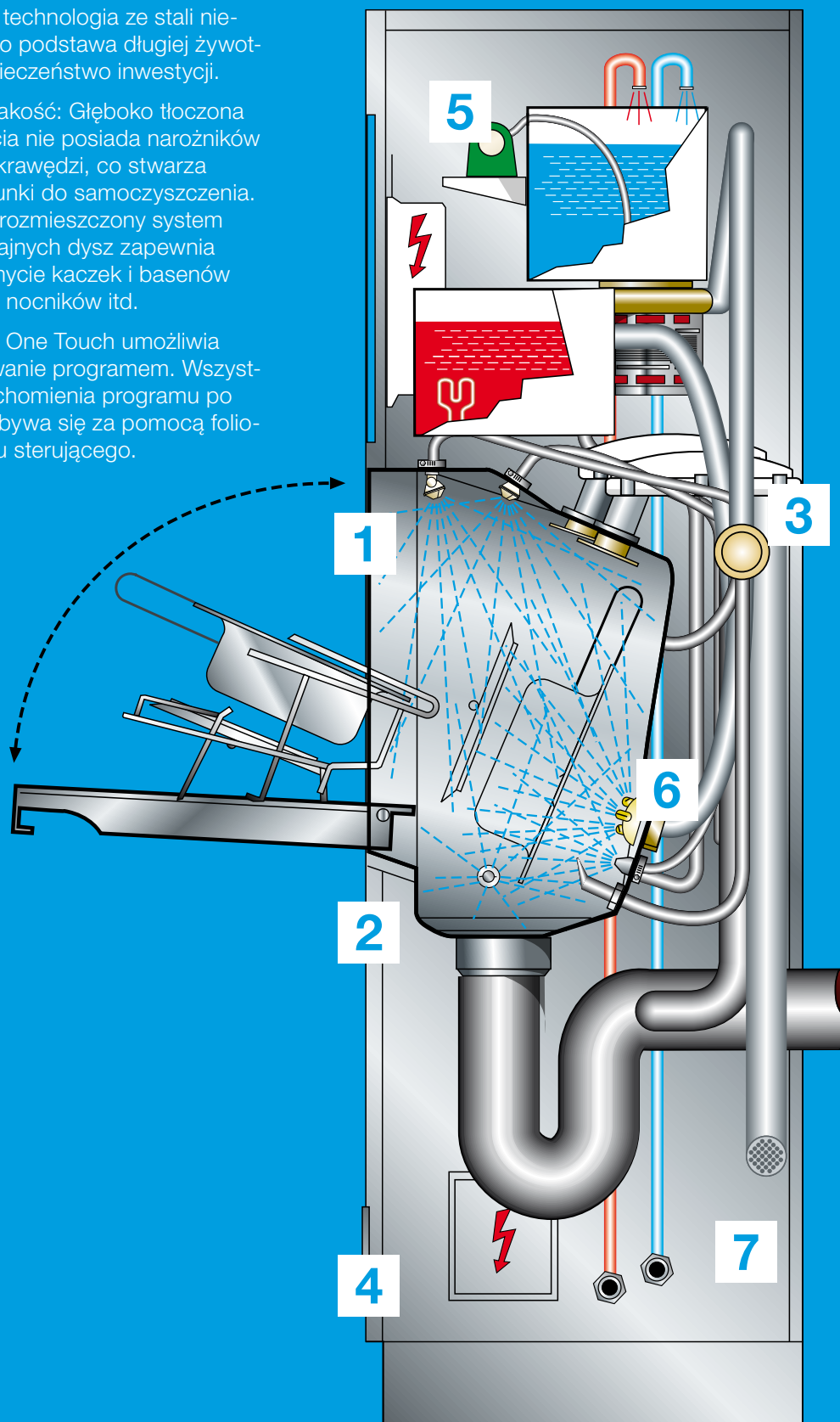

**Steam
Stop****Thermo
Control****System
Disinfect****Chem
Code****Chem
Control****Power
Clean****Cool
Touch****KLUCZOWE CECHY:****1. Całkowicie paroszczelny system, kontrolujący i w bezpieczny sposób uwalniający parę****Korzyści**

- Skutecznie zapobiega uwalnianiu drobnoustrojów
- Podnosi poziom bezpieczeństwa i higieny na stanowisku pracy
- Ogranicza ryzyko uszkodzenia urządzenia i pomieszczenia spowodowane wilgocią

2. Dwa monitorujące się wzajemnie czujniki temperatury, dokonujące pomiarów dokładnie tam, gdzie ma to znaczenie – w najchłodniejszym punkcie**Korzyści**

- Monitoruje zgodność z wartościami A_0
- Zapewnia niezawodną skuteczność dezynfekcji
- Spełnia wymagania norm EN ISO 15883-1 i -3

3. Dezynfekcja systemowa komory mycia, rur, przez które przepływa woda i dysz w trakcie każdego cyklu**Korzyści**

- Skutecznie zapobiega skażeniu wtórnemu
- Zapewnia niezmienną skuteczność dezynfekcji dzięki równomiernemu rozprowadzaniu pary

4. Kodowanie przyłączy nablyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu za pomocą koloru i kształtu**Korzyści**

- Skutecznie chroni przed nieprawidłowym podłączeniem
- Zapewnia jasne przebiegi pracy
- Upraszcza codzienną pracę

5. Monitorowanie objętości i działania dozowania nablyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu za pomocą czujników**Korzyści**

- Optymalizuje wykorzystanie nablyszczacza ze zmiękczaczem wody oraz detergentu
- Zapewnia niezawodność procesu zgodnie z normami EN ISO 15883-1 i -3
- Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz związanym z tym uszkodzeniom

6. System mycia z teleskopową dyszą obrotową i dodatkowymi, optymalnie rozmieszczonymi dyszami myjącymi**Korzyści**

- Zapewnia dokładne czyszczenie w najkrótszym czasie i przy minimalnym zużyciu zasobów
- Skutecznie usuwa drobnoustroje i aktywnie je spłukuje
- Skuteczny nawet przeciwko zarodnikom *C. difficile* (potwierdzone ekspertyzą) dzięki połączeniu działania czynników mechanicznych, temperatury i detergentu

OPCJA**7. Schładzanie filtrowanym powietrzem – wraz z efektem suszenia****Korzyści**

- Chłodzi powietrzem pozbawionym drobnoustrojów dzięki zastosowaniu filtra HEPA
- Zapewnia, że naczynia sanitarne są od razu gotowe do ponownego użycia
- Ogranicza ryzyko skażenia wtórnego w porównaniu z chłodzeniem wodą

MEIKO TOPIC – opcje rozszerzeń i ustawienia



AUTOMATYCZNIE OTWIERANE I ZAMYKANE DRZWI Z CZUJNIKIEM DŁONI NA PODCZEWIEŃ I/LUB PRZEŁĄCZNIKIEM NOŻNYM:

(opcja)

- Minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów
- Ułatwienie obsługi przez personel

REGULACJA WARTOŚCI A_0 :

- Do elastycznego wyboru wartości A_0
- Dostępne wartości: A_0 60, A_0 600, A_0 3000 (3000 tylko w połączeniu z opcją CoolTouch)
- Zależnie od rekomendacji zespołu ds. kontroli zakażeń, wymagań w zakresie higieny oraz bieżących potrzeb

WYBÓR WŁAŚCIWEJ WARTOŚCI A_0 W TRZECH KROKACH



Krok 1:

Wybieramy program mycia odpowiedni do umieszczonych naczyń sanitarnych oraz ich stopnia zanieczyszczenia – poprzez przytrzymanie przycisku.




Krok 2:

Na wyświetlaczu pokazują się dostępne wartości A_0 : A_0 60 / A_0 600 / A_0 3000. Gdy żądana wartość pojawi się pośrodku, zwalniamy przycisk.



Krok 3:

Po zwolnieniu przycisku program automatycznie uruchamia się.

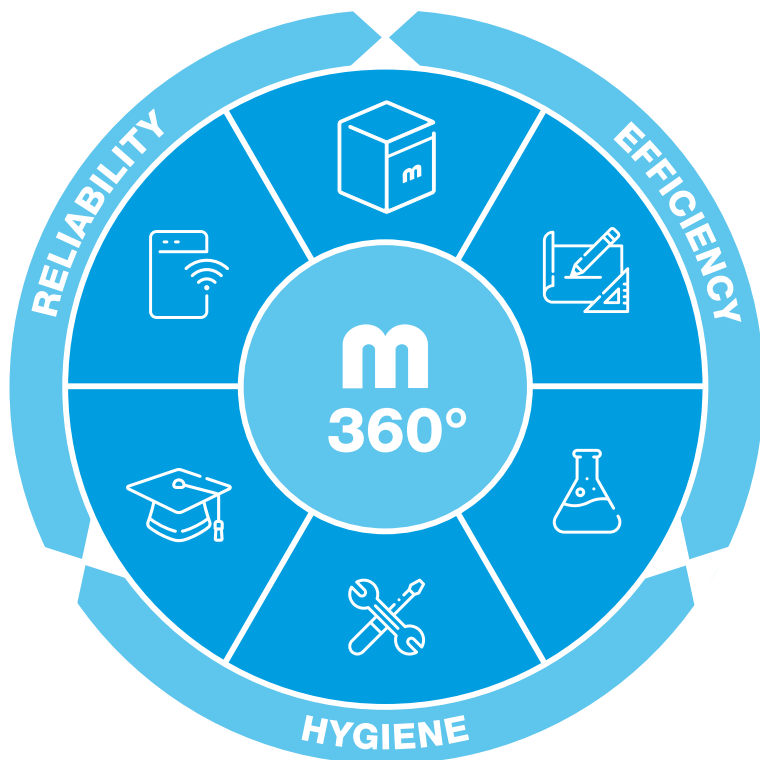

MEIKO 360°: KOMPLEKSOWA KONSEPCJA. PROFESJONALNA REALIZACJA.

Doskonała czystość nigdy nie jest dziełem przypadku. Wymaga ona idealnego zgrania wielu elementów. MEIKO 360° to połączenie wszystkich decydujących czynników w jedno kompleksowe rozwiązanie – od profesjonalnego planowania poprzez wysoce skuteczne technologie i idealnie dobrane środki chemiczne aż po niezawodny serwis, inteligentne opcje łączności oraz transfer wiedzy w MEIKO Academy.

Razem z naszymi klientami łączymy wiele elementów w jedno skuteczne, higieniczne, wydajne i niezawodne rozwiązanie.

ŚRODKI CHEMICZNE MEIKO

Uzyskanie doskonałych rezultatów mycia wymaga dokładnego dobrania do siebie technologii, detergentu (opcja) oraz nabłyszczacza. W przypadku zatwierdzonych przez MEIKO produktów Doyen jest to zawsze zagwarantowane.

Zalety środków chemicznych Doyen:

- Zatwierdzone do zastosowania w urządzeniach TOPIC
- Optymalne, ograniczone do minimum dozowanie
- Potwierdzona zgodność materiałowa



MEIKO TOPIC – wszystko z jednego źródła



PLANOWANIE MEIKO

Od osobnych urządzeń aż po zestawy do mycia i dezynfekcji – we współpracy z klientem planujemy kompletne brudowniki. Trudno o lepszy sposób na stworzenie wyjątkowo higienicznych i zoptymalizowanych pod kątem ergonomii stanowisk pracy, które w równym zakresie spełniają życzenia klientów, jak i wymogi ustawowe.


Co nas wyróżnia:

- Rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb – od remontów poprzez modernizacje aż po nowe projekty
- Bezpośrednie połączenia elementów
- Pozbawione szczelin powierzchnie, doskonale łączące wszystkie elementy
- Wszystko wykonane ze stali nierdzewnej



MEIKO ACADEMY

Czy wiedzieli Państwo, że oferujemy również szkolenie techników wewnętrznych? *MEIKO Academy* zapewnia bezpośredni dostęp do ogromu wiedzy, zgromadzonej w ciągu wielu dziesięcioleci naszej działalności. W ramach szkoleń online i stacjonarnych przekazujemy wiedzę o najnowszych technologiach. Ich uzupełnienie stanowią istotne informacje na temat mikrobiologii, zapobiegania zakażeniom oraz aspektów prawnych.

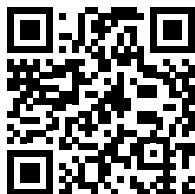

Tutaj można zapoznać się z naszą ofertą szkoleń:
www.meiko-academy.com



SERWIS MEIKO

Nasze zespoły serwisowe oferują krótkie czasy reakcji, szybki dojazd i zawsze mają w samochodzie dużą liczbę części zamiennych.

Zalety serwisu *MEIKO*:
infolinia serwisowa dostępna przez całą dobę, 365 dni w roku. Autoryzowani technicy serwisu, przeszkoleni przez *MEIKO Academy*.



MEIKO TOPIC – przegląd modeli

Osobne urządzenia

MEIKO TOPIC 10 – model naścienny (ze zlewem użytkowym lub bez)

Do montażu ściennego z prześwitem nad podłogą – umożliwiający łatwe czyszczenie podłogi



MEIKO TOPIC 10

Wymiary (mm): szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. (urządzenia) 1630



MEIKO TOPIC 10 A

Wymiary (mm): szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. (urządzenia) 1630
Ostłona przeciwbryzgowa (opcja)

MEIKO TOPIC 20 – model wolnostojący (ze zlewem użytkowym lub bez)
Do montażu podłogowego z cokołem, do szybkiej instalacji



MEIKO TOPIC 20
Wymiary (mm): szer. 500, gł. 450 lub 588, wys. 1730



MEIKO TOPIC 20 A
Wymiary (mm): szer. 1000, gł. 450 lub 588, wys. 1730
Ostłona przeciwbryzgowa (opcja)

MEIKO TOPIC – przegląd modeli

Osobne urządzenia

MEIKO TOPIC 40 – model nastawny (z umywalką lub bez)

Do montażu podłogowego z cokołem, umożliwiający uzyskanie dodatkowej powierzchni roboczej i odstawczej

- Dostarczany standardowo z zamykaną szafką do przechowywania pojemników ze środkami chemicznymi
- Za dodatkową opłatą można zamówić ranty blatów stołu



MEIKO TOPIC 40

Wymiary (mm): szer. 900, gł. 600, wys. 900



MEIKO TOPIC 40 B

Wymiary (mm): szer. 900, gł. 600, wys. 1000

Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150

Zestawy do mycia i dezynfekcji

Zestawy do mycia i dezynfekcji MEIKO z modelami wolnostojącymi lub nastawnymi są dostępne w różnych wersjach – pozwalających na dostosowanie ich do rozmaitych warunków przestrzennych i wymagań. Zapewniają one funkcjonalną organizację i ułatwienie codziennej pracy.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC

Model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym i umywalką

Wymiary (mm): szer. 1400, gł. 600, wys. 1000

Zlew użytkowy: wys. 700

Komora zlewu użytkowego: Ø 362

Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150



SAN 19B – model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, umywalką i szafką (500 mm)

Wymiary (mm): szer. 1900, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362
Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150
Szafki: szer. 500



SAN 20BW – model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, zlewem, umywalką i szafką (600 mm)

Wymiary (mm): szer. 2000, gł. 600, wys. 1000
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362
Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zlew: szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki: szer. 600



SAN 24W – model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, zlewem i szafką (1000 mm)

Wymiary (mm): szer. 2400, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362
Zlew: szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki: szer. 1000



SAN 29BW – model wolnostojący lub nastawny ze zlewem użytkowym, zlewem, umywalką i szafką (1500 mm)

Wymiary (mm): szer. 2900, gł. 600, wys. 900
Zlew użytkowy: wys. 700
Komora zlewu użytkowego: Ø 362
Umywalka: szer. 340, gł. 370, wys. 150
Zlew: szer. 500, gł. 400, wys. 300
Szafki: szer. 1500



MEIKO TOPIC – akcesoria

Jako uzupełnienie swojej technologii mycia i dezynfekcji MEIKO oferuje również kompleksową gamę osprzętu i wyposażenia. Zapewnia ona bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz umożliwia higieniczne przechowywanie naczyń sanitarnych. Opracowujemy także indywidualne rozwiązania dla naszych klientów!



Regały susząco-odstawcze*

- Na zdezynfekowane kaczki i baseny sanitarne oraz pojemniki, z regałem odstawczym i tacą ociekową
- W szerokościach od 500 do 1400 mm



Półki ściennie*

- Z możliwością regulacji wysokości montażu półek
- Dostępne we wszystkich szerokościach (głębokość 350 mm)



Zamknięte szafki montowane na ścianę**

- Z drzwiami na zawiasach i jedną półką środkową
- Dostępne w szerokościach 500/600/800/1000/1200/1500 mm
- Opcja: listwa oświetleniowa i lampa



Otwarte szafki montowane na ścianę

- Do otwartego przechowywania, z jedną półką środkową
- Dostępne w szerokościach 500/1000/1200 mm



Zestaw zmywalniczy*

- Szafki dolne, z szufladami i innymi elementami, do zestawów do mycia i dezynfekcji
- Dostępne w wielu szerokościach i wysokościach




Zlew użytkowy*


- Model standardowy dostępny z opcjonalnym splukiwaniem zlewu użytkowego
- Obsługiwany niezależnie od myjni-dezynfektora

* Na zdjęciach widoczne jest opcjonalne wyposażenie


** Opcja: listwa oświetleniowa i lampa

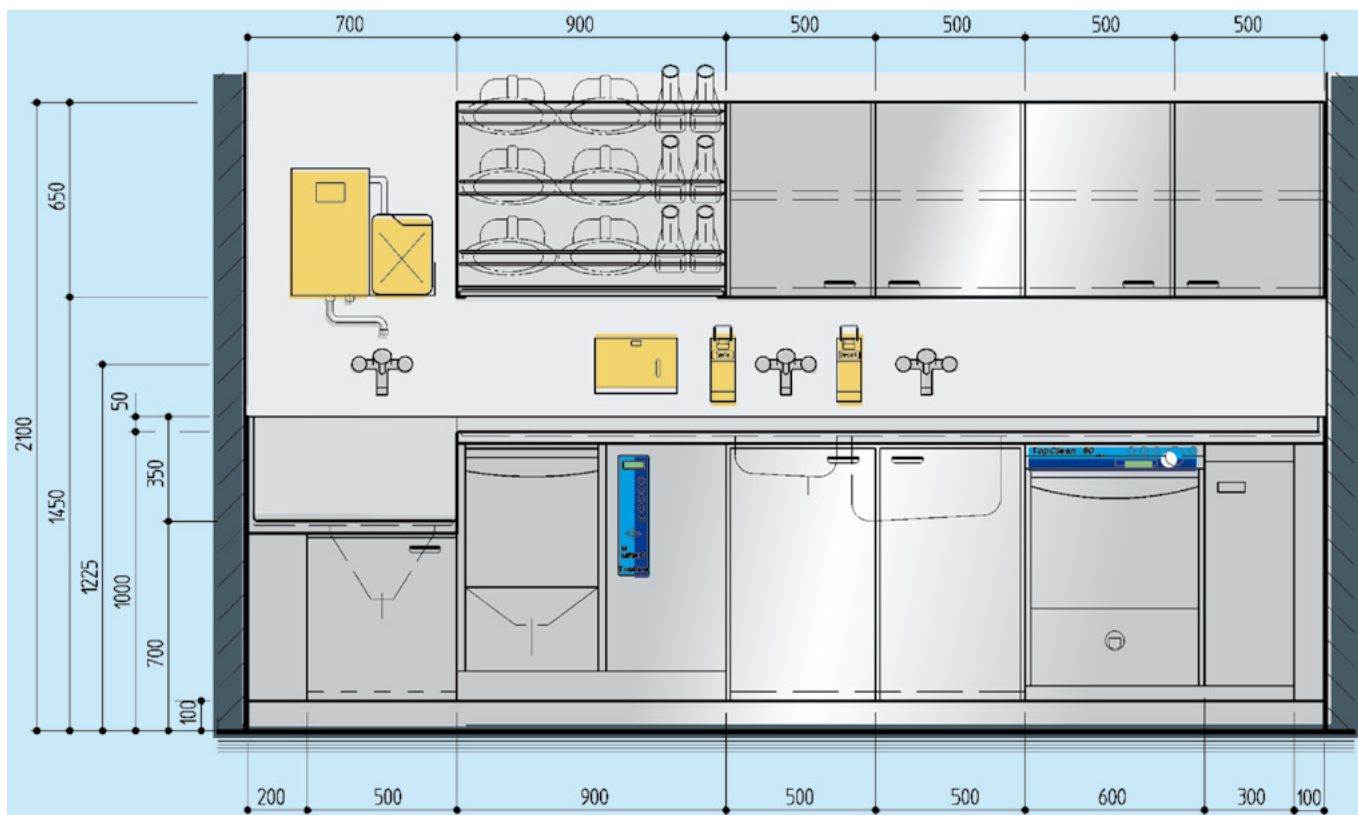


MEIKO TOPIC jako model wolnostojący

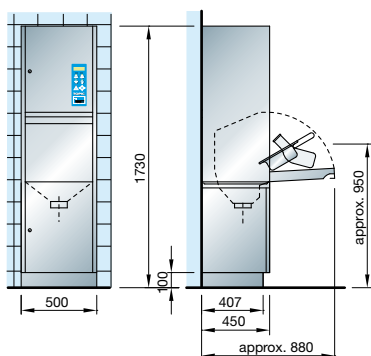

MEIKO TOPIC jako mały zestaw do mycia i dezynfekcji

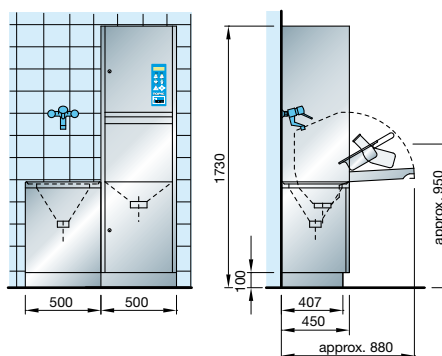

MEIKO TOPIC jako model podblatowy

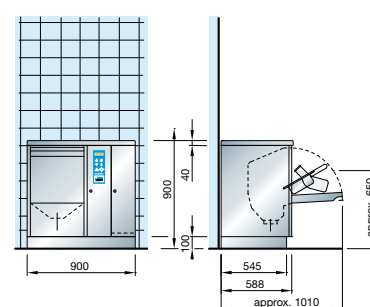

		TOPIC	
		400 V	230 V
Łączna moc przyłączeniowa	kW	4,6	2,8
Przyłącze wody zasilającej, woda zimna		G ¾"	
Przyłącze wody zasilającej, woda gorąca 45-60°C		G ¾"	
Ciśnienie w instalacji	bar	1-5	
Przepływ	l/min	18	
Odpyływ		DN 100	
Poziom hałasu	dB(A)	48,2	



The clean solution

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa, Polska
Tel. kom.: +48 731 889 961 · info@meiko.com.pl · www.meiko.com

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

