

MEIKO TOPIC

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri





İNSANLAR İÇİN DAHA FAZLA ZAMAN

MEIKO TOPIC yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, tek bir tuşa basarak hasta bakım malzemelerinizi temizler ve dezenfekte eder. Bakterileri, virüsleri ve hatta C. diff tipi sporları EN ISO 15883 standardına göre güvenilir bir şekilde yok eder.

Sonuç olarak olağanüstü hijyen sağlanırken bir yandan da iş yükü hafifler.

Bu avantajlar daha iyi operasyonel verimlilik de içerir. Görme engellilere yönelik bir bakımevi olan Blindenwohnstätten Berlin'in Genel Müdürü Jörg Menzel, bunun önemini şu sözlerle açıklıyor: "Bizimki gibi bakım tesislerinde hem iş yükümüzü azaltacak, hem de süreçleri daha verimli kılacak teknolojilere ihtiyaç duyulur."

Yerleşim düzeniniz nasıl olursa olsun, *MEIKO TOPIC* mevcut alana uyum sağlar. Ayaklı model, tezgahaltı model veya yerden yüksek duvara monte model arasında seçim yapabilirsiniz. Dilerseniz, günlük işleyişin akıcı şekilde ilerleyebilmesi için gerekli her şeyi içeren, tam donanımlı bir kombine ünite de sağlayabiliriz.

MEIKO TOPIC tekli cihazlar, eski makinelerin hızlı ve kolayca değiştirilebilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Mevcut bağlantılarınızı kullanarak eski makinenizin markasından bağımsız olarak, mevcut konuma kusursuz şekilde otururlar.



TEMEL ÖZELLİKLER:


- DIN EN ISO 15883'e göre A₀ değeri ile hijyen güvenliği
- Buhar sızdırmaz temizleme ve dezenfeksiyon sistemi
- Üç etkili program (kısa, normal, yoğun)
- One Touch dokunmatik kontrolle kolay kullanım
- Düşük kaynak tüketimi ile maliyet tasarrufu
- Çok fonksiyonlu tutucular sayesinde esneklik
- MEIKO 360° - Kimyasallar, servis, MEIKO Academy ve planlama içeren komple çözüm

MEIKO TOPIC – Teknoloji

Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş sağlam teknoloji, uzun cihaz ömrü için temel oluşturur ve yatırım güvenliği sağlar.

Derin çekme yıkama haznesi, köşesiz ve kenarsız olarak tasarlanarak kendi kendini temizlemek için idealdir. Son derece verimli ve ideal şekilde konumlandırılmış güçlü nozul sistemi ördek, sürgü, lazımlık ve benzeri malzemelerin optimum temizliğini sağlar.

One-Touch teknolojisiyle programları zahmetsizce kumanda edebilirsiniz. Program başlatmadan analizlere kadar tüm adımlar membran tuş takımı üzerinden kumanda edilir.

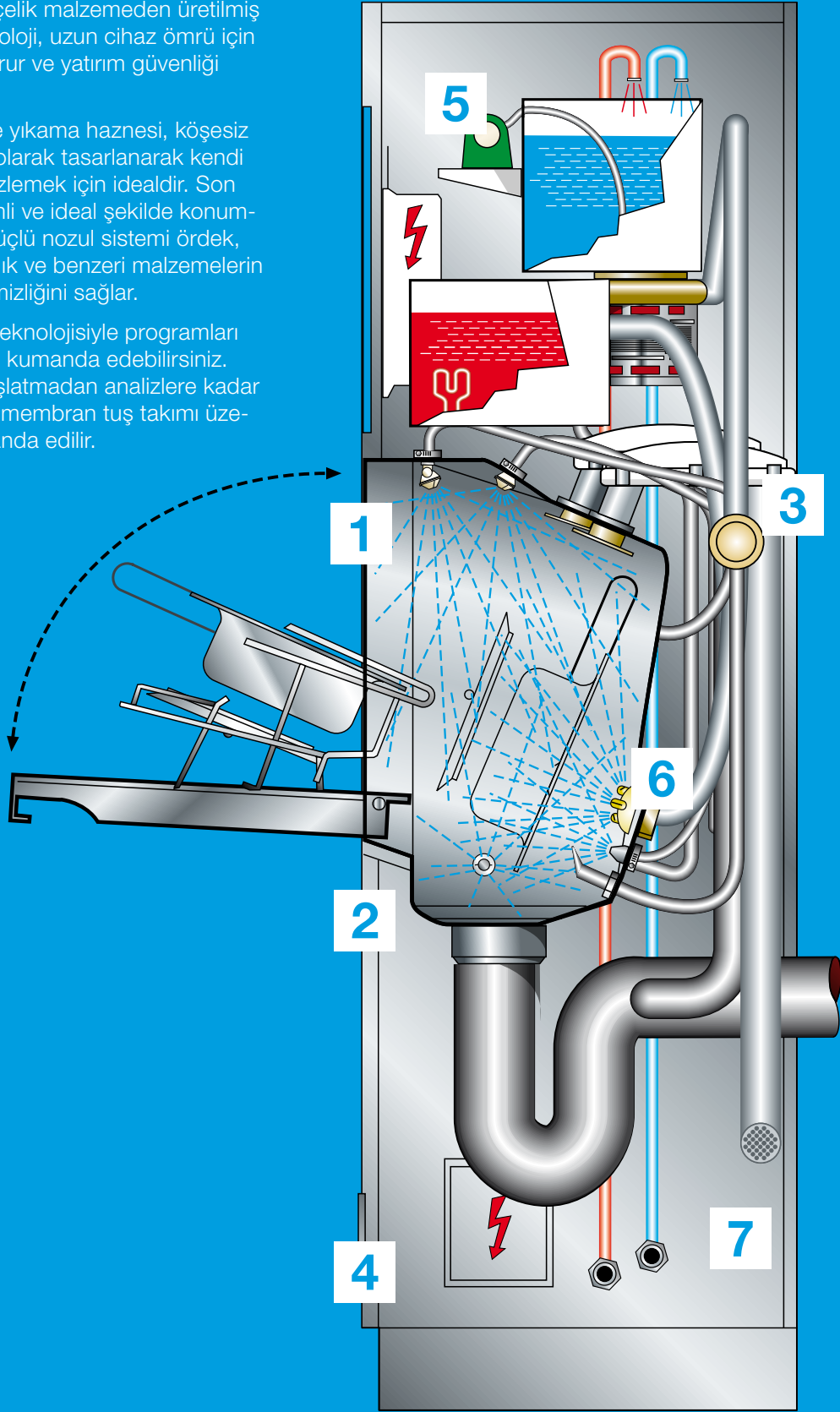

**Steam
Stop****Thermo
Control****System
Disinfect****Chem
Code****Chem
Control****Power
Clean****Cool
Touch****TEMEL ÖZELLİKLER:****1. Buharı güvenli şekilde kontrol edip salan tamamen buhar sızdırmaz sistem****Avantajlarınız**

- Mikropların yayılması etkin şekilde önlenir
- İş yeri güvenliğini ve hijyenini artırır
- Makine ve odada nem kaynaklı hasarlar azalır

2. En kritik nokta, yani en soğuk noktada ölçümler yapan, birbirini karşılıklı denetleyen iki sıcaklık sensörü**Avantajlarınız**

- A0 değerlerine uygunluk durumu izlenir
- Güvenilir dezenfeksiyon performansı sağlar
- EN ISO 15883-1 ve -3 standartlarına uygundur

3. Her yıkamada yıkama haznesinin, tüm su taşıyan hatların ve nozulların sistem dezenfeksiyonu**Avantajlarınız**

- Tekrar kontaminasyonu güvenilir bir şekilde önler
- Eşit buhar dağılımı sayesinde tutarlı bir dezenfeksiyon performansı sağlar

4. Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan için renk ve şekil kodlu kimyasal bağlantıları**Avantajlarınız**

- Olası karışıklıkları güvenilir şekilde önler
- Net iş akışları sağlar
- Günlük operasyonu kolaylaştırır

5. Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan dozaj miktarının ve işlevinin sensör kontrollü izlenmesi**Avantajlarınız**

- Su yumuşatıcı içeren durulama maddesi ve deterjan kullanımını optimize eder
- EN ISO 15883-1 ve -3 standartları uyarınca proses güvenilirliği sağlar
- Kireç oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan zararları önler

6. Döner nozul ve optimum şekilde konumlanmış ilave yıkama nozullarına sahip temizleme sistemi**Avantajlarınız**

- Minimum düzeyde zaman ve kaynakla kapsamlı temizlik sağlar
- Mikropları etkin şekilde yok eder ve aktif olarak uzaklaştırır
- Mekanik etki, sıcaklık ve deterjanın kombinasyonu sayesinde C. diff sporlarına karşı dahi etkilidir (uzman görüşüyle doğrulanmıştır)

OPSİYON**7. Filtrelenmiş hava ile tekrar soğutma – kurutma etkisi dahil****Avantajlarınız**

- HEPA filtrasyon sayesinde mikropsuz hava ile soğutur
- Hasta bakım malzemelerinin derhal kullanıma hazır olmasını sağlar
- Su ile soğutmaya göre tekrar kontaminasyon riskini düşürür

MEIKO TOPIC – Makine opsiyonları ve ayarları



KIZILÖTESİ EL SENSÖRLÜ VE/VEYA AYAK ŞALTERLİ OTOMATİK KAPAK: (opsiyonel)

- Patojen yayılma riskini minimuma indirir
- Sağlık ve bakım tesislerinde daha kolay kullanım sağlar

AYARLANABİLİR A₀ DEĞERİ:

- A₀ değerini esnek bir şekilde seçin
- Mevcut değerler: A₀ 60, A₀ 600, A₀ 3000 (3000 değeri CoolTouch ile birlikte mümkündür)
- Enfeksiyon kontrol ekibinizle koordinasyon halinde, temel hijyen amaçlı veya ihtiyaca göre ayarlanır

ÜÇ ADIMDA MÜKEMMEL A₀ DEĞERİ



Adım 1:

Temizlik programını, hasta bakım malzemelerinin türüne ve kirlilik derecesine göre seçin, tuşu basılı tutun.




Adım 2:

Ekranda mevcut A₀ değerleri gösterilir: A₀ 60 / A₀ 600 / A₀ 3000. İstediğiniz değer ortada görüldüğünde tuşu bırakın.



Adım 3:

Tuşu bırakmanızla birlikte program otomatik olarak başlar.

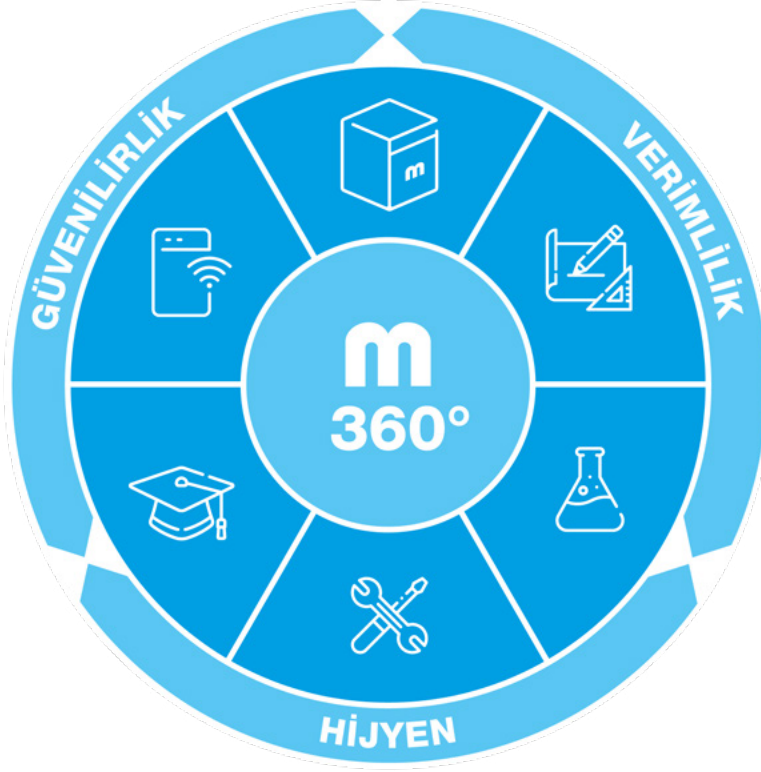

MEIKO 360°: BÜTÜNSSEL TASARIM. UZMAN UYGULAMA.

Mükemmel temizlik asla tesadüf değildir. Tüm unsurların uyum içinde çalışmasının bir sonucudur. MEIKO 360°, uzman planlaması, yüksek performanslı teknoloji ve kusursuz uyum halindeki kimyasallardan, güvenilir servis, akıllı bağlantı imkanları ve MEIKO Academy ile bilgi transferine kadar, tüm kritik faktörleri tek bir entegre çözüm altında birleştirir.

Sizinle birlikte birçok farklı parçayı hijyenik, verimli ve güvenilir olan güçlü bir bütün haline getiririz.

MEIKO KİMYASALLARI

Mükemmel temizlik sonuçları için teknoloji, deterjan (opsiyonel) ve durulama ürünü birbiriyle uyumlu olmalıdır. *MEIKO TOPIC* onaylı DOYEN ürünleri ile bu mümkündür.

Doyen kimyasallarının avantajları:

- *MEIKO TOPIC* makinelerde kullanım için onaylı
- Olabildiğince düşük tutulan optimum dozaj miktarı
- Test edilmiş malzeme uyumluluğu



MEIKO TOPIC – Her şey tek kaynaktan




MEIKO PLANLAMA

İster tekli cihazlar ister kombine üniteler olsun, temizlik odanızın tamamını sizinle birlikte planlarız. Böylece müşterilerin beklentilerini ve yasal gereklilikleri eşit derecede karşılayan, sıra dışı düzeyde hijyenik ve ergonomik açıdan optimize edilmiş çalışma alanları sağlarız.

Bizi farklı kılan özelliklerimiz:

- Yenileme ve modernizasyon projeleri ile yeni projeler için işletmeye özel temiz çözümler
- Kaynaksız bağlantılar
- Tüm parçaları birbiriyle kusursuz bir şekilde birleştiren düz yüzeyler
- Tamamen paslanmaz çelik tasarım

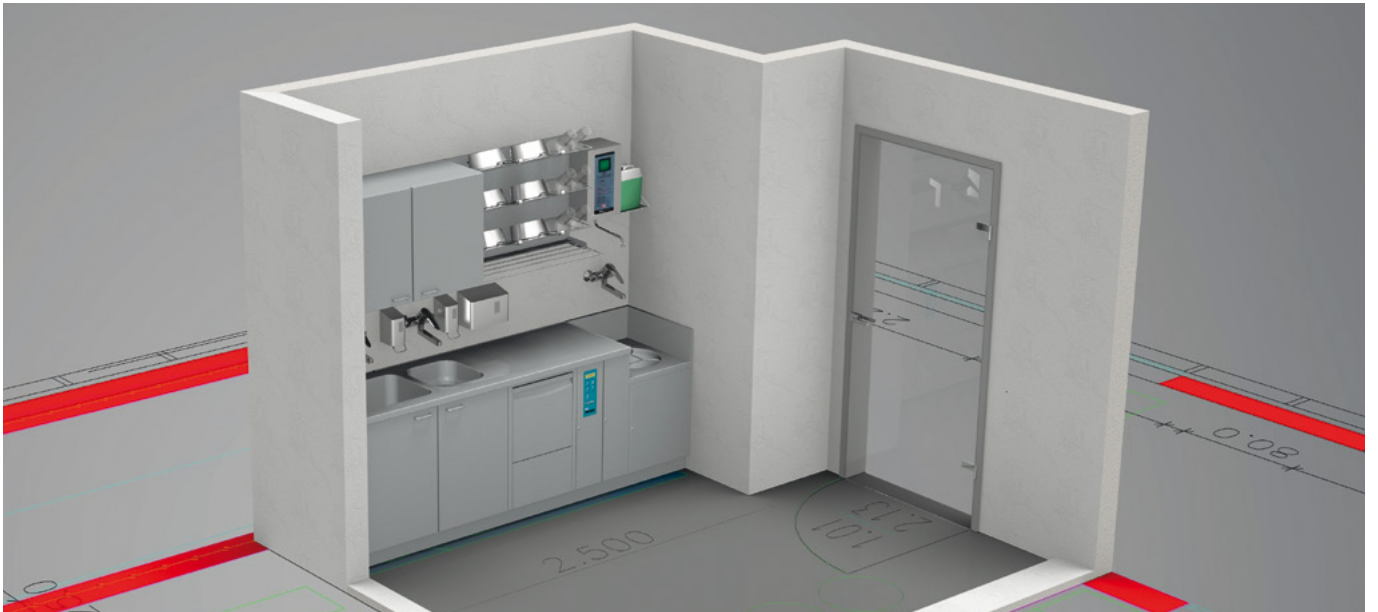

MEIKO ACADEMY

Kurum içi teknisyenlerinize de eğitim verdiğimiz biliyor muydunuz? *MEIKO Academy* ile uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz bilgi birikimine doğrudan erişim sağlayabilirsiniz. Çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerimizle son teknolojilerden haberdar olursunuz. Kurslarımız mikrobiyoloji dünyasından ilgi çekici bilgilerin yanı sıra enfeksiyon önleme ve yasal konuları da kapsar.



Eğitim programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin:
www.meiko-academy.com



MEIKO SERVİS

Servis departmanımız hızlı müdahale süreleri, yaygın servis ağı ve yüksek yedek parça stoğu

ile öne çıkar. *MEIKO Servisin* sunduğu avantajlar: Kolay ulaşılabilir yaygın servis ağı, *MEIKO Academy* tarafından eğitilen yetkili servis teknisyenleri.



MEIKO TOPIC – Modeller

Tekli cihazlar

MEIKO TOPIC 10 – Duvara monte model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Kolay zemin temizliği için yerden yüksek, duvara montaj



MEIKO TOPIC 10
Ebatlar (mm): G 500, D 450 veya 588, Y (makine) 1630



MEIKO TOPIC 10 A
Ebatlar (mm): G 1000, D 450 veya 588, Y (makine) 1630
Sıçrama önleyici (opsiyonel)

MEIKO TOPIC 20 – Ayaklı model (boşaltma evyeli veya evyesiz)
Hızlı kurulum için kaideli zemin montajı



MEIKO TOPIC 20
Ebatlar (mm): G 500, D 450 veya 588, Y 1730



MEIKO TOPIC 20 A
Ebatlar (mm): G 1000, D 450 veya 588, Y 1730
Sıçrama önleyici (opsiyonel)

MEIKO TOPIC – Modeller

Tekli cihazlar

MEIKO TOPIC 40 – Tezgahaltı model (el yıkama evyeli veya evyesiz)
Çalışma ve depolama alanını genişletmek için kaideli zemin montajı

- Kimyasallar için kilitlenebilir depolama dolabı standart olarak mevcuttur
- Ek ücret karşılığında tezgah sırtı eklenebilir



MEIKO TOPIC 40
Ebatlar (mm): G 900, D 600, Y 900



MEIKO TOPIC 40 B
Ebatlar (mm): G 900, D 600, Y 1000
El yıkama evyesi: G 340, D 370, Y 150

Kombine üniteler

MEIKO kombine üniteler, ayaklı veya tezgahaltı modellerle birlikte farklı konfigürasyonlarda mevcut olup, ortam koşullarına ve gereksinimlere uyum sağlarlar. Bu ürünler maksimum işlevsellik sunarak günlük iş akışını kolaylaştırmaya yardımcı olurlar.

SAN 14 B / MEIKO TOPIC
Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte
boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi

Ebatlar (mm): G 1400, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi: Y 700
Boşaltma evyesi: Ø 362
El yıkama evyesi: G 340, D 370, Y 150



SAN 19B – Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi ve dolap (500 mm)

Ebatlar (mm):	G 1900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Dolap alanı:	G 500



SAN 20BW – Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (600 mm)

Ebatlar (mm):	G 2000, D 600, Y 1000
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 600



SAN 24W – Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, evye ve dolap (1000 mm)

Ebatlar (mm):	G 2400, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1000



SAN 29BW – Ayaklı veya tezgahaltı model ile birlikte boşaltma evyesi ünitesi, el yıkama evyesi, evye ve dolap (1500 mm)

Ebatlar (mm):	G 2900, D 600, Y 900
Boşaltma evyesi ünitesi:	Y 700
Boşaltma evyesi:	Ø 362
El yıkama evyesi:	G 340, D 370, Y 150
Evye:	G 500, D 400, Y 300
Dolap alanı:	G 1500



MEIKO TOPIC – Aksesuarlar

MEIKO, temizleme ve dezenfeksiyon teknolojilerinin yanı sıra kapsamlı bir aksesuar ve ekipman portföyü sunar. Bu ürünler, güvenli ve ergonomik çalışma koşullarını destekleyerek hasta bakım malzemelerinin hijyenik şekilde depolanmasını mümkün kılar. Ayrıca işletmenize özel çözümler geliştirmekten mutluluk duyarız!



Kuruma ve depolama rafları*

- Dezenfekte edilen ördekler, sürgüler ve kaplar için ızgara taban raflı veya damlalıklı
- 500 ila 1400 mm genişliklerde mevcuttur



Duvar rafı*

- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Tüm genişliklerde mevcuttur (derinlik 350 mm)



Kapaklı duvar dolapları**

- Menteşe kapaklı ve bir ara raflı dolaplar
- 500/600/800/1000/1200/1500 mm genişliklerde mevcuttur
- Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma



Açık duvar dolapları

- Açık depolama için 1 ara raflı dolaplar
- 500/1000/1200 mm genişliklerde mevcuttur



Kombine yıkama ünitesi*

- Kombine üniteler için çekmeceli vs. alt dolaplar
- Farklı genişlik ve yüksekliklerde mevcuttur




Boşaltma evyesi ünitesi*


- Standart model, isteğe bağlı olarak entegre sifon sistemiyle donatılabilir.
- Yıkama ve dezenfeksiyon makinesinden bağımsız olarak kullanılabilir

* Fotoğraflar opsiyonel özellikler/aksesuarlar içermektedir


** Opsiyonel: Işık paneli ve aydınlatma

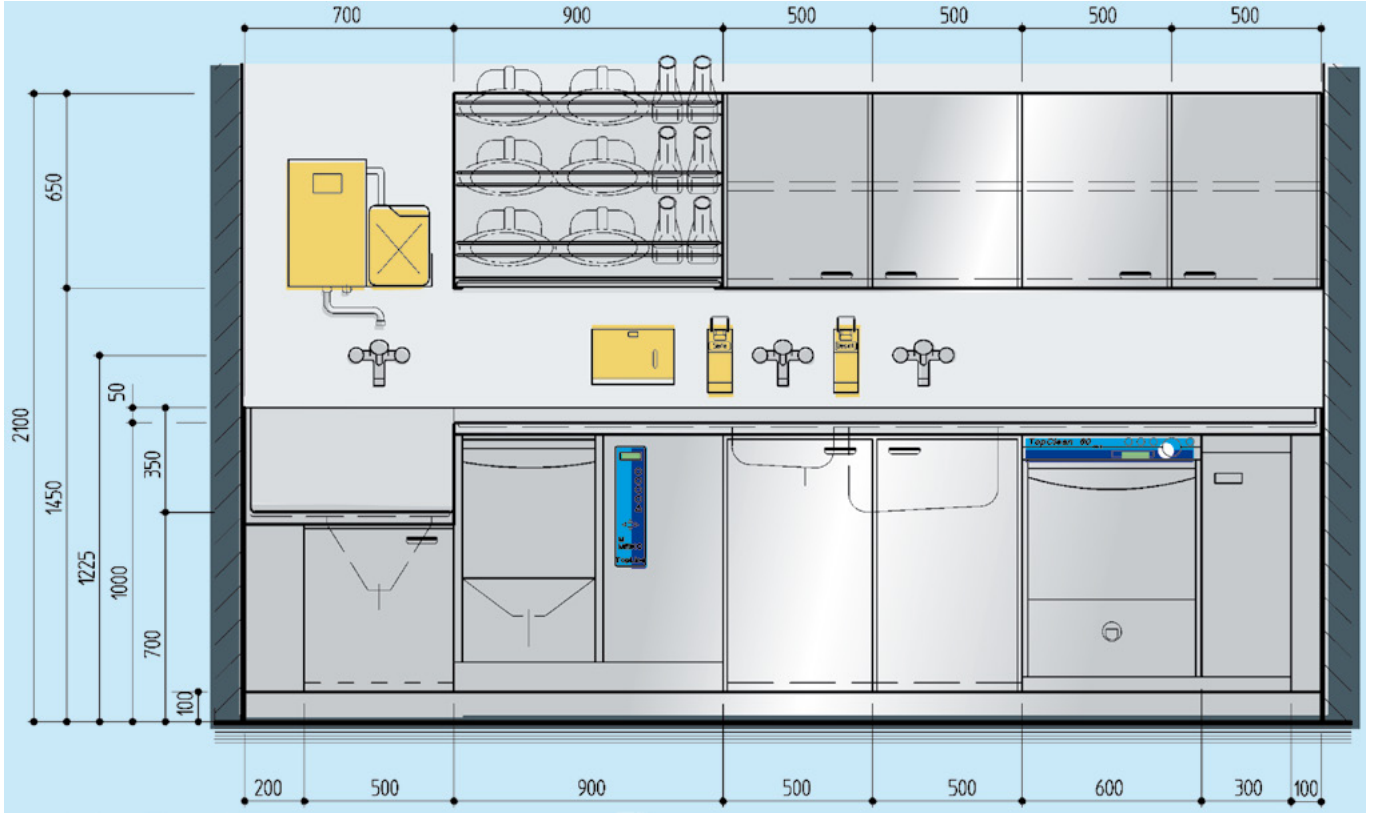


MEIKO TOPIC ayaklı model

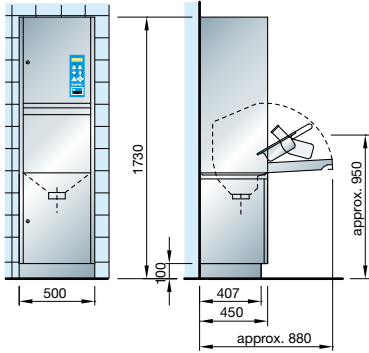

MEIKO TOPIC küçük kombine ünite

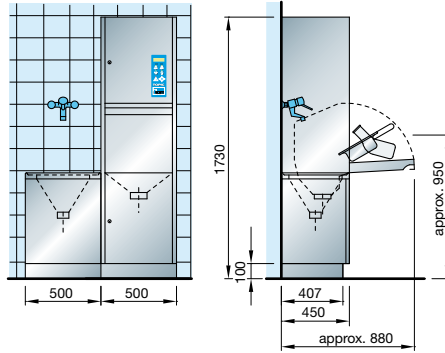

MEIKO TOPIC tezgahaltı model

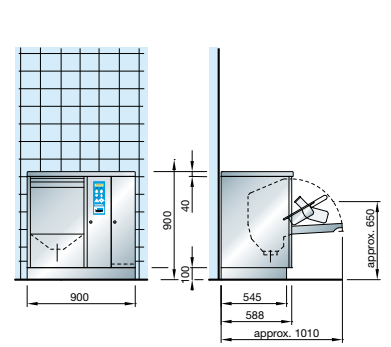

		TOPIC	
		400 V	230 V
Toplam bağlantı gücü	kW	4,6	2,8
Besleme suyu bağlantısı, soğuk su		G ¾"	
Besleme suyu bağlantısı, sıcak su 45-60°C		G ¾"	
Akış basıncı	bar	1-5	
Akış hızı	l/dk	18	
Gider		DN 100	
Gürültü seviyesi	dB(A)	48,2	



The clean solution

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

